

ottobock.

完成用部品

1C59 タレオ アダプト

タレオファミリー最高峰





オットーボックのカーボン足部として
スタンダードの地位を築いているタレオファミリー。
その最大の特徴は、カーボンのしなりと反発力による
軽快で滑らかな歩行です。

しかし、カーボンの構造だけでは、人間の足関節が持つ
多様な役割を補うことはできません。
足関節の役割の中で、特に義足足部が苦手とするのは
「姿勢の制御」ではないでしょうか。

1C59 タレオアダプトは
足関節の動きを再現する油圧ユニットを搭載し
歩行、立位、座位における姿勢の制御を可能にします。



“足首の動きが自然で
健側と同じ感覚!”

タレオアダプトの構造と特長



海水・塩素水も対応する防水
ピラミッドアダプター接続部は
排水溝付き



背屈10° 底屈2°の大きな
可動域を持つ油圧ユニット



油圧抵抗値は背屈・底屈
それぞれに調整可能



薄いカーボンを2枚重ねた構造により、
甲が滑らかにたわむ。油圧ユニットの可
動域以上に大きな背屈が可能となる。



横方向の斜面や凸凹の路面でも
歩きやすいスプリットトゥ



人の足の土踏まずのように、クッション
性と滑らかな踏み返しを促す、アーチ
付きのベースカーボン



大きく開いたカーボン構造と、交換可能
な3種のウェッジによる踵の衝撃吸収

and MORE...



指股付き



排水穴付き



色が選べる



マニキュア対応



“立位や座位での
断端への負担が減って快適”

調整

大きな可動域を十分に発揮するためには、**基本のアライメント調整が重要です。**

以下のステップに従ってアライメントを調整してください。
より詳しい内容は、各QRコードから動画で確認できます。


1 ベンチアライメント

ゴール：アライメント基準線が、ソケット基準点と足部参照点を通る

- 1) ヒールウェッジは「黒」が挿入されていることを確認
＊ 納品時および試用用デモ機の初期設定は「黒」です。
- 2) 調整バルブを最大値に設定
- 3) 油圧ユニットをニュートラル位置（実線）に合わせる
- 4) アライメント基準線を足部の参照点に合わせる



調整バルブ

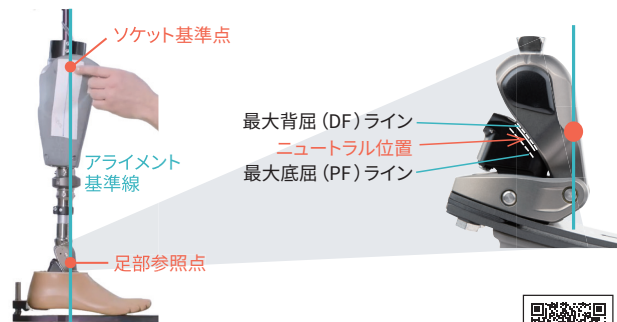

チュートリアル動画
ベンチアライメント



2 スタティックアライメント

ゴール：ニュートラル位置での安定した立位

- 1) 調整バルブを中央値に設定
- 2) ステップテストを実施
- 3) ▶ 前方へ不安定感がある/背屈(DF)ラインが見える場合→足部を前方に移動
▶ 後方へ不安定感がある/底屈(PF)ラインのみが見える場合→足部を後方に移動
▶ 立位は安定しているが、背屈(DF)ラインが見える場合→足部を背屈させる
▶ 立位は安定しているが、底屈(PF)ラインのみが見える場合→足部を底屈させる



調整バルブ



チュートリアル動画
スタティックアライメント



3 ダイナミックアライメント

ゴール：装着者に適した底屈(P)、背屈(D)バルブ調整

右の動作を確認し、動きに慣れた後の変更をお勧めします

チュートリアル動画
ダイナミックアライメント



試着

タレオ アダプトを装着したら、以下の動作をお試ください。

1



座位：足を少し前に置く

- ▶ 足底が接地することで、断端への圧が軽減されます。
- ▶ 自由に足の位置を変えて、足関節の動きを確認してみてください。

2



椅子からの立ち上がり

- ▶ 義足を軽く引き、両足を接地させたまま立ち上がります。
- ▶ 椅子に座る動作もお試ください。

3



立位

- ▶ お好みの位置に足を置いた姿勢で、上半身を前後左右に動かします。
- ▶ 上半身の安定や、断端へのストレスの違いを確認してみてください。

4



斜面・階段

- ▶ 坂の上り/下り
- ▶ 階段の上り/下り
- ▶ 足関節が動くことで、立位と歩行に違いがあるか確認してください。

5



スピード変化

- ▶ ゆっくり歩き、普通歩き、早歩きでも油圧抵抗に違和感がないか確認してください。

6



裸足

- ▶ 靴のない状態での立位、歩行もお試ください。

“足の裏が接地しているから
立ち上がりがスムーズ
自由に動き出せる”

“階段の上り下りが
安定している”

“坂の上りが特に楽！
疲れにくいし、躓かない”

テクニカルインフォメーション

注文時の表記例

製品番号	=	左右	サイズ	-	カテゴリ	-	P / 色	形状
1C59	=	R	25	-	3	-	P / 4	
		↓			↓			↓
		左右			色			形状
		R 右			4 ベージュ			空白 標準
		L 左			7 ブラック*			S 幅狭
					15 ライトブラウン			

*ブラックは幅狭のみ

同梱内容



1C59本体/2C8フットシェル/2F50ヒールウェッジ(3種セット) /スペクトラソックス

製品番号	1C59									
モビリティグレード	2 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)*	126 mm		129 mm		134 mm	135 mm	-	-	-	
実長 (標準フットシェルの場合)	126 mm		129 mm		134 mm	135 mm		139 mm		
重さ (幅狭フットシェルの場合)**	741 g	762 g	789 g	829 g	884 g	913 g	-	-	-	
重さ (標準フットシェルの場合)	746 g	772 g	804 g	839 g	899 g	933 g	942 g	1033 g	1036 g	
最大体重制限	88 kg	100 kg		115 kg	130 kg					

*1C56のデータより推定 (同フットシェル使用)

**フットシェルの取扱説明書より算出

カテゴリ表

活動度が高めの場合は1つ大きいカテゴリを選択してください。

体重 \ サイズ	22cm	23cm	24cm	25cm	26cm	27cm	28cm	29cm	30cm
51kg まで	1	1	1	1	1	-	-	-	-
52 - 58kg	2	2	2	2	2	-	-	-	-
59 - 67kg	3	3	3	3	3	3	3	-	-
68 - 77kg	4	4	4	4	4	4	4	4	4
78 - 88kg	5	5	5	5	5	5	5	5	5
89 - 100kg	-	6	6	6	6	6	6	6	6
101 - 115kg	-	-	-	7	7	7	7	7	7
116 - 130kg	-	-	-	-	8	8	8	8	8

交換部品

フットシェル

注文時の表記例

製品番号	=	左右	サイズ	-	色	形状
2C8	=	R	25	-	4	

製品番号	2C8
左右	左(L), 右(R)
形状	幅狭 (S)* 標準 (空白)
色	ベージュ (4), ブラック** (7), ブラウン (15)
コネクションプレート	なし 2C21

*幅狭は27cmまで **ブラックは幅狭のみ

ヒールウェッジ (3種セット)

発注品番	対応サイズ
2F50=22-25	22-25 cm
2F50=26-28	26-28 cm
2F50=29-30	29-30 cm

お問い合わせ先