

ottobock.

Ortézy.

Přehled produktů.

Platnost od 1. 1. 2025



Senzomotorické vložky

Reliéf povrchu vložek PROPRIO® je vždy tvořen individuálně a řídí se dle anatomie, fyziologie a indikace pacienta. Vložky jsou frézovány nejmodernější počítačově řízenou CNC technologií. Výhodou tohoto způsobu výroby je její přesná reprodukovatelnost do nejmenšího detailu. Dle typu obuvi mohou být vložky vyrobeny v různých tloušťkách, dokonce i pro obuv elegantní.

Cílenou stimulací šlach dlouhých a krátkých svalů nohy se mění receptorové signály proprioreceptorů ve svalovém břišku a v přechodové oblasti mezi svalem a šlachou. Centrální nervový systém na to reaguje změnou napětí svalstva, napnutím nebo uvolněním. V důsledku toho se mění postavení kloubů a tím i statika. Biomechanické točivé momenty ovlivňují dynamické procesy, jako je rotace nohy a celé dolní končetiny. Vyrovnáním svalových dysbalancí se účinně působí proti příčině potíží, které v souvislosti s nimi vznikají. Pro svaly tak vznikne tréninkový efekt, který vede k tomu, že chybné postavení a funkční deficity jsou dlouhodobě a trvale korigovány.

Skupina / Kód ZP	Název	Užitná doba	Úhrada ZP	Odbornost lékaře
24 / 4000052	Vložky ortopedické speciální indiv. zhotovené	2 páry / 12 měsíců	80%	DIA, ORP, ORT, REH, TRA, REV

Děti a mládež

Indikace

- Přítomnost závažné vady chůze – chůze po špičkách, asymetrie, časté zakopávání – aplikace co nejdříve
- Přítomnost chybného postavení nebo zatížení – aplikace zpravidla od 3. roku věku dítěte

Dospělí pacienti s bolestmi

Indikace

- Dospělí bez omezení věku – senzomotorický systém lze trénovat až do konce života

Kontraindikace

- Kontraktura hlezenního kloubu
- Diabetes mellitus, revmatické onemocnění

Sportovci

Druhy sportu

- Basketbal, házená, fotbal, golf, běh, tanec, tenis, volejbal, turistika, fitness


Kontraindikace

- Diabetes mellitus

Pacienti s neurologickou diagnózou

Indikace

- Dětská mozková obrna, trisomie 21. chromozomu, spina bifida, cévní mozková příhoda, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, kraniocerebrální trauma

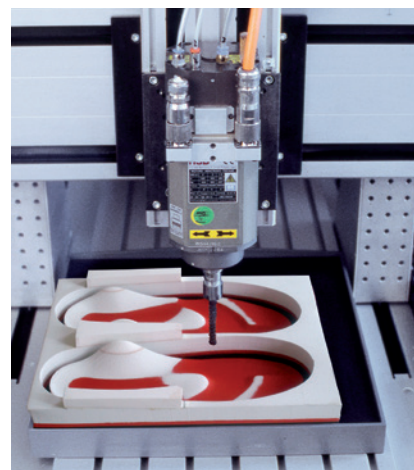

Návod pro předpis a úhradu ortéz zdravotní pojišťovnou

Skupina / Kód ZP	Název	Užitná doba	Úhrada ZP	Odbornost lékaře
24 / 4000005	Ortéza trupu na zakázku od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000006	Ortéza trupu na zakázku dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000007	Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice od 19 let, s nutností individuální úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000147	Ortéza trupu z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000009	Bandáž trupu na zakázku, od 19 let	1 ks / 12 měsíců	95%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000010	Bandáž trupu na zakázku, dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000011	Ortéza horní končetiny na zakázku, od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000012	Ortéza horní končetiny na zakázku, dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000013	Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000142	Ortéza horní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000020	Ortéza dolní končetiny na zakázku, od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000021	Ortéza dolní končetiny na zakázku, dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000022	Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností individuální úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000143	Ortéza dolní končetiny z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000001	Ortéza pro hlavu a krk na zakázku od 19 let	1 ks / 12 měsíců	99%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000002	Ortéza pro hlavu a krk na zakázku dětská do 18 let včetně	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000003	Ortéza kraniální remodelační na zakázku děti do 1 roku včetně	1 ks / 12 měsíců	95%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000004	Ortéza pro hlavu a krk z prefabrikátu nebo stavebnice s nutností indiv. úpravy	1 ks / 12 měsíců	95%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
24 / 4000138	Ortéza pro hlavu a krk z prefabrikátu nebo stavebnice do 18 let včetně, s nutností individuální úpravy	2 ks / 12 měsíců	100%	Z CHI, NEU, ORP, ORT, REH
30 / 4100001	Úprava ortézy na zakázku		100%	Z DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, ONK
30 / 4100002	Oprava ortézy na zakázku		75%	Z DIA, CHI, NEU, ORP, ORT, REH, ONK

Platnost od 01.02. 2024

Z = nutné vyjádření ZP

509 a 510 Ortézy pro vbočený palec

Úhrada ZP: 0,- Kč
509 Doplatek pacienta: 355,- Kč
510 Doplatek pacienta: 423,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Přitahuje palec do správné polohy
- Zmírňuje bolesti
- Dobré zachycení palce
- Může působit jako prevence nebo pro zpomalení vývoje tohoto onemocnění
- Pelota z PCM materiálu zlepšuje komfort nošení
- 510 má delší pásek než 509
- **Levá/pravá**

Indikace

- Hallux Valgus

univerzální velikost

50S5 Malleo Sensa

Kód ZP: 04/5008429
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Zlepšení stability kotníku
- Podporuje resorpci edému a hematomu pomocí řízené komprese
- Snižuje bolest
- Zlepšení funkce hlezenního kloubu
- Tvarově pletená plochá textilie
- Integrované anatomické silikonové peloty
- Neomezuje přirozený pohyb
- **Levá/pravá**

Indikace

- Pocity nestability
- Insuficience vazů
- Tendomyopatie
- Efúze kloubů a otoky vlivem artrózy a artritidy
- Pooperační a posttraumatické záněty



XS	S	M	L	XL	XXL	cm
17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29	

50S9 Ortéza hlezenní Malleo Direxa Stirrup

Kód ZP: 04/5008433
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Stabilizace hlezenního kloubu
- Omezení inverze a everze chodidla bez omezení plantární a dorzální flexe
- Univerzální velikost i strana
- **Součástí ortézy jsou chladicí postranní polštářky, které lze vyměnit za textilní**


Indikace

- Nestability hlezna (i chronické)
- Pooperační a poúrazová léčba ruptur vazů
- Distorze kotníku
- Doléčení po sádrové fixaci při frakturách

univerzální velikost

50S3 Ortéza kotníku Malleo Sprint

Kód ZP: 04/5008427
Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 854,- Kč

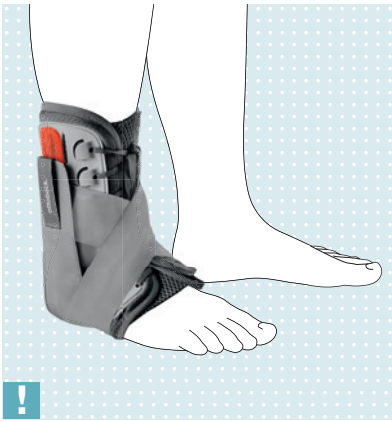

Účinky a vlastnosti

- Speciální vnější vyztužení podporuje stabilizaci v obuvi i bez ní
- Omezuje everzi a inverzi chodidla
- Neomezuje plantární a dorzální flexi
- Včetně stabilizačních popruhů
- Optimální odvádění vlhkosti od pokožky
- **Unilaterální**

Indikace

- Vazové instability
- Pooperační a pouřazová léčba ruptur vazů
- Těžší distorze kotníku
- Chronické instability horního hlezenního kloubu



Noha/kotník

XS	S	M	L	XL	
25,5-28	28-30,5	30,5-33	33-35,5	35,5-38	cm

50S8 Ortéza s třístupňovou stabilizací Malleo TriStep

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Funkce postupně nahradí tři ortézy kotníku s různou úrovní stabilizace
- Postupné nastavení stabilizace a zpevnění kotníku dle aktuálních požadavků rehabilitačního procesu
- Stabilizace v inverzi/everzi
- Prevence opakovaných zranění
- **Unilaterální**

Indikace

- Akutní poranění hlezenního kloubu
- Akutní chronické nestability aparátu vazivového pouzdra
- Zánětlivá onemocnění kloubů
- Degenerativní onemocnění hlezenního kloubu
- Rehabilitace po operacích hlezenního kloubu
- Natržení mediálního vazů




S	M	L	
36-39	40-44	45-48	velikost boty

50S1 Prefabrikát pro ortézu Dyna Ankle

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

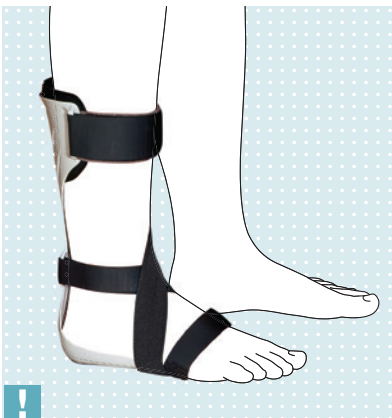

Účinky a vlastnosti

- Držení chodidla v mírné pronaci a dorzální flexi
- Plynulé omezování plantární flexe a supinace
- Omezení rotace
- Díky volnosti vnějšího hlezenního kloubu je možné používat bezprostředně po traumatu
- Možnost ledování s nasazenou ortézou
- Lze ji nosit v botě
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

- Konzervativní léčba poranění vnějších vazů hlezenního kloubu
- Ochrana po operační náhradě a rekonstrukci vazů
- Léčba předního talofibulárního vazů po frakturách kotníku
- Stabilizační pomůcka při chronické nestabilitě horního hlezenního kloubu a/nebo dolního hlezenního kloubu s kontraindikací operace



35-37	37-39	39-41	41-44	velikost boty
-------	-------	-------	-------	---------------

50S20-1 Noční polohovací dlahy Malleo Immobil

Kód ZP: 04/5008495

Úhrada ZP: 730,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Polohování a fixace chodidla do dorzální flexe
- Omezení plantární flexe chodidla
- Plastová skořepina a textilní vyložení
- 3 velikosti dle velikosti boty

Indikace

- Pooperační léčba prodloužení šlach v oblasti lýtky
- Potíže v oblasti bérce a chodidla v důsledku přetížení



S	M	L	
do 37	38-42	nad 43	velikost boty

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50S14 Malleo Immobil Air Walker, nízký

Kód ZP: 04/5008419
Úhrada ZP: 974,- Kč
Doplatek pacienta: 1353,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Imobilizace v oblasti chodidla a kotníku
- Zlepšení stability, podpora resorpce otoků, hematomů a pohmoždění řízenou kompresí
- Součástí ortézy je pumpa, kterou je možné nastavit stupeň komprese požadované pro postiženou oblast
- Jednoduché nastavení díky suchým zipům (použití závisí na fázi rehabilitace)
- Zakulacená podrážka podporuje fyziologický obraz chůze
- Měkké, příjemné vyložení pro lepší komfort nošení
- **Unilaterální**

Indikace

- Pooperační a konzervativní léčba fraktur distální části lýtkové kosti a stabilních fraktur přednoží, metatarzů a kotníku
- Těžké distorze kotníku
- Poranění měkkých tkání chodidla



S	M	L	XL
31-35	36-42	43-45	46-50
27	27	27,5	27,5

velikost boty
výška v cm

50S12 Malleo Immobil Air Walker, vysoký

Kód ZP: 04/5008423
Úhrada ZP: 974,- Kč
Doplatek pacienta: 1477,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Imobilizace v oblasti chodidla a kotníku
- Zlepšení stability, podpora resorpce otoků, hematomů a pohmoždění řízenou kompresí
- Součástí ortézy je pumpa, kterou je možné nastavit stupeň komprese požadované pro postiženou oblast
- Jednoduché nastavení díky suchým zipům (použití závisí na fázi rehabilitace)
- Zakulacená podrážka podporuje fyziologický obraz chůze
- Měkké, příjemné vyložení pro lepší komfort nošení
- **Unilaterální**

Indikace

- Pooperační a konzervativní léčba fraktur distální části lýtkové kosti a stabilních fraktur přednoží, metatarzů a kotníku
- Těžké distorze kotníku
- Poranění měkkých tkání chodidla



S	M	L	XL
31-35	36-42	43-45	46-50
38	42	42,5	42,5

velikost boty
výška v cm

28U50 Prefabrikát pro ortézu Malleo Neurexa^{PRO}

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Termoplastická AFO
- Pro pacienty se supinačním postavením nohy a s lehkou spasticitou
- Podporu dělají uzavřené popruhy společně s elastickým pronačním popruhem
- Korekce postavení nohy do neutrální pozice
- Lze použít pro denní nošení i jako noční polohovací dlahu
- Zabraňuje kontrakturám
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

- Ortéza vhodná při oslabení dorzálních flexorů nohy spojené se supinačním postavením nohy, které je způsobené spasticitou jako např.:
- Po cévní mozkové příhodě
 - Po traumatickém poškození mozku
 - Při roztroušené skleróze
 - Při neuromuskulární atrofii
 - Při peroneální paréze



35-37	37-39	39-41	41-44	velikost boty
-------	-------	-------	-------	---------------

28U70 Ortéza GoOn

Kód ZP: 04/5008435
Úhrada ZP: 1460,- Kč
Doplatek pacienta: 639,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Základní úroveň vybavení
- Udržuje nohu v neutrální pozici
- Vlákna pružiny umožňují nastavení síly přizvedávání chodidla dle potřeby
- Použití měkkých materiálů zvyšuje komfort nošení
- Snadná manipulace
- Lze nosit v botách i bez bot
- Zachovála propriocepce díky volné patě a přednoží

Indikace

Oslabení dorzálních flexorů nohy jako následek:

- Únavového syndromu
- Problémů s rovnováhou
- Demence
- Parkinsonovy choroby
- Cévní mozkové příhody
- Traumatických poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulární atrofie
- Obrny peroneálního nervu




univerzální velikost

28U90 Prefabrikát pro peroneální ortézu z termoplastu

Kód ZP: 24/400022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

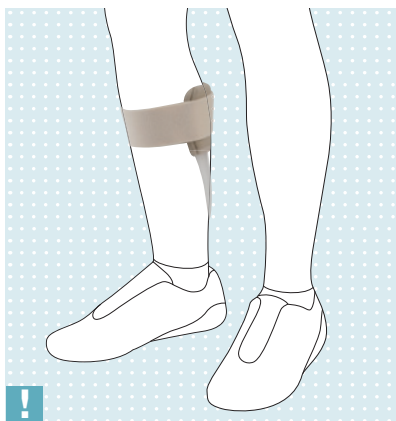

Účinky a vlastnosti

- Pasivní omezení plantární flexe
- Minimální hmotnost
- Dodatečné vyložení pro lýtko a hleň
- Materiál: polypropylen
- Po nahřátí lze přizpůsobit tvar
- K dispozici i v černé barvě
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace

- Lehké padání chodidla
- Peroneální paréza
- Paréza dorzálních flexorů chodidla
- Určeno zejména pro méně aktivní jedince a/nebo pro dočasné použití




35-37	37-39	39-41	41-44	44-47	velikost boty
30	33	34,5	39	41,5	celková výška ortézy v cm

28U11 Prefabrikát pro ortézu WalkOn / 28U23 Trimable

Kód ZP: 24/400022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

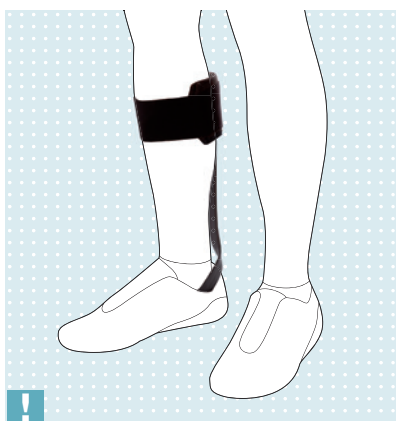

Účinky a vlastnosti

- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Prodloužení délky kroku díky zlepšení dynamiky svalů
- Možnost zátěže přednoží při chůzi do schodů a při podřepu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace

Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou, v důsledku např.:

- Ochrnutí peroneálního nervu
- Cévní mozkové příhody (CMP)
- Traumatického poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulární atrofie



36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
35	36	37	39	celková výška ortézy v cm

28U33 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Lateral / Junior*

Kód ZP: 24/4000143 (děti*)

Kód ZP: 24/400022 (dospělí)

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.




Účinky a vlastnosti

- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Prodloužení délky kroku díky zlepšení dynamiky svalů
- Možnost zátěže přednoží při chůzi do schodů a při podřepu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace

Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou, v důsledku např.:

- Ochrnutí peroneálního nervu
- Cévní mozkové příhody (CMP)
- Traumatického poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulární atrofie

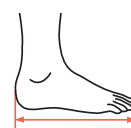


*24-27	*27-30	*30-33	*33-36	36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
*20,5	*24	*27	*29,5	32,5	35	37	39	celková výška ortézy v cm

28U22 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Flex / Junior*

Kód ZP: 24/4000143 (děti*)

Kód ZP: 24/400022 (dospělí)

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

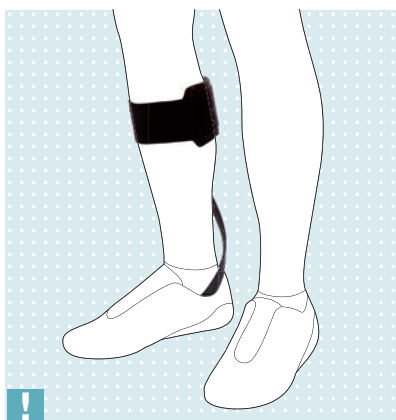

Účinky a vlastnosti

- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Prodloužení délky kroku díky zlepšení dynamiky svalů
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- Během švihové fáze stáčí chodidlo lehce do zevní rotace
- Díly pro levou/pravou stranu

Indikace

Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou, v důsledku např.:

- Ochrnutí peroneálního nervu
- Cévní mozkové příhody (CMP)
- Traumatického poranění mozku
- Roztroušené sklerózy
- Neuromuskulární atrofie




*24-27	*27-30	*30-33	*33-36	36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
*20,5	*24	*27	*29,5	32,5	35	37	39	celková výška ortézy v cm

Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

28U24 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Reaction

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

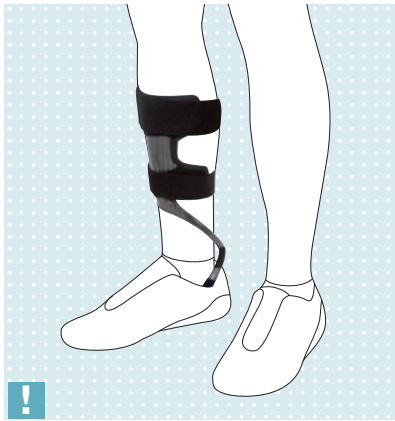

Účinky a vlastnosti

- Dynamické vlastnosti a vysoký návrat energie
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Stabilizace kolenního a hlezenního kloubu využitím reakčních sil od podložky
- Znatelně delší anteriorní objímka umožňuje více redukovat osové odchylky v kolenním a hlezenním kloubu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

- Mírné postižení plantárních flexorů
- Mírné postižení extenzorů kolena
- Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou (např.: ochrnutí peroneálního nervu, cévní mozkové příhody (CMP), traumatického poranění mozku, roztroušené sklerózy, neuromuskulární atrofie, dětská mozková obrna)




36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
33,3	35,5	37,7	40	celková výška ortézy v cm

28U25 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Reaction Junior

Kód ZP: 24/4000143

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

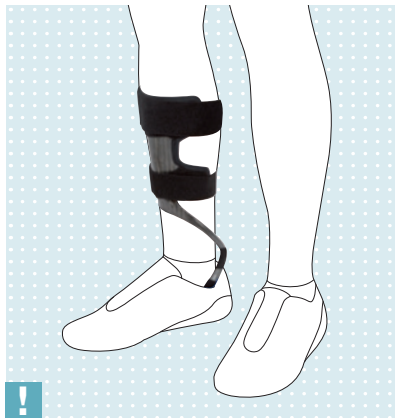

Účinky a vlastnosti

- Podporuje zvedání chodidla
- Podporuje dynamický odval chodidla
- Zvětšuje délku kroku
- Podporuje zevní rotaci chodidla při došlapu paty
- Podporuje fyziologický vzorec chůze
- Snižuje riziko pádů
- Lze kombinovat s vložkou
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

- DMO
- Ochablé dorzální flexory případně provázené lehkou až mírnou spasticitou
- Hemiparéza, diparéza



24-27	27-30	30-33	33-36	velikost boty
20,5	24,5	27	29,4	celková výška ortézy v cm

28U34 Prefabrikát pro ortézu WalkOn Reaction Lateral

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.




Účinky a vlastnosti

- Dynamické vlastnosti a vysoký návrat energie
- Efektivní podpora fyziologické chůze i při různých rychlostech a zatížení
- Stabilizace kolenního a hlezenního kloubu využitím reakčních sil od podložky
- Znatelně delší anteriorní objímka umožňuje více redukovat osové odchylky v kolenním a hlezenním kloubu
- Omezení plantární flexe a supinace při nošení ve stabilní obuvi se správnou vložkou
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

- Mírné postižení plantárních flexorů
- Mírné postižení extenzorů kolena
- Syndrom padající špičky (drop foot), provázený mírnou nebo žádnou spasticitou (např.: ochrnutí peroneálního nervu, cévní mozkové příhody (CMP), traumatického poranění mozku, roztroušené sklerózy, neuromuskulární atrofie, dětská mozková obrna)

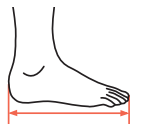

36-39	39-42	42-45	45-48	velikost boty
32,5	35	37	39	celková výška ortézy v cm

28F10 Stavebnice pro patní ortézu

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Odlehčení patní kosti díky podepření podélné klenby a podpoře v lýtkové oblasti
- Časná mobilizace pacienta
- Zkracuje délku léčby
- Podporuje fyziologický odval chodidla
- Dávkované zvyšování zátěže prostřednictvím individuálních odlehčovacích polštářků
- Včetně léčebného plánu na 12 týdnů
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

- Jednostranné nebo oboustranné fraktury patní kosti
- Přízpusobování artrodéze dolního hlezenního kloubu



S	M	L	velikost boty
36-41	42-46	47-50	



8360 Genu Carezza Patella Stabilizer

Kód ZP: 04/5008457
Úhrada ZP: 176,- Kč
Doplatek pacienta: 748,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Udržuje česku ve správné pozici
- Prevence luxace česky
- Podporuje senzomotorickou kontrolu
- Flexibilně stabilizuje česku
- Vyrobení ve tvaru písmene C, které je přizpůsobitelné pomocí dvou oddělených popruhů
- Krátký a pružný, nízký model
- Pohodlná při nošení
- Výborně sedí pod oblečením

- Představuje základní řešení lehcích stavů, nižší stabilizace než 8320

Indikace

- Opakující se luxace česky
- Patelofemorální bolestivý syndrom
- Po operačním laterálním uvolnění
- Chybné patelofemorální postavení

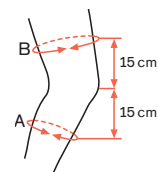

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8320 Patella Pro

Úhrada ZP: 0,- Kč
Doplatek pacienta: 4560,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Dynamická recentralizace česky
- Korekce nežádoucích pohybů česky
- Kontrolovaný tlak na česku, který brání překorigování a naklánění česky
- Bezpečné odlehčení chrupavky
- Součástí balení je cílený pohybový program pro rehabilitaci
- Individuální nastavení
- Lehký a tenký design
- Levá/pravá

Indikace

- Subluxace a dislokace česky
- Bolesti česky
- Chondropatie a/nebo chondromalácie česky
- Po operačním laterálním uvolnění
- Chybné patelofemorální postavení
- Retropatelární artróza

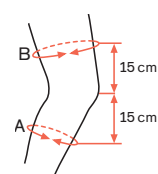

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-52	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-65	cm

50K15 Genu Sensa

Kód ZP: 04/5008453
Úhrada ZP: 585,- Kč
Doplatek pacienta: 760,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Odlehčení a vedení pately
- Aktivace svalové stabilizace
- Přiměřená komprese pro resorpci otoku, hematomu a výpotku
- Otevřená struktura v podkolení
- Bez švů v zadní části, prodyšný materiál
- Integrovaná silikonová pelota pro patelu
- Postranní spirálové dlahy

Indikace

- Pocit instability
- Iritace (pooperační, posttraumatické, chronické)
- Bolest kolena z námahy (tendomyopatie)
- Výpotek kloubu, otok

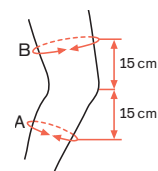

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46	cm
B	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56	cm
V-Max (B)				47-50	50-53	53-56	56-59	cm

8356 a 8353 Genu Direxa

Kód ZP: 04/5008449 (8356)
Úhrada ZP: 1558,- Kč
Doplatek pacienta: 270,- Kč

Kód ZP: 04/5008450 (8353)
Úhrada ZP: 1558,- Kč
Doplatek pacienta: 537,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Stabilizace a odlehčení kolena
- Kovové postranní dlahy
- Zakryté, snímatelné dvouosé klouby v lehkém designu
- Anatomický tvar s měkkým lemováním
- Inovativní materiál, který kombinuje kompresi a prodyšnost
- Dva elastické pásky
- 8353 – celoplošné rozepínací design

Indikace

- Bolest kolena s lehkou volností vazů nebo pocitem instability
- Revmatoidní artritida
- Osteoartritida s mírnou degenerativní instabilitou kolena
- Patelofemorální bolestivý syndrom
- Funkční léčba po poškození ACL a PCL (přední a zadní zkřížený vaz)

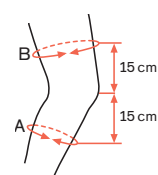

	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8359 a 8368 Genu Direxa Stable

Kód ZP: 04/5008439 (8359)

Kód ZP: 04/5008442 (8368)

Úhrada ZP: 3117,- Kč

Doplatek pacienta: 541,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Silná stabilizace čtyřbodovým principem
- Ochrana proti hyperextenzi kolena
- Vyjímatelé kovové dlahy s dvouosými klouby
- Systém Click-2-Go pro nastavení rozsahu pohybu bez použití nářadí
- Anatomický tvar s měkkým lemováním
- Materiál kombinuje kompresi a prodyšnost
- 8368 – celoplošně rozeprávací design

Indikace

- Bolest s těžkou a/nebo komplexní vazovou instabilitou
- Ochrana v rehabilitační fázi po operaci
- Komplexní degenerativní instabilita
- Poúrazové a pooperační instabilita a volnost vazů
- Funkční léčba po poškození ACL a PCL (přední a zadní zkřížený vaz) a po rekonstrukci vazů a menisku

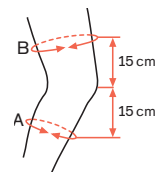


	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51	cm
B	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67	cm

8165 Genu Neurexa

Kód ZP: 04/5015043

Úhrada ZP: 3117,- Kč

Doplatek pacienta: 540,- Kč

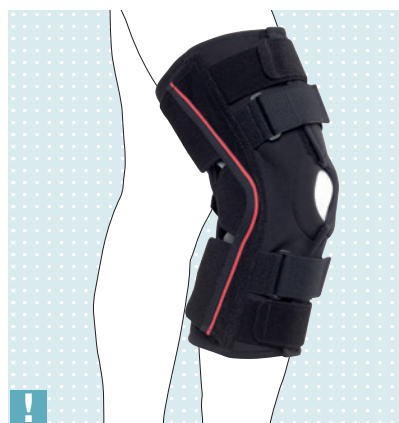

Účinky a vlastnosti

Stabilizace a prevence hyperextenze kolena prostřednictvím:

- Postranních kovových dlah s dvouosým, uzamykatelným kloubem – možnost nastavit rozsah pohybu
- Pevných překřížených popruhů v zákolení
- Komfortního materiálu (PCM)
- Působení na proprioceptory a tím ovlivnění senzomotorického systému


Lepší kontrola při pohybovém tréninku jako je nácvik chůze,

nácvik přesouvání z židle na postel, na toaletu, atp.

Indikace

Hyperextenze kolena, která vznikla na základě parézy svalstva dolní končetiny, jejíž příčinou je např.:

- Cévní mozková příhoda
- Výhřez ploténky v bederní oblasti
- Poškození periferního nervu

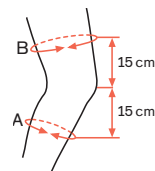


	XS	S	M	L	XL	
	38-42	42-46	46-50	50-54	54-58	15 cm nad středem pately
	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	15 cm pod středem pately

50K13 Stavebnice pro kolenní ortézu Genu Arexa

Kód ZP: 24/4000022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

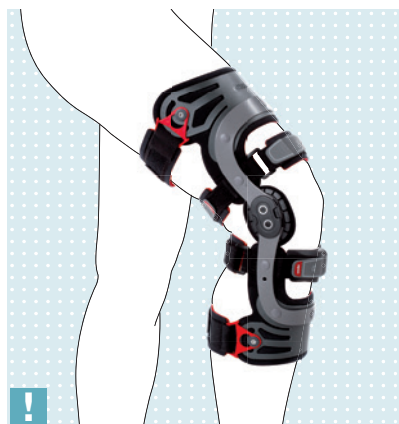


Účinky a vlastnosti

- Stabilizace s omezením předního zásuvkového příznaku
- Pevná stranová stabilizace
- Ochrana proti hyperextenzi
- Systém Click-2-Go pro nastavení rozsahu pohybu bez použití nářadí
- Pelota pro zabránění rotace ortézy
- Peloty na kondylech z TechnoGelu®
- Tenký profil rámu, lehká konstrukce
- Dily pro levou/pravou stranu

Indikace

- Bolest kolena s těžkým a/nebo komplex. uvolněním vazů a/nebo pocitem instability i při degenerativním onemocnění
- Ochrana kolena po operaci ACL a PCL (přední a zadní zkřížený vaz) a/nebo MCL a LCL (postranní vazy kolena)
- Poúraz. a pooperač. instabilita a volnost vazů
- Funkční léčba po poškození ACL a PCL a/nebo MCL a LCL

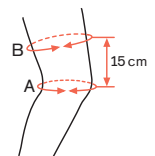

	S	M	L	XL	XXL	
A	32-37	37-41	41-46	46-50	50-56	cm
B	39-46	46-53	53-61	61-69	69-79	cm

50K4=3 Stavebnice pro AFO Agilium Freestep 3.0

Kód ZP: 24/400022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Vytváří varózní nebo valgózní moment kolenního kloubu, a tím odlehčuje postiženou oblast
- Snižuje síly působící v kolenním kloubu díky limitaci everze hlezenního kloubu
- Zlehčuje pohyb
- Ulevuje od bolesti
- **Díly pro levou/pravou stranu a mediální/laterální osteoartrózu**

Indikace

- Osteoartrida kolenního kloubu (mediální/laterální)




XS	S	M	L	XL	
53-62	63-72	73-82	83-92	93-103	výška kloubu (mm)

50K324 Stavebnice pro kolenní ortézu Agilium Reactive

Kód ZP: 24/400022

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

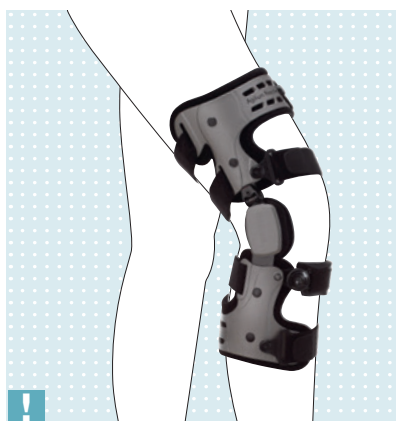


Účinky a vlastnosti

- Odlehčení vnitřního nebo zevního prostoru kolena
- Redukce varózních/valgózních momentů sil v kolenním kloubu
- Zvýšení pohyblivosti
- Redukce bolesti
- **Díly pro levou/pravou stranu a mediální/laterální osteoartrózu**

Indikace

- Osteoartróza kolenního kloubu (mediální/laterální)

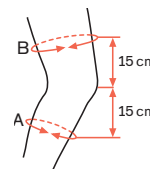

A	30-60	cm
B	39-80	cm

8060 Kolenní imobilizační ortéza

Úhrada ZP: 0,- Kč

Doplatek pacienta: 1157,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Imobilizace kolenního kloubu v 0°
- Postranní stabilizace kolena
- Individuálně přizpůsobitelné
- Mediální a laterální část má dlahy, které mohou být variabilně přiloženy
- Komfortní, na kůži příjemný materiál
- Snadná aplikace a snímání ortézy i pro ležící pacienty

Indikace

- Pooperační a poúrazová imobilizace kolenního kloubu

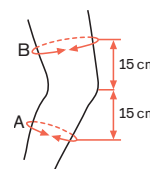


S	M	L	XL	
40	50	60	70	délka
35-55	40-60	42-62	45-65	A cm
42-62	48-68	52-72	55-75	B cm

8066 Kolenní imobilizační ortézy

Kód ZP: 04/5008447 (8066)

Úhrada ZP: 3117,- Kč

Doplatek pacienta: 687,- Kč

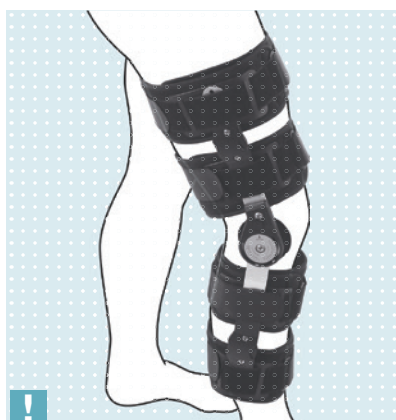


Účinky a vlastnosti

- Postranní stabilizace kolena
- Univerzální velikost
- Individuálně nastavitelné
- Možnost nastavení úhlu flexe a extenze po 10°, čímž umožňuje postupnou mobilizaci
- Komfortní nošení
- Nízká hmotnost
- Textilní části lze samostatně vyprat
- Minimální pokrytí textilií, teleskopické dlahy (8066)

Indikace

- Pooperační a poúrazová imobilizace nebo omezení pohybu v kolenním kloubu, např. po úrazech vazů, operaci vazů nebo luxaci pately

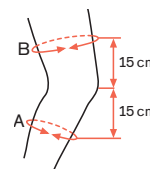


univerzální velikost	8066 délka 55-64	A max. 52	B max. 70
----------------------	------------------	-----------	-----------



28L10 Stavebnice pro Tübingenskou kyčelní ortézu

Kód ZP: 24/4000143

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

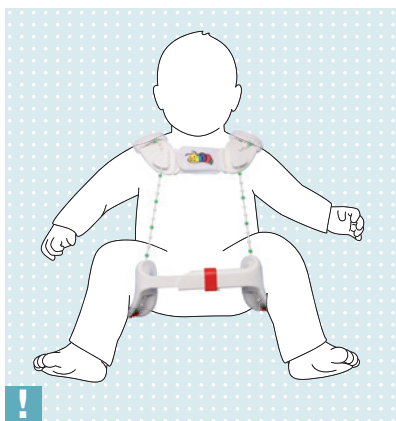

Účinky a vlastnosti

- Založeno na osvědčeném principu sed–dřep s flexí v kyčli více než 90° a mírnou abdukcí
- Stehenní podpěry jsou spojeny s ramenními popruhy prostřednictvím korálkových šňůrek
- Korálkové šňůrky umožňují opakované nastavení flexe v kyčli
- Abdukční úhel nastavitelný pomocí rozpěry
- Ramenní popruhy jsou pokryty froté tkaninou
- Snadná aplikace jednoduchými uzávěry

Indikace

- Léčba kyčelní dysplazie u kojenců (typ IIa a IIb podle Grafa)
- Nestabilní nebo decentralizované kyčle (IIc a IIId), pokud je prováděn pravidelný monitoring zkušeným ortopedem

S	M	L	
1	2-5	6-12	věk v měsících

28L8 Stavebnice pro Lörrašskou kyčelní ortézu

Kód ZP: 24/4000143

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Založeno na osvědčeném principu sed–dřep s flexí v kyčli

Indikace

- Kyčelní dysplazie do stupně IIIa podle Grafa

3	2	1	0	
18	22	26	30	obvod stehna v cm

28L101/28L100 Prefabrikát pro ortézu Cosa Active/Junior

Kód ZP: 24/4000143 (děti)
Kód ZP: 24/4000022 (dospělí)

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Zlepšuje pohyb díky redukcí nůžkovité chůze (větší volnost kolen, zlepšení vzoru chůze)
- Zlepšení kontroly trupu
- Zlepšení stability sedu a stoje
- Vhodné kombinovat s dalším ortotickým vybavením
- Pro denní i noční nošení
- Možnost přizpůsobení
- Komfortní nošení díky použitému materiálu

Indikace

- Diplegie
- Dysplazie kyčlí
- Subluxace kyčlí (vrozená)
- Hypotonus
- Tetraplegie (spastická)

Velikostní tabulka

Velikost	Cosa Junior 28L100=*				Cosa Active 28L101=*					
	80	92	104	116	128	140	152	S	M	L
Konfekční velikost	80	92	104	116	128	140	152	164 ženy 34, 36, 38 muži 42, 44, 46	ženy 40, 42 muži 48, 50	ženy 44, 46 muži 52, 54
Tělesná výška (cm)	74 – 86	86 – 98	98 – 110	110 – 122	122 – 134	134 – 146	146 – 158	158 – 170	nad 170	
Obvod přes kyčle (cm)	57 – 59	59 – 62	62 – 64	64 – 68	68 – 72	72 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 105	105 – 109
Velikost pelot	1		2		3			4		5
Obvod stehna (cm)	26 – 32		32 – 36		36 – 44			44 – 54		54 – 62



► Bez Cosa Active



► S Cosa Active

! Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

50R10 a 50R11 Lumbo Sensa

Kód ZP: 04/5008368
Úhrada ZP: 682,- Kč
Doplatek pacienta: 1351,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Podpora senzomotorických funkcí vedoucí k aktivaci svalové stabilizace
- Odlehčení bederní páteře
- Rovný střih (50R10)
- Vypasovaný dámský střih (50R11)
- Trojrozměrná prodyšná pletenina
- Okraje s nízkou kompresí
- Integrované korzetové dlahy
- Prodyšná, proprioceptivní pelota

Indikace


- Bolest a svalová nerovnováha v bederní oblasti zad
- Degenerativní změny v oblasti bederní páteře (osteochondróza, spondylartróza, fasetový syndrom)
- Irritace v oblasti iliosakrálního skloubení
- Bolest při osteoporóze

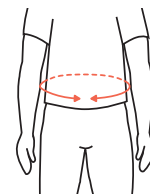

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R40 Ortéza zad Lumbo Carezza

Kód ZP: 04/5010848
Úhrada ZP: 682,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

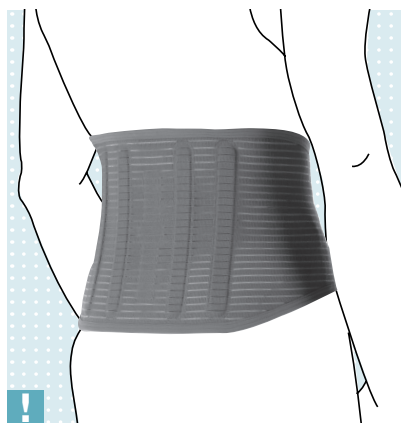


Účinky a vlastnosti

- Zajišťuje podporu bederní páteře
- Odlehčuje bederní páteř
- Aktivuje svalovou stabilizaci bederní páteře
- Zmírňuje bolest bederní páteře

Indikace

- Lumbalgie
- Lumboischialgie
- Lehké stavy podráždění iliosakrálního kloubu
- Syndrom bederní páteře
- Ligamentózy bederní páteře
- Myostatická insuficience/svalová dysbalance v oblasti bederní páteře
- Lehké až mírné degenerativní změny v oblasti bederní páteře (např. osteochondróza, fasetový syndrom)

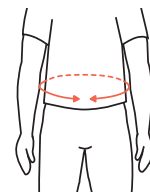

XS	S	M	L	XL	XXL	
70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130	cm

50R30 Stavebnice pro ortézu zad Lumbo TriStep

Kód ZP: 24/4000007

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.




Účinky a vlastnosti

- Tři stupně pevnosti ortézy v jedné pomůcce
- Postupné snižování zajišťovací funkce snímáním stabilizačních prvků ortézy
- Přidání a ubrání stabilizačních elementů bez použití nástrojů
- Snadné uchopení a nasazení ortézy pomocí kapes v přední části
- Křížová pelota zlepšuje prokrvení a podporuje funkci svalstva

Indikace

- Fasetový syndrom
- Degenerativní nestabilita bederní páteře
- Spondylolýza, spondylolistéza
- Lumbální stenóza míšního kanálu
- Stenóza meziobratlového prostoru v bederní oblasti
- Pooperační vybavení pro snížení lordózy např. po operaci meziobratlových plotének
- Pooperační vybavení pro stabilizaci

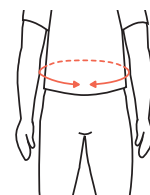


S	M	L	
65-80	80-100	100-125	cm

50R20 Stavebnice pro ortézu zad Dorso Osteo Care

Kód ZP: 24/4000007

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

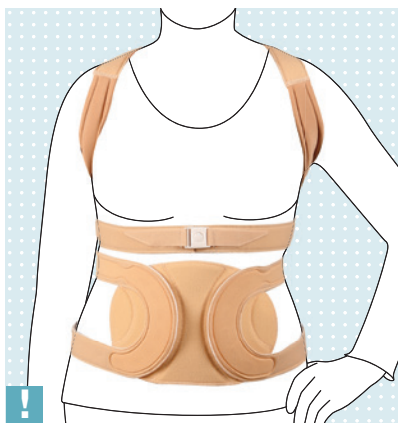


Účinky a vlastnosti

- Podporuje vzpřímené držení trupu prostřednictvím ramenních a břišních popruhů
- Efektu je dosaženo nastavitelnými popruhy a tvarovatelným zádočným plátem
- Hrudní a břišní dýchání není omezeno
- Prodyšný materiál SpaceTex® na zádech, v podpaží a na břicho
- Textilní část lze sejmout a vyprat
- Nízká hmotnost
- Pod oblečením téměř není vidět

Indikace

- Osteoporózní změny v hrudní a bederní oblasti
- Následná léčba osteoporotických fraktur obratlů
- Ve fázi osteoporózy, kdy lze zvyšovat svalovou aktivitu

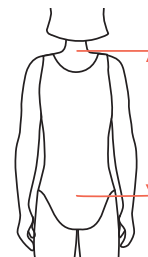


S	M	cm
39-41,5	42-44,5	

28R140 Stavebnice pro ortézu zad Dorso Arexa

Kód ZP: 24/4000007

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

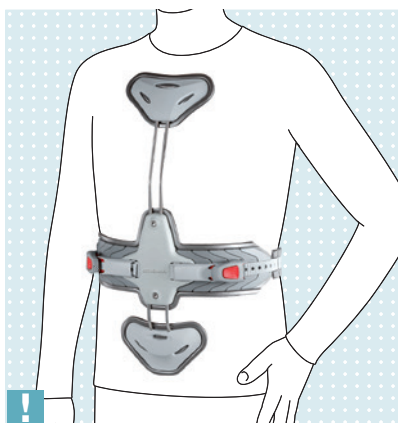


Účinky a vlastnosti

- Tříbodový princip (bedra–sternum–symfýza) podporuje napřímění páteře v Th-L přechodu a k odlehčení ventrální části obratlových těl
- Pouze jedna velikost s možností použití do obvodu pasu 150 cm
- Plynulé nastavení výšky
- Individuální přizpůsobení obvodu pasu díky extenčním elementům „click-lock“
- Voděodolná

Indikace

- Stabilní kompresivní fraktury obratlů v oblasti dolní hrudní až horní bederní páteře bez neurologického postižení (Th10-L2)
- Osteoporotické kompresivní fraktury

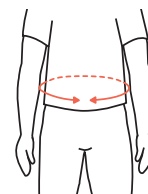

univerzální velikost do 150 cm

Páteř

50R300 Stavebnice pro dynamickou ortézu zad Dyneva

Kód ZP: 24/4000007

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Účinky a vlastnosti




- Zaměřuje se na podporu fyzické aktivity a udržení normálního životního stylu
- Snižuje zatížení přetěžovaných segmentů a kloubů páteře
- Pomocí tříbodového principu a pružinového mechanismu se trvale a staticky významně snižuje svalová síla a bolest v oblasti bederní páteře
- Výsledkem je napřímení celé páteře, což uvolňuje přetížené části páteřního kanálu
- Umožňuje chůzi s fyziologickým vzorem na delší vzdálenost
- Lze přizpůsobit tvaru těla
- Ortézu lze nastavovat vertikálně i horizontálně
- Ortézu je vhodné nosit během aktivního pohybu, který se u pacientů velmi rychle obnovuje

Indikace

Ortéza je určena výhradně k ortotickému vybavení zad a výhradně pro styk s neporušenou pokožkou. Indikaci musí stanovit lékař.

Při bolestivém syndromu bederní páteře v důsledku následujících stavů:

- Lumbální spinální stenóza
- Lumbální fasetový syndrom
- Kořenové syndromy v oblasti bederní páteře (lumbosakralgie, lumboischialgie)
- Nestabilita bederní páteře (spondylolistéza, spondylolýza)
- Lumbální spondyloartróza
- Protruze a prolaps meziobratlové ploténky v oblasti bederní páteře
- Všeobecné degenerativní stavy provázené sníženou výškou meziobratlové ploténky

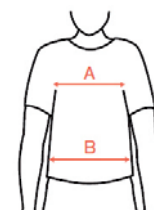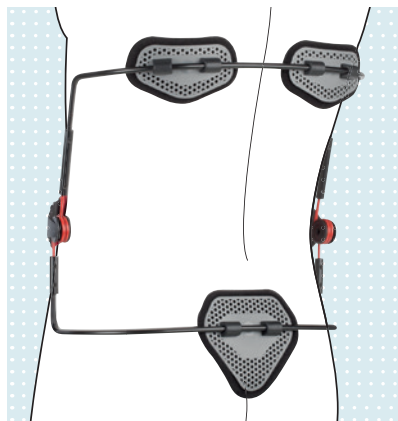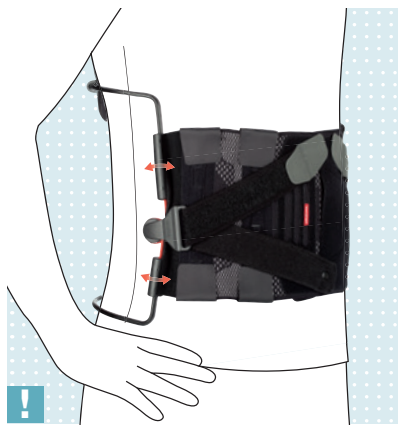


	XS	S	M	L	XL	XXL	
A	27 cm	30 cm	33 cm	36 cm	39 cm	42 cm	cm
B	30 cm	33 cm	36 cm	39 cm	42 cm	45 cm	cm





50C30 Krční límec

Kód ZP: 04/5008359
Úhrada ZP: 332,- Kč
Doplatek pacienta: 186,- Kč

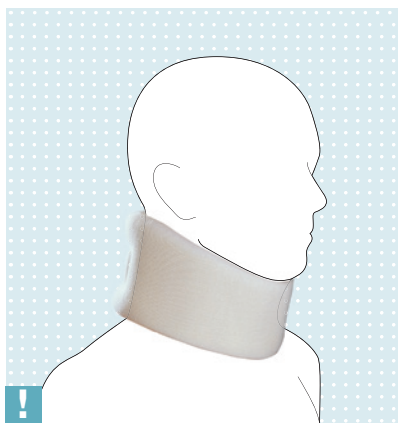


Účinky a vlastnosti

- Zahřívací účinky
- Podpůrná funkce
- Omezuje pohyb
- Integrované, pružné plastické vyztužení
- Prodyšné pěnové jádro pro udržení tvaru
- Vpředu snížená výška pro bradu a hrtan
- Obvod kolem krku lze nastavit (37–50 cm)
- Komfortní nošení
- Omyvatelný

Indikace

- Degenerativní změny krční páteře
- Namožení šíjových svalů
- Cervikální syndrom
- Poranění „whiplash“
- Revmatické potíže
- Hypermobilita

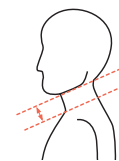

8 10 12 cm

50C91 Krční límec Smartspine Universal Collar

Úhrada ZP: 0,- Kč
Doplatek pacienta: 1018,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Imobilizace krční páteře
- Kontrola nežádoucích pohybů do flexe, extenze a rotace
- Podpora napřimění páteře

Indikace

- Syndrom akutní bolesti krční páteře
- Stenóza krční páteře
- Poranění „whiplash“
- Fraktury krčních obratlů (jednoduché a stabilní)
- Luxace a luxační fraktury krční páteře (pooperační)
- Traumatické poranění krční páteře
- Radikulopatie krční páteře

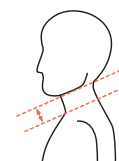

velikost univerzální



7126 Ramenní ortéza

Kód ZP: 04/5008415
Úhrada ZP: 487,- Kč
Doplatek pacienta: 575,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Prohřátí a snížení bolesti
- Zvýšení proprioceptivního uvědomování
- Zvýšení prokrvení – prevence a urychlení hojení
- **Unilaterální**

Indikace

- Přetížení
- Tendomyopatie ramene
- Akutní a chronická bolest ramena
- Degenerace rotátorové manžety
- Přetížení ramenního svalstva



XS	S	M	L	XL	
24-28	28-32	32-35	35-38	38-42	cm

5055 Ramenní ortéza

Kód ZP: 04/5008414
Úhrada ZP: 487,- Kč
Doplatek pacienta: 1106,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Stabilizace a omezení nežádoucích pohybů
- Anatomicky tvarovaná
- Vyrobeno z materiálu PCM, který má vlastnosti tepelné regulace
- Systém popruhů pro nastavení stability
- Silikonová vložka proti nežádoucím pohybům ortézy
- **Unilaterální**

Indikace

- Hypermobilita, lehká instabilita
- Akutní a chronická bolest ramena
- Degenerace rotátorové manžety
- Přetížení ramenního svalstva
- Pooperační ramenní podpora (artroskopie)



XS	S	M	L	XL	
24-28	28-32	32-35	35-38	38-42	cm

50A8 Omo Immobil Sling

Kód ZP: 04/5008411
Úhrada ZP: 526,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Fixace paže k tělu
- Imobilizace ramenního kloubu s vnitřní rotací
- Jednoduché zapínání
- Všechny látky jsou prodyšné, měkké a pokožce příjemné – lepší komfort
- Snadné čištění
- Nízká hmotnost
- Ramenní a zápěstní pásy mohou být individuálně zkráceny
- Polohovatelné oko pro palec pro pohodlné umístění ruky/předloktí
- **Unilaterální**

Indikace

Všechny indikace vyžadující imobilizaci ramenního kloubu ve vnitřní rotaci, např.:


- Pooperační a poúrazová imobilizace
- Podráždění v oblasti ramenního pletence
- Poranění měkkých tkání
- Zmrzlé rameno
- Omartróza

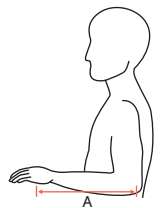

	S	M	L	
A	29-34	35-37	38-41	cm

50A9 Omo Immobil Sling, Abduction

Kód ZP: 04/5008413
Úhrada ZP: 560,- Kč
Doplatek pacienta: 610,- Kč

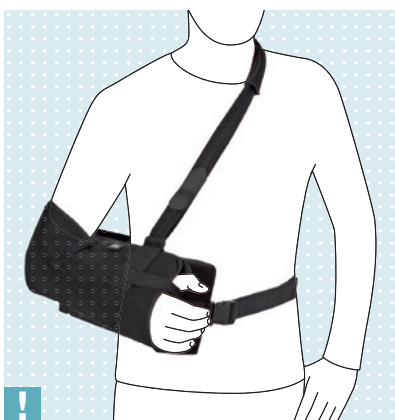


Účinky a vlastnosti

- Imobilizace a odlehčení ramenního kloubu v 15° abdukci
- Komfortní polštář v oblasti pasu pro polohování v 15° abdukci
- Jednoduché zapínání
- Všechny látky jsou prodyšné, měkké a pokožce příjemné – lepší komfort
- Snadné čištění
- Nízká hmotnost
- Ramenní a zápěstní pásy mohou být individuálně zkráceny
- Polohovatelné oko pro palec pro pohodlné umístění ruky/předloktí
- **Unilaterální**

Indikace

Všechny indikace vyžadující imobilizaci ramenního kloubu v 15° abdukci, např.:

- Pooperační a poúrazová imobilizace a odlehčení ramenního kloubu (např. po plastice rotátorové manžety)
- Imobilizace po posteriorní luxaci ramena
- Následná léčba poranění bicepsu a jeho šlachy
- Instabilita ramena

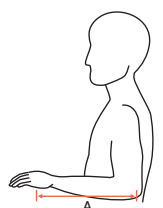


	S	M	L	
A	29-34	35-37	38-41	cm

50A10 Omo Immobil

Kód ZP: 04/5008408

Úhrada ZP: 3881,- Kč

Doplatek pacienta: 0,- Kč

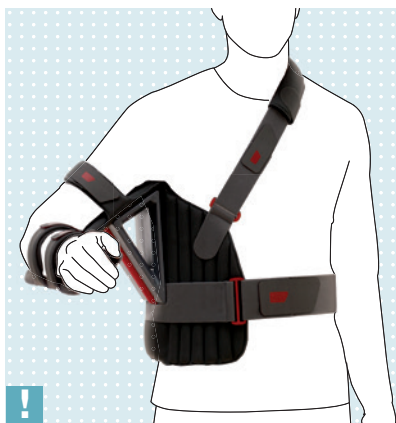

Účinky a vlastnosti

- Funkční polohování ramene v abdukci 0°, 15°, 30°, 60°, nebo 90°
- Odlehčení ramenního kloubu a podpora rehabilitačního procesu
- Individuální přizpůsobení
- Abdukční klín pro nastavení úhlu abdukce se připevňuje suchým zipem
- Prodyšné a pratelné vyložení
- Snadné použití a nastavení bez nářadí
- Atraktivní, nízkoprofilové provedení
- **Unilaterální**

Indikace

Pooperační a poúrazové stavy vyžadující abdukční postavení, např.:

- Operace rotátorové manžety
- Subkapitální fraktury humeru
- Impingement syndrom
- Pooperační stabilizace ramena




S	M	L	
150-165	165-175	nad 175	cm

5065 Stavebnice pro Omo Neurexa^{plus}

Kód ZP: 24/4000013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

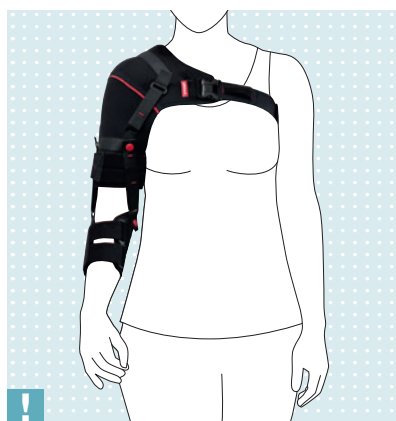

Účinky a vlastnosti

- Zabraňuje dislokaci hlavičky humeru kaudálním směrem, nadlehčuje paži
- Stabilizace paže v natažené pozici
- Prevence bolesti ramene
- Uspodňuje rehabilitaci
- Důležitá pomůcka pro návlek správného stereotypu chůze po CMP
- Termoregulační materiál
- Individuální možnosti nastavení
- **Díly pro levou/pravou stranu**

Indikace

Neurologicky podmíněné bolesti a dysfunkce ramena včetně subluxace, např. z důvodu:

- Mozková mrtvice, hemiplegie
- Poranění ramenního pletence
- Poranění periferního nervového systému



XXS	XS	S	M	L	XL	
71-78	79-86	87-94	95-102	103-110	111-118	cm

50A3 Epi Forsa Plus



Účinky a vlastnosti


- Cílený a kontrolovaný tlak na úponové šlachy svalů předloktí
- Snižuje zatížení úponu šlachy
- Pelota zajišťující zacílení tlaku
- Možnost aplikace na obě ruce
- Zapínání na suchý zip
- Pružný pásek umožňující postupnou regulaci tlaku

Indikace

- Epicondylitis humeri radialis (tenisový loket)
- Epicondylitis humeri ulnaris (golfový loket)

univerzální velikost

50A7 Epi Sensa

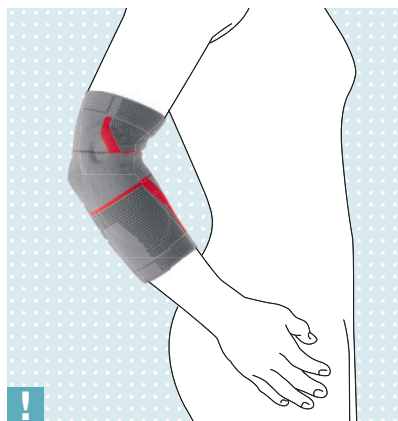


Účinky a vlastnosti

- Zajišťuje kompresi v oblasti lokte pro resorpci otoků, hematomů a výpotků
- Snížení bolesti a zlepšení svalové stabilizace
- Integrované peloty zvyšují mikromasážní efekt měkkých tkání kolem kloubu
- Komfortní nošení díky minimálnímu vrásnění bandáže v oblasti loketní jamky
- Integrované, anatomicky tvarované peloty v mediální a laterální oblasti

Indikace

- Laterální/mediální epikondylitida (tenisový/golfový loket)
- Podráždění (pooperační, poúrazové nebo chronické)
- Kloubní otok (např. osteoartritida)
- Tendomyopatie a jiné postižení měkkých tkání (např. chronická bursitida) a úrazy

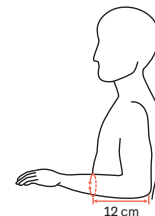

XS	S	M	L	XL	XXL	
17-19	19-21	21-23	23-25,5	25,5-28	28-31	cm





50P70 Ortéza zápěstí Manu Carezza

Kód ZP: 04/5008396
Úhrada ZP: 292,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Stabilizuje zápěstí
- Zmírňuje bolest
- Nechává volnou dlaň
- Univerzální velikost
- **Unilaterální**

Indikace


- Nestabilní zápěstí
- Pseudoartróza člunkové kosti
- Lehké stavy podráždění a nestability



univerzální velikost (14-22 cm)

50P10 Manu Immobil

Kód ZP: 04/5008379
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 999,- Kč

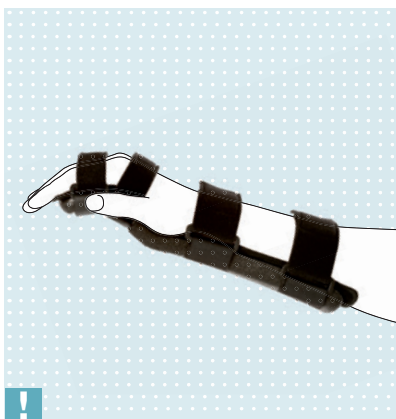

Účinky a vlastnosti

- Imobilizace zápěstí a ruky ve funkčním postavení
- Velmi nízká hmotnost
- Pratelné vyložení a popruhy
- Univerzální velikost
- Prodyšný materiál SpaceTex® pro komfortní nošení
- 50P11 prodloužená verze
- **Unilaterální**

Indikace

- Po frakturách a luxacích
- Po operaci karpů, metakarpů a zápěstí
- V případech akutního podráždění
- Artrózy zápěstí
- Těžké distorze
- Pooperační a posttraumatická imobilizace

univerzální velikost

50P11 Manu Immobil Long

Kód ZP: 04/5008386
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 1453,- Kč




Účinky a vlastnosti

- Imobilizace zápěstí a ruky ve funkčním postavení
- Velmi nízká hmotnost
- Pratelné vyložení a popruhy
- Univerzální velikost
- Prodyšný materiál SpaceTex® pro komfortní nošení
- **Unilaterální**

Indikace

- Po frakturách a luxacích
- Po operaci karpů, metakarpů a zápěstí
- V případech akutního podráždění
- Artrózy zápěstí
- Těžké distorze
- Pooperační a posttraumatická imobilizace

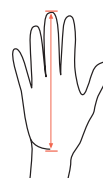

M	L	cm
do 18	nad 18	

50P13 Manu Sensa

Kód ZP: 04/5008391
Úhrada ZP: 292,- Kč
Doplatek pacienta: 877,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Komprese zápěstí a aktivace svalové stabilizace
- Snížení bolesti
- Omezení pohybu palmárním směrem
- Integrované peloty na radiální straně
- Snížený tlak v oblasti lemu
- Individuálně přizpůsobitelná plastová dlaha
- Flexibilní pásek pro přídavnou stabilizaci
- **Levá/pravá**

Indikace


- Akutní a chronické podráždění (např. tendovaginitida, tendomyopatie, menší kloubní efúze a bolesti kloubů)
- Pooperační a poúrazové podráždění
- Distorze zápěstí
- Revmatoidní artritida
- Syndrom karpálního tunelu
- Degenerativní problémy zápěstí
- Pocity instability



XS	S	M	L	XL	XXL	cm
14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	

50P20 Ortéza zápěstí Manu Arexa

Kód ZP: 04/5010851
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

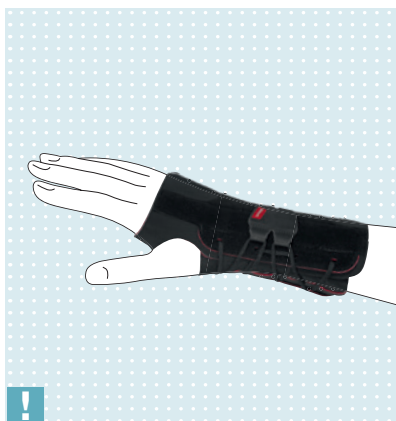

Účinky a vlastnosti

- Stabilizuje zápěstí
- Volný pohyb palce
- Anatomicky předtvarovaná kovová dlaho pro volární podporu
- Elastický pásek pro snadnou aplikaci a upravení
- **Unilaterální**

Indikace

- Distorze zápěstí nebo sedlového kloubu
- Revmatoidní artritida
- Ochabnutí dorzálních flexorů zápěstí a ruky při paréze nebo paralýze nervi radialis
- Tendopatie zápěstí
- Poranění vazů, natažení vazů zápěstí
- Nestabilní zápěstí
- Impingement syndrom
- Syndrom karpálního tunelu



S	M	L	
14-16	16-19	19-22	cm

50P21 Ortéza zápěstí a palce Manu Arexa Pollex

Kód ZP: 04/5010850
Úhrada ZP: 340,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč



Účinky a vlastnosti

- Stabilizuje zápěstí
- Anatomicky předtvarovaná kovová dlaho pro volární podporu
- Podpora je zajištěna v oblasti zápěstí i palce
- Elastický pásek pro snadnou aplikaci a upravení
- Vyrobeno z komfortního materiálu
- **Unilaterální**

Indikace


- Distorze zápěstí nebo sedlového kloubu
- Revmatoidní artritida
- Ochabnutí dorzálních flexorů zápěstí a ruky při paréze nebo paralýze nervi radialis
- Zlomeniny distálního předloktí nebo zápěstních kůstek
- Ruptura vazů (částečná ruptura)
- Částečná artrodéza
- Předoperační/pooperační/ posttraumatické stavy, které vyžadují imobilizaci zápěstí



S	M	L	
14-16	16-19	19-22	cm

50P22 Ortéza palcová Rhizo Arexa

Kód ZP: 04/5010849
Úhrada ZP: 292,- Kč
Doplatek pacienta: 0,- Kč

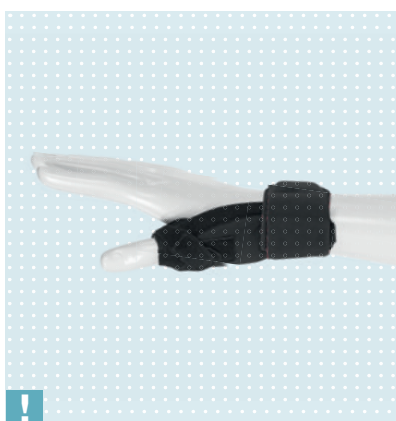

Účinky a vlastnosti

- Ortéza stabilizuje sedlový a MCP kloub palce
- Tenká a lehká konstrukce
- Měkký, pro pokožku příjemný materiál
- Zapínání suchým zipem
- **Unilaterální**

Indikace

- Tendinopatie
- Poranění vazů, natažení vazů palce
- Ruptura vazů (částečná ruptura)
- Distorze sedlového kloubu palce nebo MCP kloubu palce
- Subluxace/luxace
- Nestabilita sedlového kloubu palce a MCP kloubu palce
- Ochmrnutí svalů palce (m. opponens pollicis)



S	M	
14-18	18-22	cm

28P30 Stavebnice pro ortézu Manu Neurexa^{plus}

Kód ZP: 24/400013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.



Účinky a vlastnosti

- Polohování zápěstí v nastavitelném úhlu (palmární/dorzální flexe)
- Zlepšení pohybu
- Prsty jsou umístěny ve fyziologickém postavení díky nastavitelné dlaži
- Lze použít jako noční polohovací dlahu
- Pomůcka je vhodná při nácvičku chůze po CMP

Indikace

Je konstruována pro pacienty, kteří potřebují větší podporu a kontrolu paretické ruky jako např.:


- Po cévní mozkové příhodě
- Při roztroušené skleróze s tetraplegickým postižením
- U spasticity zápěstí, ruky a prstů, která odpovídá stupni 1+ dle Modifikované Ashworthovy škály spasticity

univerzální velikost

28P31 Stavebnice pro polohovací dlahu ruky a zápěstí

Kód ZP: 24/400013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

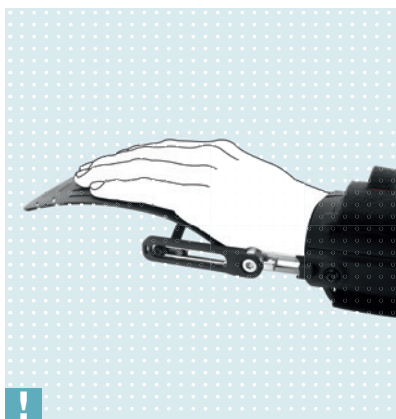

Účinky a vlastnosti

- Volně pohyblivé spojení se zápěstím
- Univerzální stranové použití
- Dlaňová opěra délkově nastavitelná
- Třímen dlaňové ortézy lze použít při nočním polohování prstů
- Úprava délky a šířky
- Obsahuje systém pro spojení s Manu Neurexa^{plus} 28P30

Indikace

Pro pacienty, kteří potřebují podporu a kontrolu paretické ruky např.:

- Po cévní mozkové příhodě
- Při roztroušené skleróze s tetraplegickým postižením
- U spasticity zápěstí, ruky a prstů, která odpovídá stupni 1+ dle Modifikované Ashworthovy škály spasticity

univerzální velikost

Ortýza pro rameno–loket–zápěstí–ruku (SEWHO)

Kód ZP: 24/4000013

Pro zajištění správné funkce pomůcky je nutné individuální nastavení ortotikem-protetikem.

Omo Neurexa^{plus} 5065N +
Manu Neurexa^{plus} 28P30 +
Polohovací dlahy ruky a zápěstí 28P31

Účinky a vlastnosti

- Kombinace těchto ortéz nabízí řešení při postižení horní končetiny
- Spojení ortéz (rameno–loket–zápěstí–ruka) mírní spastické držení horní končetiny
- Lepší postavení horní končetiny nebrání rehabilitaci a nácvičku běžných denních činností
- Ortézu Manu Neurexa^{plus} lze připevnit k ortéze Omo Neurexa^{plus} namísto spodní měkké manžety
- Snadné připojení systémem druků
- Ortézu lze nasadit a sejmout jednou rukou
- Pevný rám ortézy napomáhá zevně rotačnímu postavení v ramenním kloubu
- Díky anatomické struktuře a provázanosti pohybů z ruky na zápěstí a loket je nastavení zevní rotace silnější
- Efektivnější nastavení horní končetiny může ovlivňovat spasticitu
- Použití polohovací dlahy pro ruku a zápěstí napomáhá fyziologickému postavení


Indikace

Neurologicky podmíněné bolesti a dysfunkce ramene a paže jako např.:

- Hemiparézy/hemiplegie
- Poranění plexus brachialis
- Poranění periferních nervů
- Subluxace ramene při neurologických onemocněních

Pro pacienty, kteří potřebují větší podporu a kontrolu paretické ruky např.:

- Po cévní mozkové příhodě
- Při roztroušené skleróze s tetraplegickým postižením
- U spasticity zápěstí, ruky a prstů, která odpovídá stupni 1+ dle Modifikované Ashwothovy škály spasticity

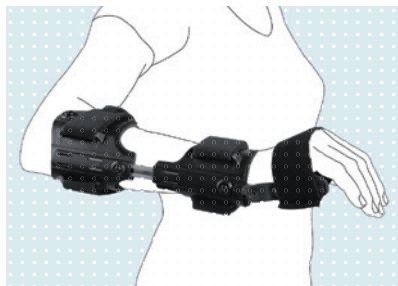

Omo Neurexaplus 5065N

XXS	XS	S	M	L	XL	
71-78	79-86	87-94	96-102	103-110	111-118	cm

Manu Neurexaplus 28P30

univerzální velikost

Polohovací dlahy ruky a zápěstí 28P31

univerzální velikost



Zápěstí

Dostupnost individuálních ortéz v ČR (skupina 24)



Protetika Plzeň s.r.o.

Bolevecká 38, Plzeň
T: +420 377 529 060-1
info@protetika-plzen.cz
www.protetika-plzen.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Hana Fráňová
M: +420 601 387 956



Protetika Plzeň s.r.o.

pobočka Karlovy Vary
Sokolovská 41, Karlovy Vary

Kontakt na ortotika–protetika:
Martin Můčka
M: +420 725 534 925



ORTOTIKA-PROTETIKA s.r.o.

Sociální péče 3316/12A
Ústí nad Labem

T: +420 477 114 466
info@ortotika-protetika.cz
www.ortotika-protetika.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

David Modlík
M: +420 602 256 053



Ortopedická protetika s.r.o.

Tř. gen. Svobody 24, Liberec
T: +420 485 106 644
M: +420 603 505 494
info@ortoprotetiliberec.cz
www.ortoprotetiliberec.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Martin Holub
M: +420 603 505 494



ORTOPEDICKÁ PROTETIKA PRAHA s.r.o.

Kloknerova 1, Praha 4

T: +420 272 932 241 linka 131
M: +420 733 116 622
ortopedickaprotetika.praha@seznam.cz
www.protetikapraha.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Libor Dolejš
M: +420 604 829 533



Protetika s.r.o.

Papírenská 1, Praha 6

T: +420 234 123 222
protetika.sro@volny.cz
www.protetikasro.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Jaroslav Pavlů
M: +420 602 233 674
PaedDr. Zdeněk Šolc
M: +420 603 247 676



ORTOTIKA s.r.o.

V Úvalu 84
Praha 5 (pavilon „N“, areál FN Motol)

M: +420 606 061 902
info@ortotika.cz
www.ortotika.cz

Kontakt na asistentku recepcce:

Lucie Veverková
M: +420 606 061 902



Protetika Beroun
Areál nemocnice Beroun
Prof. Veselého 493 (pavilon „D“)
Beroun

T: +420 311 745 258
info@protetikaberoun.cz
www.protetikaberoun.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Ing. Ludmila Svatoň
M: +420 737 825 574



Ortopedická protetika
Hamzova odborná léčebna
Košumberk 80, Lužé

M: +420 733 184 241
protetika@hamzova-lecebna.cz
www.hamzova-lecebna.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Ing. Michaela Večeřová
T: +420 469 648 814



ERGONA Opava s.r.o.

Krnovská 2539/3, Opava

T: +420 553 622 442
info@protetika-ergona.cz
www.protetika-ergona.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Ing. et Bc. Monika Drobná
M: +420 731 764 157
M: +420 773 553 593



ERGONA Opava s.r.o.
pobočka Brno
Hybešova 726/42, Brno

T: +420 543 242 842
brno@protetika-ergona.cz
www.protetika-ergona.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Ing. et Bc. Monika Drobná
M: +420 731 764 157
M: +420 773 515 535



PROTEOR CZ s. r. o.
U Parku 2, Ostrava

T: +420 596 139 259
ostrava@proteorc.cz
www.proteor.cz

Kontakt na vedoucího výrobního úseku:

Soňa Boščíková
M: +420 731 505 851



A-ORTO s.r.o.

Ševcovská 5487, Zlín

T: +420 577 011 866
aorto@aorto.cz
www.aorto.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Radek Snášil
M: +420 604 669 263



Protetické centrum s.r.o.

Huštěnovská 164
Staré Město u Uherského H.

M: +420 603 259 302
miklica@protetickecentrum.cz
www.protetickecentrum.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Aleš Miklica
M: +420 603 259 302



Ortea, spol. s r.o.

Vranovská 13
Brno, Zábřovice

T: +420 545 240 787
orteas@seznam.cz
www.orteas.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Petra Pivoňková
M: +420 603 213 969

**Ortotechnika a.s.**

Jana Zajíce 12, Praha 7

T: +420 233 372 187
hejljova@protetika.cz
www.protetika.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Miroslav Bina
M: +420 731 026 542**PROTETIKA-MEDICA**

Masná 19, Praha 1

T: +420 224 813 970
info@protetikamedica.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Ing. Jan Červený
M: +420 773 519 191**PSP – Protetika Sýkora Praha**

Pod novým lesem 99/56, Praha 6

M: +420 603 996 987
jendasykora@seznam.cz
www.protetika-sykora.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Jan Sýkora
M: +420 603 996 987**Centrum
technické ortopedie s.r.o**

Riegrova 3, České Budějovice

T: +420 387 311 727-8
M: +420 602 746 488
cto@technickaortopedie.cz
www.technickaortopedie.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

Pavel Fiala
M: +420 602 778 485**Malík a spol., s.r.o.**Na Okrouhlíku 1681
Hradec KrálovéT: +420 495 212 621
info@protetikahk.cz
www.protetikahk.cz


Kontakt na ortotika–protetika:

Jan Hanuš
M: +420 724 045 768**PROTETIKA ŠTĚPÁNOVÁ a spol., s.r.o.**

Poršova 773, Skuteč

T: +420 469 350 162
protetika@protetikastepanova.cz
www.protetikastepanova.cz

Kontakt na ortotika–protetika:

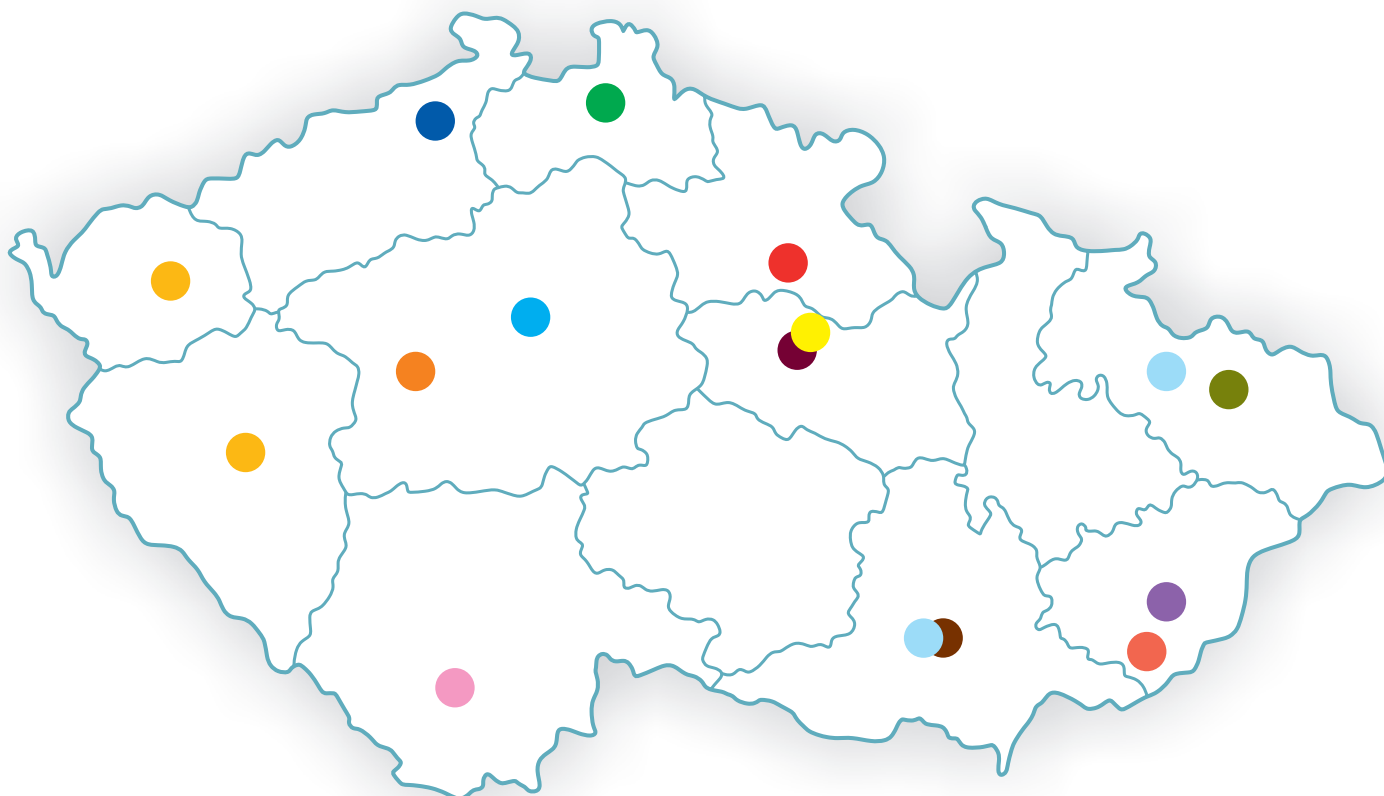Tomáš Pospíchal
M: +420 603 811 344


Sériově a individuálně vyráběné ortézy

Odborná konzultace:



Mgr. Petra Poková

Fyzioterapeutka
+420 601 088 569
pokova@ottobock.cz

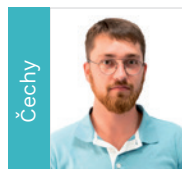


Bc. Jan Kroupa

Ortotik-protetik
+420 770 107 696
kroupa@ottobock.cz



PhDr. Radim Šojdr, MHA

Fyzioterapeut
+420 725 427 933
sojdr@ottobock.cz

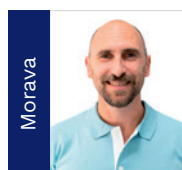

Bc. Jan Šnytr

Ortotik-protetik
+420 725 050 671
snytr@ottobock.cz

Objednávky – sériové a individuální ortézy:



Irena Šebestová

+420 725 072 055
sebestova@ottobock.cz



Radka Palmová

+420 725 730 637
palmova@ottobock.cz

Náš regionální zástupce:

