

ottobock.

**WalkOn család**

A járás harmóniája.

Egészségügyi szakemberek számára


# WalkOn család

## Kiválasztási segédlet.

Janda féle izomstátusz besorolás



Izomstátusz meghatározása

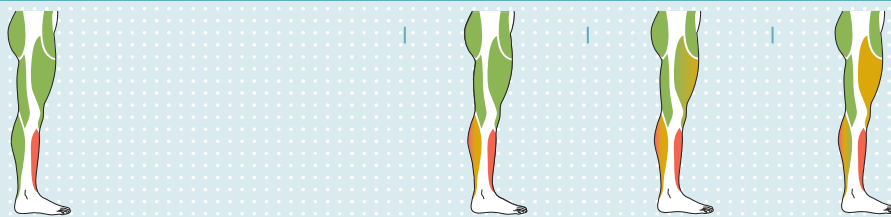

Instabil térdízület?

Nem

Igen

Instabil bokaízület?

Nem

Igen

Igen

Valgizáló és pronáló tengelyeltérés?

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem



WalkOn  
Flex  
28U22



WalkOn  
28U11



WalkOn  
Trimable  
28U23



WalkOn  
Lateral  
28U33



WalkOn  
Reaction Lateral  
28U34



WalkOn  
Reaction  
28U24



WalkOn  
Reaction Plus  
28U25

# WalkOn család Áttekintő.

	WalkOn Flex 28U22	WalkOn 28U11	WalkOn Trimable 28U23	WalkOn Lateral 28U33	WalkOn Reaction Lateral 28U34	WalkOn Reaction 28U24	WalkOn Reaction Plus 28U25
Hatékonyan támogatja a fiziológiás járást, váltakozó járássebesség és terhelés mellett is	●	●	●	●	●	●	●
Támogatott dorzálflexió	●	●	●	●	●	●	●
Csökkenti a megbotlás és az elesés veszélyét	●	●	●	●	●	●	●
Megelőzi a bizonytalan talajfogást és átgördülést	●	●	●	●	●	●	●
Dinamikus sarokérintés és elrugaszkodás	●	●	●	●	●	●	●
Kevesebb kompenzáló mozdulat	●	●	●	●	●	●	●
Nagyfokú flexibilitás járás során	●						
Gördülékenyebb járás egyenetlen talajon (a WalkOn típushoz képest)	●						
Stabilizálja a bokaízületet		●	●	●			
Korlátozza a plantárflexiót és a szupinációt normál utcai cipő használata esetén		●	●	●			
Nagyfokú energia-visszaadó képesség		●	●	●	●	●	●
Stabilizálja a térd- és bokaízületeket a talajreakciós erők segítségével					●	●	●
A nagyobb támasztófelület hatékonyabban támasztja az instabillá vált térdízületet					●	●	●
Magas dinamika					●	●	
Merevebb talprész kialakítás a WalkOn Reaction típushoz képest							●

# WalkOn család

Mindenkinek a megfelelő ellátást.



**WalkOn Flex  
28U22**



**WalkOn  
28U11**



**WalkOn Trimable  
28U23**

<b>Lábszárizmok gyengesége</b>	Nincs/enyhe spaszticitás	Nincs/enyhe spaszticitás	Nincs/enyhe spaszticitás
<b>Plantár flexiós izomzat</b>	–	–	–
<b>Térd extenzió</b>	–	–	–
<b>Méretre vágható talprész</b>	Igen	–	Igen
<b>Pilon kialakítása</b>	Mediális	Mediális	Mediális
<b>Megtámasztás</b>	Hátulsó	Hátulsó	Hátulsó
<b>Alapanyag</b>	Karbonszálas kompozit	Karbonszálas kompozit	Karbonszálas kompozit
<b>Felnőtt méret</b>	Igen	Igen	Igen
<b>Gyermek méret</b>	Igen	Nem	Nem

## **28U22 WalkOn Flex**


## **28U11 WalkOn**

## **28U23 WalkOn Trimable**

## **28U33 WalkOn Lateral**

Indikáció: a lábszárizmok enyhe vagy közepes fokú spaszmussal járó gyengesége.

- ▶ Peroneus izomzat bénulása
- ▶ Stroke
- ▶ Traumás agysérülés
- ▶ Sclerosis multiplex
- ▶ Idegi eredetű izomsorvadás

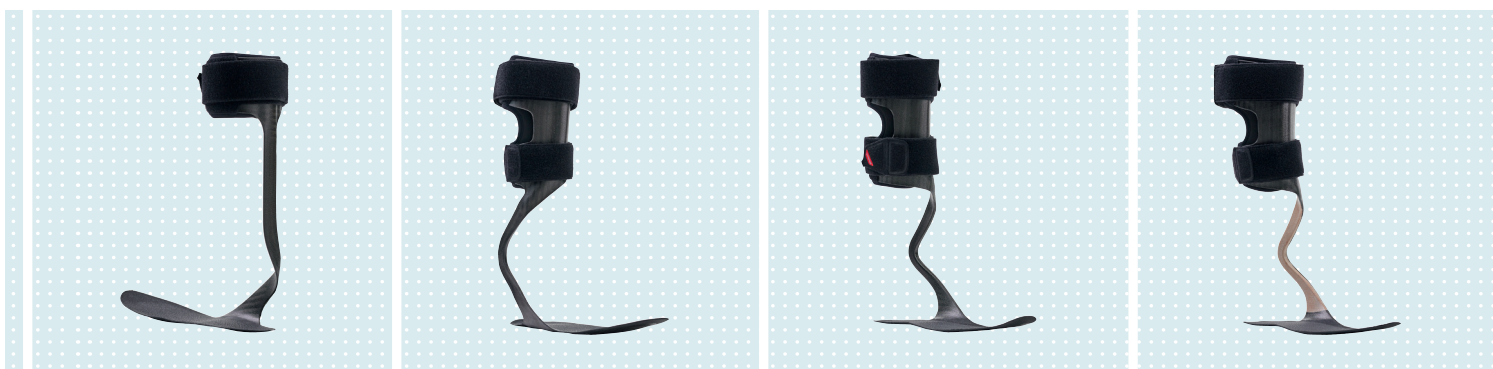

**WalkOn Lateral  
28U33**

**WalkOn Reaction Lateral  
28U34**

**WalkOn Reaction  
28U24**

**WalkOn Reaction Plus  
28U25**

Nincs/enyhe spaszticitás	Nincs/enyhe/mérsékelt spaszticitás	Nincs/enyhe/mérsékelt spaszticitás	Nincs/enyhe/mérsékelt spaszticitás
–	Enyhe érintettség	Enyhe érintettség	Érintett
–	Enyhe érintettség	Enyhe érintettség	Érintett
Igen	Igen	Igen	Igen
Laterális	Laterális	Mediális	Mediális
Hátulsó	Elülső	Elülső	Elülső
Karbonszálás kompozit	Karbonszálás kompozit	Karbonszálás kompozit	Megerősített karbonszálás kompozit
Igen	Igen	Igen	Igen
Igen	Nem	Nem	Igen

### **28U34 WalkOn Reaction Lateral**

### **28U24 WalkOn Reaction**

### **28U25 WalkOn Reaction Plus**

Indikáció: a lábszárizmok közepes fokú spazmussal járó gyengesége ill. a combizmok gyengesége.

- ▶ Stroke
- ▶ Traumás agysérülés
- ▶ Sclerosis multiplex
- ▶ Ideg eredetű izomsorvadás
- ▶ Peroneus izomzat bénulása
- ▶ Infantilis cerebrális parézis (ICP)



# WalkOn.

## Felnőtt méretek.

### WalkOn Flex, WalkOn, WalkOn Trimable

Cikkszám		Oldal	Cipőméret	Teljes magasság
28U22	=L36-39	Bal	36-39	36 cm
28U11				
28U23	=R36-39	Jobb		
28U22	=L39-42	Bal	39-42	36 cm
28U11				
28U23	=R39-42	Jobb		
28U22	=L42-45	Bal	42-45	37 cm
28U11				
28U23	=R42-45	Jobb		
28U22	=L45-48	Bal	45-48	39 cm
28U11				
28U23	=R45-48	Jobb		

Rendelési példa: 28U22=L42-45

### WalkOn Lateral, WalkOn Reaction Lateral

Cikkszám		Oldal	Cipőméret	Teljes magasság
28U33	=L36-39	Bal	36-39	32.5 cm
28U34	=R36-39	Jobb		
28U33	=L39-42	Bal	39-42	35 cm
28U34	=R39-42	Jobb		
28U33	=L42-45	Bal	42-45	37 cm
28U34	=R42-45	Jobb		
28U33	=L45-48	Bal	45-48	39 cm
28U34	=R45-48	Jobb		

Rendelési példa: 28U33=L42-45

### WalkOn Reaction, WalkOn Reaction Plus

Cikkszám		Oldal	Cipőméret	Teljes magasság
28U24	=L36-39	Bal	36-39	33.3 cm
28U25	=R36-39	Jobb		
28U24	=L39-42	Bal	39-42	35.5 cm
28U25	=R39-42	Jobb		
28U24	=L42-45	Bal	42-45	37.7 cm
28U25	=R42-45	Jobb		
28U24	=L45-48	Bal	45-48	40 cm
28U25	=R45-48	Jobb		

Rendelési példa: 28U24=L42-45

# WalkOn.

## Gyermek méretek.



### WalkOn Flex Junior

Cikkszám		Oldal	Cipőméret	Teljes magasság
28U22	=L24-27	Bal	24-27	20.5 cm
	=R24-27	Jobb		
28U22	=L27-30	Bal	27-30	24 cm
	=R27-30	Jobb		
28U22	=L30-33	Bal	30-33	27 cm
	=R30-33	Jobb		
28U22	=L33-36	Bal	33-36	29.5 cm
	=R33-36	Jobb		

Rendelési példa: 28U22=L30-33

### WalkOn Lateral Junior

Cikkszám		Oldal	Cipőméret	Teljes magasság
28U33	=L24-27	Bal	24-27	20.5 cm
	=R24-27	Jobb		
28U33	=L27-30	Bal	27-30	24 cm
	=R27-30	Jobb		
28U33	=L30-33	Bal	30-33	27 cm
	=R30-33	Jobb		
28U33	=L33-36	Bal	33-36	29.5 cm
	=R33-36	Jobb		

Rendelési példa: 28U33=L30-33

### WalkOn Reaction Junior

Cikkszám		Oldal	Cipőméret	Teljes magasság
28U25	=L24-27	Bal	24-27	20.5 cm
	=R24-27	Jobb		
28U25	=L27-30	Bal	27-30	24.5 cm
	=R27-30	Jobb		
28U25	=L30-33	Bal	30-33	27 cm
	=R30-33	Jobb		
28U25	=L33-36	Bal	33-36	29.4 cm
	=R33-36	Jobb		

Rendelési példa: 28U25=L30-33



Otto Bock Hungaria Kft.  
1135 Budapest, Tatai u. 74.  
T +36 1 451 1020 | F +36 1 451 1021  
info@ottobock.hu | www.ottobock.hu

646D387=HU-202208 Otto Bock Hungaria Kft.