

Mehr Thermodesinfektor als je zuvor: Die MELAG Terminatoren.

MELAtherm 20 / MELAtherm 10 Evolution

JETZT NEU:
2 Größen für
jede Anforderung



Die MELAG Thermodesinfektoren Voll im Trend: Effizient.

Dürfen wir vorstellen: MELAtherm – weit mehr als ein Thermodesinfektor, sondern Ihr neues Teammitglied im Aufbereitungsraum. Er übernimmt die Reinigung und Desinfektion und schenkt Ihrem Team wertvolle Zeit für das, was wirklich zählt: Die bestmögliche Versorgung Ihrer Patienten. Und das mit mehr Sicherheit, weniger Aufwand und einem guten Gefühl für Sie und Ihr Team.



MELAtherm 10 Evolution

MELAtherm 20



Effizienz:
Reduktion des Arbeitsaufwandes sichert kosten- und zeitsparende Workflows



Sicherheit:
Verbesserung des Arbeitsschutzes durch minimalen Instrumentenkontakt



Gesetzeskonformität:
Dokumentation der Aufbereitungsprozesse ermöglicht Reproduzierbarkeit




Prozessoptimierung:
Sofortiger Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten nach der maschinellen Aufbereitung

Made in Germany. Made for You.

Zukunft braucht Herkunft: Seit über 70 Jahren entwickeln, produzieren und optimieren wir unsere Systemlösungen zur Instrumenten-Aufbereitung am Hauptstandort Berlin. Denn MELAG steht für Ingenieurskunst und Produktion „Made in Germany“ auf höchstem Qualitätsniveau.



Nach nur 25 Monaten amortisiert sich der Einsatz eines MELAtherm unter Annahme der folgenden Werte:

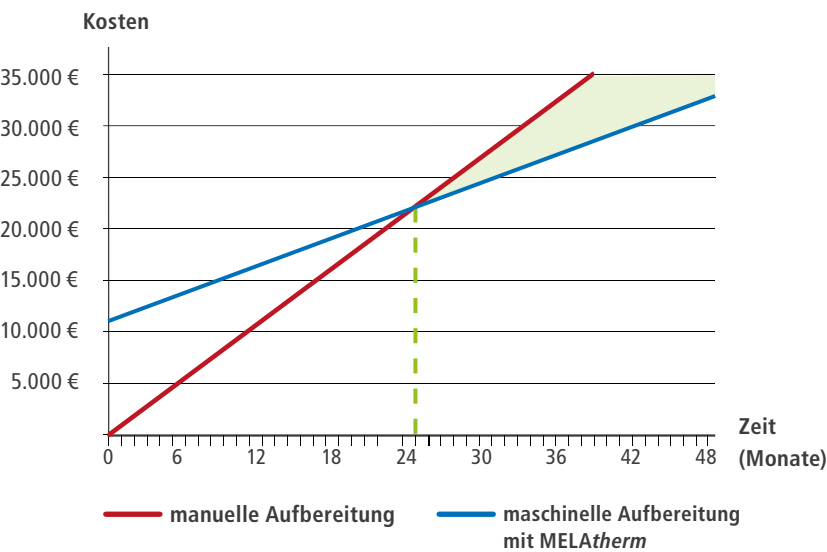

Anzahl Arbeitstage/Monat	22
Zyklen pro Tag	2
Stundenlohn Mitarbeiter*in	18,50 €
Kosten Desinfektionsbad	1,80 €
Kosten Prozessmedien, Strom, Wasser	2,00 €
Arbeitszeit für manuelle Aufbereitung (in h)	1
Arbeitszeit für maschinelle Aufbereitung (in h)	0,25
Kosten pro Aufbereitungszyklus manuell	20,30 €
Kosten pro Aufbereitungszyklus maschinell	6,63 €
Anschaffungskosten MELAtherm	11.000,00 €
Zinssatz	5,0 %
Wartung/Service/Validierung pro Monat	100,00 €
Kosten pro Monat manuell	893,20 €
Kosten pro Monat maschinell	437,33 €

Mehr Leistung. Mehr Möglichkeiten. Mehr MELAtherm.

Die neue MELAtherm Serie mit waschechten Vorteilen.

Ob Einzelpraxis oder MVZ: Die MELAtherm Thermodesinfektoren mit zwei unterschiedlichen Waschkammergrößen wurden in Berlin bis ins kleinste Detail für maximale Performance entwickelt – damit Ihre Ideen von einem zeit-, platz- und kostensparenden Hygiene-Workflow Wirklichkeit werden.



AquaBoost für brillante Reinigung



XXL Smart-Touch Display



ProControl zur Chargenfreigabe



Integrierte Dokumentations-Schnittstellen



MELAG Qualität - made in Germany



Über 90 Körbe, Halterungen und Adapter



Freier Service mit über 1.300 geschulten Technikern



Wartungsintervall von 2 Jahren oder 1.000 Zyklen

MELAtherm 10 Evolution

Die praxisoptimierte Lösung für:

- ➔ **Begrenzte Platzverhältnisse**
durch platzsparende Aufnahme der Prozessmedien in der Geräteschublade
- ➔ **Geringen bis mittleren Aufbereitungsbedarf**
von Instrumenten für bis zu 45 Patienten pro Charge in einem Basiskorb mit bis zu 12 Flex-Segmenten



MELAtherm 20

Die XXL Lösung für:

- ➔ **Erhöhten Aufbereitungsbedarf**
von Instrumenten für bis zu 90 Patienten pro Charge in zwei Basiskörben mit bis zu 24 Flex-Segmenten
- ➔ **Wash-Tray Systeme**
zur Aufbereitung von bis zu 16 Standard-Trays im Unterkorb und 32 kleineren Trays im Oberkorb
- ➔ **Höchste Ansprüche an Effizienz und Komfort**
mit selbstreinigendem Zentralfilter und nochmals bis zu 63 % besserer Reinigungsleistung im Vergleich zum MELAtherm 10 Evolution (in Anlehnung an die ÖGSV Leitlinie 3a).

Über 30.000 Praxen und Kliniken weltweit vertrauen auf MELAtherm:



„MELAtherm überzeugt uns Tag für Tag! Auch bei 45 Patienten sorgt die abgestimmte MELAG Systemlösung in jedem Schritt der Aufbereitung für Effizienz, Sicherheit und reibungslose Abläufe.“

Praxis Kampf & Vieler-Kampf, Grebenstein



„Dank MELAtherm und dem MELAG System gelingt es uns, die Arbeitsprozesse unseres Teams spürbar zu vereinfachen und wertvolle Zeit zu gewinnen.“

Praxis Kathrin Wilkening, Isernhagen



„MELAG ist unser verlässlicher Partner für Praxishygiene. Auf die langjährige Erfahrung und die Qualität made in Germany vertrauen wir zu 100 %.“

Praxis Dr. Manuel Waldmeyer, Kassel

MELAtherm 20

Die ganze Magie des MELAtherm in XXL.

Entwickelt für Praxen ohne Limits: Mit einer extragroßen Waschkammer, smarten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie dem neu entwickelten 3-Arm-Spülsystem ist MELAtherm 20 bereit für jede Herausforderung – heute und in Zukunft.

Ob mit 230 V oder 400 V, passiveDRY oder activeDRY: MELAtherm 20 passt sich mit über 90 Zubehörartikeln und großartigen Produkt-Highlights flexibel Ihren Anforderungen an und ermöglicht so die hoch-effiziente Aufbereitung von Instrumenten für bis zu 90 Patienten pro Charge.

**Bis zu 32x MELAstore Tray 33 oder
16x MELAstore Tray 50 im Oberkorb**
in Verbindung mit Halterung Universal flach

**Für Instrumente von
bis zu 90 Patienten pro Zyklus**

**160 l Kammer mit 2 Körben
und bis zu 24 Flex-Segmenten**

**230 V oder 400 V Variante
mit activeDRY oder passiveDRY**



Freier Service mit über 1.300 Technikern
Egal ob Wartung, Reparatur oder Validierung – unser unabhängiges Servicenetz bietet Ihnen die freie Wahl und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!



XXL Kammerkonzept:

Bis zu 24 Flex-Segmente im Unterkorb und im höhenverstellbaren Oberkorb bieten Platz für alles. Und noch mehr.



AquaBoost:

Dank der leistungsstarken Umwälzpumpe und neu entwickeltem Spülarm-System erreicht MELAtherm 20 eine um nochmals 63 % verbesserte Reinigungsleistung gegenüber MELAtherm 10 Evolution.*

* in Anlehnung an die ÖGSV Leitlinie 3a



Trocknungssysteme:

Mit activeDRY für die aktive Innen- und Außentrocknung oder passiveDRY mit automatischer Türöffnung und Dampfkondensation erzielen Sie eine schonende Trocknung und schützen Ihre Instrumente zuverlässig vor Korrosion und Beschädigungen.



Smart-Touch:

Mit dem extra-großen Touch-Display ist alles magisch einfach – einfach magisch: Von der Programmauswahl bis hin zur Dokumentation per Netzwerk oder USB.



ProControl:

Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe direkt am Gerät - das spart Zeit, ist rechtssicher und ermöglicht den sofortigen Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten.



MediaGuard: (optional)

Die speziell entwickelte Aufbewahrungsbox schafft Ordnung und schützt Ihre Schränke zuverlässig vor Prozessmedien.



Cleanfinity Pro: (optional)

Maximaler Instrumentenschutz, minimale Handgriffe – der neue selbstreinigende Zentralfilter im Boden der Waschkammer bietet idealen Werterhalt für Ihre Hohlkörper-Instrumente und spart wertvolle Arbeitszeit.



Aktive Trocknung:

Die aktive Außen- und Innentrocknung activeDRY garantiert idealen Schutz Ihrer Instrumente vor Korrosion und Beschädigung.



Prozessmedien-Aufnahme:

Integration der Prozessmedien und des Dosiermoduls schafft Platz, erleichtert die Arbeit und hilft, Fehler zu vermeiden.



Praxisoptimierte Aufbereitungskammer:

Das kompakte Waschkammer-Konzept mit vielseitigen Einsatzkörben spart Zeit, senkt Kosten und schont wertvolle Ressourcen.



Smart-Touch:

Einweisung, Programmwahl und Bedienung mit Smart-Touch so einfach wie nie zuvor. Jetzt sogar selbsterklärend mit Video-Tutorials zu allen relevanten Fragestellungen der Bedienung.



ProControl:

Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe direkt am Gerät - das spart Zeit, ist rechtssicher und ermöglicht den sofortigen Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten.



Dokumentations-Schnittstellen:

Mit integriertem CF-Card-Slot und zwei Netzwerk-Schnittstellen entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Dokumentation.



AquaBoost:

Die neue leistungsstarke Umwälzpumpe sichert bis zu 44 %* bessere Reinigungsergebnisse und höhere Kapazitäten: Bereiten Sie bis zu 23 Winkelstücke und Turbinen pro Zyklus auf!

* Im Vergleich zum Vorgänger-Modell MELAtherm 10



MELAtherm 10 Evolution

Kompakt gedacht, effizient gemacht.

Kein Platz? Kein Problem! Das Raumwunder mit praxisoptimierter Aufbereitungskammer und integrierten Prozessmedien wächst über sich hinaus. Denn MELAtherm 10 Evolution liefert glänzende Reinigungs- und Trocknungsergebnisse auf kleinstem Raum – und das bei ressourcenschonenden Zyklen mit Kosten von nur 1,50 €.

Ob Smart-Touch-Display mit integrierten Video-Tutorials, Freigabesoftware ProControl oder activeDRY Trocknungssystem, MELAtherm 10 Evolution steht für Leistung mit Leichtigkeit: Damit Ihre Zeit wieder Ihren Patienten gehört.

Für Instrumente von bis zu 45 Patienten pro Zyklus

84 l Kammer mit einem Basiskorb und bis zu 12 Flex-Segmenten

Als 230 V oder 400 V Variante mit activeDRY Trocknung



Freier Service mit über 1.300 Technikern

Egal ob Wartung, Reparatur oder Validierung – unser unabhängiges Servicenetz bietet Ihnen die freie Wahl und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis!

Das MELAstore System

Workflow wird WOWflow.

Möchten Sie Ihren Aufbereitungsprozess noch weiter optimieren? Dann steigern Sie mit MELAstore die Effizienz und Qualität der Instrumenten-Aufbereitung. Die Wash-Trays und Sterilisiercontainer sind in verschiedenen Größen erhältlich und perfekt aufeinander sowie auf die MELAG Thermodesinfektoren und Autoklaven abgestimmt. Überzeugen Sie sich selbst von dem Boost für Ihren Workflow:



Zeitersparnis:
Sparen Sie bis zu 30 Minuten pro Aufbereitungszyklus im Vergleich zum Verpacken von Einzelinstrumenten



Umweltschutz:
Reduzieren Sie die Materialkosten und den Praxisabfall durch einen wesentlich geringeren Folienverbrauch



Prozessoptimierung:
Steigern Sie den Standardisierungsgrad und somit das Qualitätsmanagement



Sicherheit:
Sichere Fixierung mit Silikonstegen schützt Praxisteam und Instrumente



Ihr Aufbereitungsprozess – neu gedacht mit MELAstore:



Reinigung und Desinfektion der MELAstore Trays mit MELAG Thermodesinfektoren



Verpackung mit MELAstore Box



Sterilisation mit MELAG Autoklaven



Dokumentation und Freigabe mit MELAtrace



Kennzeichnung mit MELAprint 80

Vergleichen Sie uns mit anderen Herstellern

Augen auf beim Thermo-Kauf.

Wir sind von der Qualität, Ausstattung und Servicefreundlichkeit unserer Thermodesinfektoren überzeugt. Damit auch Sie davon überzeugt werden, fasst die folgende Checkliste die wichtigsten Produktmerkmale zusammen. So ist es Ihnen leicht möglich, unsere Geräte mit Produkten anderer Hersteller zu vergleichen.

Die Produkt-Highlights	Ihre Vorteile	MELAtherm 10 Evolution	MELAtherm 20 mit passiveDRY	MELAtherm 20 mit activeDRY	Anderer Hersteller
Trocknung	➔ Mit der Innen- und Außentrocknung activeDRY oder der automatischen Türöffnung passiveDRY schützen Sie Ihr wertvolles Instrumentarium zuverlässig vor Korrosion und Beschädigung – für maximale Sicherheit und eine deutlich verlängerte Lebensdauer Ihrer Instrumente.	activeDRY	passiveDRY	activeDRY	
Intuitives Touch-Bedienkonzept	➔ Scharf, hell, sensationell: Das große Touch-Display führt mit Leichtigkeit durch alle Funktionen – klar, verständlich und sicher vom ersten Moment an.				
Prozessmedien-Aufnahme	➔ Mehr Platz, mehr Struktur: Die Kombination aus Prozessmedien-Aufnahme und Dosiermodul schafft nachhaltig Ordnung im Aufbereitungsraum.	in Prozessmedien-Schublade	in optionaler MediaGuard Aufbewahrungsbox		
Flüssige Prozessmedien	➔ Die Dosierung von flüssigen Prozessmedien sichert optimale Reinigungs- und Trocknungsergebnisse und ist vollständig validierbar.				
Dokumentations-Schnittstellen	➔ Dank der Anschlüsse für Netzwerk und Dokumentationsmedien gelingt die rechtssichere Protokollübertragung ganz ohne zusätzliche Software – einfach und zuverlässig.	CF-Karte oder Netzwerk	USB-Stick oder Netzwerk		
Chargenfreigabe direkt am Gerät	➔ Die papierlose Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe ermöglichen den sofortigen Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten.				
Praxisoptimierte Aufbereitungskammer	➔ In Kombination mit dem vielseitigen Zubehör ermöglicht das Kammerkonzept zeitsparende und ressourcenschonende Arbeitsabläufe. Dabei entspricht eine Charge im MELAtherm 10 etwa zwei Praxis-Autoklav-Beladungen und eine Charge im MELAtherm 20 etwa vier Praxis-Autoklav-Beladungen.	Instrumente für bis zu 45 Patienten	Instrumente für bis zu 90 Patienten		
Reinigbarer Zentralfilter	➔ Eine wirtschaftliche Lösung für höchste Sicherheit: Cleanfinity sorgt für eine zuverlässige Aufbereitung von Hohlkörper-Instrumenten und kann bei Bedarf ohne Folgekosten direkt in der Praxis gereinigt werden.	Cleanfinity mit Weichseltfilter-Anzeige	Selbstreinigender Cleanfinity Pro Filter		
Aufbereitung von ZEG-Spitzen	➔ Nur die Adaptierung von ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel garantiert maximale Anwendersicherheit und verhindert Arbeitsunfälle				
AquaBoost Technologie	➔ Der hohe Spüldruck der AquaBoost-Technologie ermöglicht nicht nur die Aufbereitung zusätzlicher Handstücke im Injektorkorb Flex 1, sondern verbessert zugleich das Reinigungsergebnis erheblich.	+44 % im Vergleich zum Vorgänger MELAtherm 10	+63 % im Vergleich zum MELAtherm 10 Evolution		
Überwachung des Spüldrucks und der Spülarme	➔ Die Überwachung dieser Parameter gewährleistet Prozesssicherheit.				
Servicefreundliche Wartungszyklen	➔ Wartungszyklen von 24 Monaten oder 1.000 Zyklen sowie ein unabhängiges Service-Konzept reduzieren die laufenden Betriebskosten.				
Zufriedene Anwender*innen in Ihrer Region	➔ Über 30.000 Praxen vertrauen bereits auf MELAtherm – entdecken Sie ihre Erfahrungen unter: www.melag.com/referenzen				



Wenn Sie bereits einen MELAG Autoklaven in Ihrer Praxis einsetzen, lohnt sich der Kauf eines MELAG Thermodesinfektors besonders wegen der großen Ersparnis bei gemeinsam durchgeführten Wartungen und Validierungen!

Mehr Vielfalt. Mehr Sie. Körbe und Adapter für alle Fachbereiche.

Jede Fachrichtung ist einzigartig – genauso wie Ihre Anforderungen an die Instrumenten-Aufbereitung. Ob Dental, HNO, Gynäkologie, Podologie, Veterinärmedizin, Ophthalmologie oder andere medizinische Fachrichtungen – mit über 90 Körben und Adaptern stellen wir ein individuelles Beladungsmuster zusammen, das optimal zu Ihnen und Ihrem Workflow passt.

Auf unserer Website finden Sie eine Vielzahl an Beladungsmustern mit detaillierter Artikelaufstellung:
www.melag.com/melatherm-beladungsmuster



Zahnarztpraxis

In nur einem Zyklus lassen sich im MELAtherm 10 Evolution Instrumente für über 45 Patienten, im MELAtherm 20 sogar für über 90 Patienten in kürzester Zeit aufbereiten.

✓ Aufbereitung von Universal-Saugern stehend im Instrumenten-Korb

✓ Sichere Adaptierung von ZEG-Spitzen mit Drehmomentschlüssel



Gynäkologische Praxis

Bis zu 32 Spekula im MELAtherm 10 Evolution und bis zu 45 Spekula im MELAtherm 20 stehen nach Reinigung und Desinfektion einsatzbereit zur Verfügung – ergänzt durch Flexkörbe für zusätzliche Instrumente.



HNO-Praxis

Ob 192 Ohrtrichter im MELAtherm 10 Evolution oder über 400 Ohrtrichter im MELAtherm 20 – in nur ca. 60 Minuten sind sie samt weiterer HNO-Instrumente vollständig aufbereitet und einsatzbereit.




Medizinische Praxen

Ob Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Dermatologie und Allgemeinmedizin – mit Flex-Körben, Schlauchanschlüssen und Adaptern für Hohlkörper-Instrumente passt sich MELAtherm exakt an die Anforderungen Ihrer Fachrichtung an.




NEU: MELAtherm 20 mit Beladewagen für bis zu 8 DIN-Siebe



MELAtherm 10
Evolution

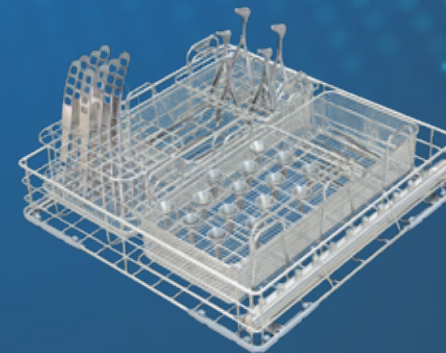

MELAtherm 20

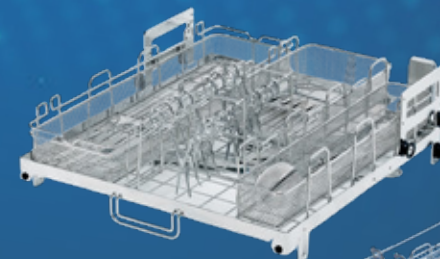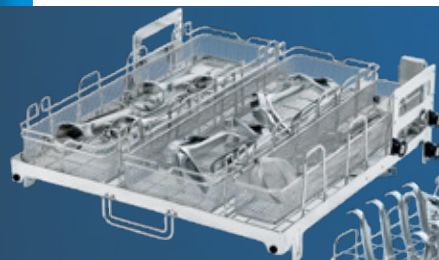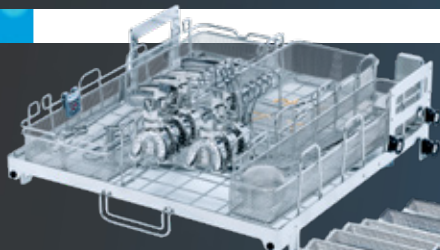

Mehr Vielfalt. Mehr Sie.

Alle Beladungsmuster mit Artikelauflistung

Grundbestückung für die Zahnarztpraxis

In nur einem Zyklus lassen sich im MELAtherm® 10 Evolution Instrumente für bis zu 45 Patienten, im MELAtherm® 20 für bis zu 90 Patienten aufbereiten.



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x **ME84610**: Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 1x **ME80135**: Halterung Universal Flex 2
- 3x **ME01178**: MELAstore® Tray 100
- 1x **ME80020**: Flexkorb 2
- 2x **ME80110**: Halterung für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- 1x **ME00184**: Instrumentenkorb Standard
- 1x **ME00133**: Kleinteilebehälter Standard

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene, Injektorkorb Flex 1 und 6 ZEG-Adapter (Abbildungen zeigen optional bestellbare Adapter)



Für MELAtherm® 20

- 1x **ME80830**: Unterkorb
- 1x **ME80840**: Injektorschienenmodul
- 1x **ME84650**: Zentralfilter Cleanfinity Pro
- 1x **ME80137**: Halterung Universal Flex 4
- 4x **ME01178**: MELAstore® Tray 100
- 1x **ME00131**: Waschkorb G

- 1x **ME80820**: Oberkorb
- 2x **ME80110**: Halterung für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- 1x **ME20670**: Flexkorb 4
- 1x **ME00133**: Kleinteilebehälter Standard

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene, Injektorkorb Flex 1 und 6 ZEG-Adapter (Abbildungen zeigen optional bestellbare Adapter)

Grundbestückung für die MKG-Praxis

Die Instrumente werden als Set (z. B. PA, OST) in MELAstore® Trays effizient und sicher aufbereitet:



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x **ME84610**: Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 1x **ME80136**: Halterung Universal Flex 3
- 6x **ME01178**: MELAstore® Tray 100
- 1x **ME80135**: Halterung Universal Flex 2
- 3x **ME01179**: MELAstore® Tray 200
- 1x **ME00195**: Instrumentenkorb Kompakt

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene (Abbildungen zeigen optional bestellbare Adapter)



Für MELAtherm® 20

- 1x **ME80830**: Unterkorb
- 1x **ME80840**: Injektorschienenmodul
- 1x **ME84650**: Zentralfilter Cleanfinity Pro
- 1x **ME80137**: Halterung Universal Flex 4
- 1x **ME80136**: Halterung Universal Flex 3
- 1x **ME00195**: Instrumentenkorb Kompakt

- 1x **ME80820**: Oberkorb
- 1x **ME80110**: Halterung für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- 1x **ME20670**: Flexkorb 4
- 1x **ME00133**: Kleinteilebehälter Standard

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene (Abbildungen zeigen optional bestellbare Adapter)

Grundbestückung für die KFO-Praxis

Diese Beladungsmuster für MELAtherm® 10 Evolution und MELAtherm® 20 sind optimal auf die Anforderungen einer KFO-Praxis abgestimmt:



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x **ME84610**: Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 2x **ME80020**: Flexkorb 2
- 4x **ME80110**: Halterung für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- 1x **ME00184**: Instrumentenkorb Standard

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene, Injektorkorb Flex 1 und 6 ZEG-Adapter (Abbildungen zeigen optional bestellbare Adapter)



Für MELAtherm® 20

- 1x **ME80830**: Unterkorb
- 1x **ME80840**: Injektorschienenmodul
- 1x **ME84650**: Zentralfilter Cleanfinity Pro
- 2x **ME80030**: Flexkorb 3
- 3x **ME80110**: Halterung für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen
- 1x **ME00184**: Instrumentenkorb Standard

- 1x **ME80820**: Oberkorb
- 1x **ME80110**: Halterung Abdrucklöffel
- 1x **ME20670**: Flexkorb 4
- 1x **ME00133**: Kleinteilebehälter Standard

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene, Injektorkorb Flex 1 und 6 ZEG-Adapter (Abbildungen zeigen optional bestellbare Adapter)

Grundbestückung für die ophthalmologische Praxis

Die MELAtherm® Serie mit den neuen MELAstore® Trays Ophthalmologie ermöglicht die Reinigung und Desinfektion von bis zu 6 bzw. 8 Katarakt-Sets pro Zyklus:



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x **ME80440**: Basiskorb mit Injektorschiene und Kunststoff-Zentralfilter
- 2x **ME80136**: Halterung Universal Flex 3
- 6x **ME01189**: MELAstore® Tray Ophthalmologie

Optional: Adapter und Verschlusschrauben (Abbildungen zeigen optional bestellbare Verschlusschrauben)



Für MELAtherm® 20

- 1x **ME80830**: Unterkorb
- 1x **ME80840**: Injektorschienenmodul
- 1x **ME84650**: Zentralfilter Cleanfinity Pro
- 2x **ME80137**: Halterung Universal Flex 4
- 8x **ME01189**: MELAstore® Tray Ophthalmologie

- 1x **ME80820**: Oberkorb
- 1x **ME20670**: Flexkorb 4

Optional: Adapter und Verschlusschrauben (Abbildungen zeigen optional bestellbare Verschlusschrauben)

Grundbestückung für die gynäkologische Praxis

Bis zu 32 Spekula im MELAtherm® 10 Evolution und bis zu 45 Spekula im MELAtherm® 20 stehen nach Reinigung und Desinfektion einsatzbereit zur Verfügung – ergänzt durch Flexkörbe für zusätzliche Instrumente:



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x **ME00188**: Basiskorb ohne Injektorschiene
- 1x **ME80255**: Flexkorb 6
- 2x **ME80410**: Flexkorb Spekula



Für MELAtherm® 20

- 1x **ME80830**: Unterkorb
- 1x **ME80256**: Flexkorb 8
- 2x **ME80410**: Spekulakorb Flex 3

- 1x **ME80820**: Oberkorb
- 1x **ME20670**: Flexkorb 4

Grundbestückung für die HNO-Praxis

Ob 192 Ohrtrichter im MELAtherm® 10 Evolution oder über 400 Ohrtrichter im MELAtherm® 20 – in nur ca. 60 Minuten sind sie samt weiterer HNO-Instrumente vollständig aufbereitet und einsatzbereit.



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME00200: Basiskorb mit Injektorschiene (inkl. 11 Kunststoff-Blindschrauben)
- 1x ME80020: Flexkorb 2
- 1x ME80030: Flexkorb 3
- 1x ME00195: Instrumentenkorb Kompakt
- 1x ME80090: Aufsatz für Ohrtrichter Flex 2, Maschenweite 20 mm
- 1x ME80435: Aufsatz für Nasenspekula (inkl. 2 Halteklammern)

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene



Für MELAtherm® 20

- 1x ME80830: Unterkorb
- 1x ME80840: Injektorschiene Modul
- 1x ME20670: Flexkorb 4
- 1x ME80435: Aufsatz Nasenspekula
- 1x ME00131: Waschkorb G
- 1x ME80020: Flexkorb 2
- 1x ME80100: Aufsatz Ohrtrichter Flex 3

- 1x ME80820: Oberkorb
- 1x ME80110: Halterung Abdrucklöffel
- 1x ME20670: Flexkorb 4
- 1x ME00133: Kleinteilebehälter Standard

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene (Abbildungen zeigen optional bestellbare Verschlusschrauben)

Grundbestückung für medizinische Praxen


Ob Chirurgie, Orthopädie, Urologie, Dermatologie und Allgemeinmedizin – mit Flex-Körben, Schlauchanschlüssen und Adaptern für Hohlkörper-Instrumente passt sich MELAtherm® exakt an die Anforderungen Ihrer Fachrichtung an.



Für MELAtherm® 10 Evolution

- 1x ME00200: Basiskorb mit Injektorschiene (inkl. 11 Kunststoff-Blindschrauben)
- 1x ME80255: Flexkorb 6
- 2x ME80030: Flexkorb 3

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene

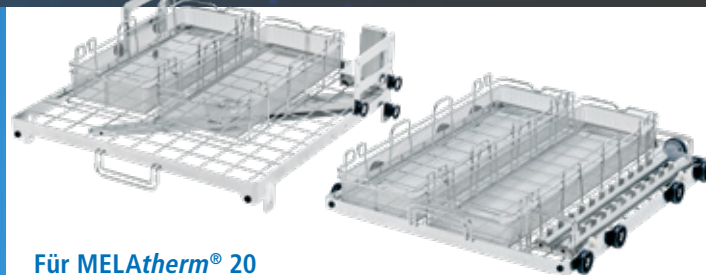

Für MELAtherm® 20

- 1x ME80830: Unterkorb
- 1x ME80840: Injektorschiene Modul
- 2x ME20670: Flexkorb 4

- 1x ME80820: Oberkorb
- 2x ME80030: Flexkorb 3

Optional: Hohlkörper-Adapter für die Injektorschiene (Abbildungen zeigen optional bestellbare Verschlusschrauben)



Für MELAtherm® 20 - DIN Siebwagen

Mit dem Beladungswagen für bis zu 8 DIN-Siebe bietet MELAG die ideale Lösung für ambulante OP-Zentren und chirurgische Kliniken mit hohem Instrumentendurchsatz (Siebe nicht im Lieferumfang enthalten).

- 1x ME80850

Basiskörbe und Injektorschiene

Die Basis für eine individuelle Beladung

Für MELAtherm® 10 Evolution

Die Basiskörbe mit Injektorschiene sind mit Injektordüsen, Verschlusschrauben oder mit 11 Blindschrauben bestückt und können nach Bedarf mit verschiedenen Hohlkörper-Adaptern versehen werden. Je nach Einsatzzweck stehen verschiedene Basiskörbe (Abmessungen (LxBxH): 43 x 42 x 9 cm) zur Auswahl:

Basiskorb mit Injektorschiene & Cleanfinity Filter mit 11 Edelstahl-Verschlusschrauben und Reinigungsbürste (nicht für die Ophthalmologie geeignet)
Art.-Nr. ME84610



Basiskorb mit Injektorschiene mit 11 Kunststoff-Blindschrauben
Art.-Nr. ME00200



Basiskorb mit Injektorschiene und Kunststoff-Zentralfilter (2 Stück) für die Ophthalmologie
Art.-Nr. ME80440

Basiskorb mit Injektorschiene mit 11 Injektordüsen und Klemmfedern
Art.-Nr. ME00197



Basiskorb ohne Injektorschiene falls keine Hohlkörper-Instrumente aufbereitet werden
Art.-Nr. ME00188



Umrüstsatz und Zubehör für Injektorschiene mit Zentralfilter

Sie haben bereits einen Basiskorb mit Injektorschiene und möchten auf die sichere und kostengünstige Aufbereitung mit Zentralfilter umstellen? Dann profitieren Sie von unserem Umrüstsatz und Zubehör.

Umrüstsatz Injektorschiene mit Cleanfinity Filter und Reinigungsbürste zum Austausch der vorhandenen Injektorschiene ohne Zentralfilter (nicht für die Ophthalmologie geeignet)
Art.-Nr. ME84620



Reinigungsbürste für Cleanfinity Filter ist bereits im Lieferumfang eines Cleanfinity Filters enthalten
Art.-Nr. ME84640



Cleanfinity Filter (inkl. Reinigungsbürste) als Ersatz für den Kunststoff-Zentralfilter und Cleanfinity Filter (nicht für die Ophthalmologie geeignet)
Art.-Nr. ME84630




Kunststoff-Zentralfilter als Ersatz, wenn der Kunststoff-Zentralfilter erschöpft ist
Art.-Nr. ME80490




Für MELAtherm® 20

Der Unter- und Oberkorb des MELAtherm® 20 sind mit allen Einsatzgestellen des MELAtherm® 10 kompatibel und können zusätzlich mit speziell entwickelten Körben für MELAtherm® 20 bestückt werden. Das Injektorschiene Modul ermöglicht ggf. in Kombination mit dem selbstreinigenden Zentralfilter und passenden Adaptern die zuverlässige Aufbereitung von Hohlkörper-Instrumenten.

Unterkorb mit einer Grundfläche von (LxB): 52,9 x 47 cm
Art.-Nr. ME80830

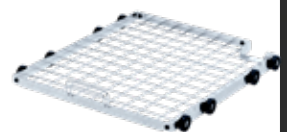

Oberkorb mit einer Grundfläche von (LxB): 52,9 x 47,3 cm
Art.-Nr. ME80820

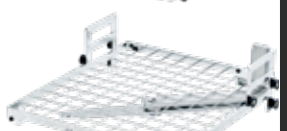

Injektorschiene Modul mit 22 Kunststoff-Blindschrauben
Art.-Nr. ME80840



DIN Siebwagen zur Aufnahme von bis zu 8 Sieben. Abmessung (L x B x H): 53,8 x 51,2 x 43,2 cm
Art.-Nr. ME80850



Cleanfinity Pro als selbstreinigender Zentralfilter für höchsten Schutz bei der Hohlkörper-Aufbereitung (auch für Ophthalmologie geeignet)
Art.-Nr. ME84650



MELAcontrol Wash Check

Behalten Sie das Reinigungsergebnis im Blick: Mit unserem Wash Check überwachen Sie die Reinigungsleistung von Instrumenten im Basiskorb oder auf der Injektorschiene.

MELAcontrol Wash Check Reinigungsindikatoren, 100 Stück
Art.-Nr. ME01072



MELAcontrol Wash Check Halterung zur Überprüfung der Außenreinigung im Basiskorb
Art.-Nr. ME01073





MELAcontrol Wash Check Halterung zur Überprüfung der Innenreinigung auf der Injektorschiene
Art.-Nr. ME01074



Optimale Nutzung der Basiskörbe

Körbe und Adapter


Unser Portfolio ermöglicht eine strukturierte und praxisgerechte Beladung Ihres MELAtherm®. Die sechs variablen Segmente im Basiskorb des MELAtherm® 10 (schwarzes Raster) sowie jeweils acht flexibel konfigurierbare Segmente im Ober- und Unterkorb des MELAtherm® 20 (schwarzes plus blaues Raster) lassen sich individuell an die Instrumente und Arbeitsabläufe Ihrer Praxis anpassen.

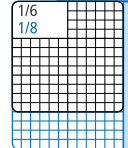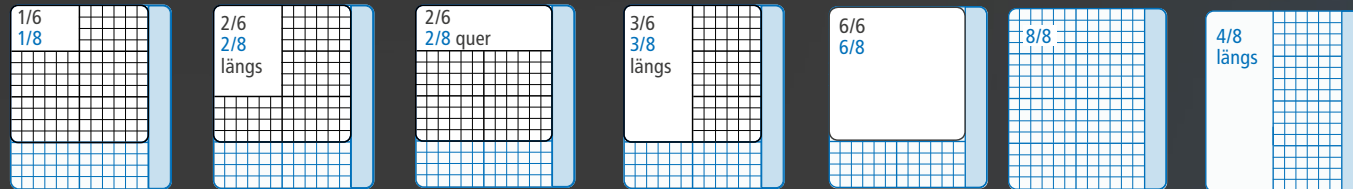

Halterung Universal Flex 1

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 6x MELAstore® Tray 33, 4x MELAstore® Tray 50, 2x MELAstore® Tray 100, 1x MELAstore® Tray 200, oder 1x Siebkassette
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80133)


Art.-Nr. ME80134

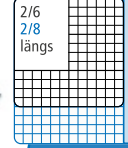

Halterung Universal Flex 2

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 12x MELAstore® Tray 33, 8x MELAstore® Tray 50, 4x MELAstore® Tray 100, 3x MELAstore® Tray 200 oder 3x Siebkassette
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80133)


Art.-Nr. ME80135

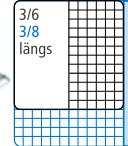

Halterung Universal Flex 3

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 18x MELAstore® Tray 33, 12x MELAstore® Tray 50, 6x MELAstore® Tray 100, 5x MELAstore® Tray 200 oder 5x Siebkassette
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80133)


Art.-Nr. ME80136

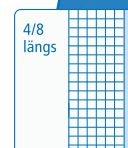

Halterung Universal Flex 4 (nur für MELAtherm® 20)

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 24x MELAstore® Tray 33, 16x MELAstore® Tray 50, 8x MELAstore® Tray 100, 7x MELAstore® Tray 200 oder 7x Siebkassette
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80133)


Art.-Nr. ME80137

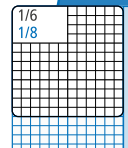

Halterung Universal Flex 1 flach

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 4x MELAstore® Tray 33 oder 2x MELAstore® Tray 50 im Oberkorb des MELAtherm® 20
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80233)


Art.-Nr. ME80234

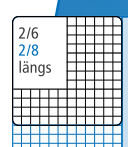

Halterung Universal Flex 2 flach

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 8x MELAstore® Tray 33 oder 4x MELAstore® Tray 50 im Oberkorb des MELAtherm® 20
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80233)



Art.-Nr. ME80235

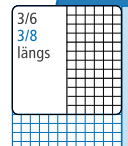

Halterung Universal Flex 3 flach

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 12x MELAstore® Tray 33 oder 6x MELAstore® Tray 50 im Oberkorb des MELAtherm® 20
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80233)


Art.-Nr. ME80236

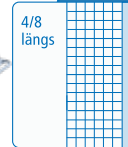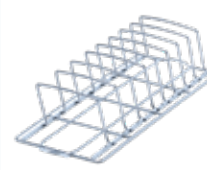

Halterung Universal Flex 4 flach (nur für MELAtherm® 20)

- Zur flexiblen Aufnahme mit frei wählbaren Abständen von bis zu: 16x MELAstore® Tray 33 oder 8x MELAstore® Tray 50 im Oberkorb des MELAtherm® 20
- Zusätzlicher Bügel (Art.-Nr. ME80233)


Art.-Nr. ME80237

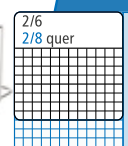

Halterung für 5 Tabletts / 10 halbe Tabletts

- Zur Aufnahme von 5 Tabletts oder 10 halben Tabletts


Art.-Nr. ME80590

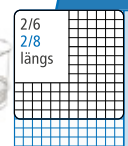

Instrumentenkorb G

- Für senkrecht stehende Instrumente, z. B. Pinzetten, Sonden, Spiegel, Scheren, Klemmen, dentale Universal-Absaugkanülen mit einem Durchmesser von 11 bis 16 mm
- Kombinierbar mit der Spitzenauflage (Art.-Nr. ME00186)


Art.-Nr. ME00131

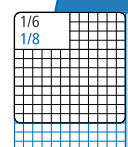

Instrumentenkorb kompakt

- Für senkrecht stehende Instrumente, z. B. Pinzetten, Sonden, Spiegel, Nasenspekula, dentale Universal-Absaugkanülen mit einem Durchmesser von 11 bis 16 mm
- Kombinierbar mit der Spitzenauflage (Art.-Nr. ME00186)

Art.-Nr. ME00195

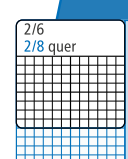

Instrumentenkorb standard

- Für senkrecht stehende Instrumente, z. B. Pinzetten, Sonden, Spiegel, Scheren, Klemmen, dentale Universal-Absaugkanülen mit einem Durchmesser von 11 bis 16 mm
- Kombinierbar mit der Spitzenauflage (Art.-Nr. ME00186)


Art.-Nr. ME00184



Kleinteilebehälter Komfort

- Zur sicheren Aufbewahrung von Kleininstrumenten bzw. Kleinteilen
- Der Kleinteilebehälter Komfort kann in die Flexkörbe gelegt werden
- Abmessungen (BxHxT): 8,4 x 7,15 x 7 cm

Art.-Nr. ME80001

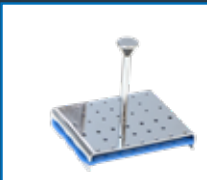

Bohrerständers

- Zur sicheren Aufnahme von rotierenden Instrumenten (z. B. Bohrer) mit den Schaftdurchmessern 1,6 mm und 2,35 mm (jeweils bis zu 19 Stück)
- Nur in Kombination mit Kleinteilebehälter Komfort

Art.-Nr. ME80002



Kleinteilebehälter Standard

- Zur Aufbewahrung von Kleininstrumenten bzw. Kleinteilen
- Der Kleinteilebehälter Standard kann in die Flexkörbe gelegt oder in die Instrumentenkörbe gestellt werden.
- Abmessungen: Länge 18 cm, ø 7,6 cm

Art.-Nr. ME00133

NEU: Wählen Sie die Farbe der Silikonstege ohne Aufpreis bei der Bestellung des MELAstore® Tray oder MELAstore® Tray Ophthalmologie aus.



MELAstore® Tray Ophthalmologie

- Wasch-Tray zur sicheren und schonenden Aufbereitung aller Instrumente für eine Katarakt-OP (max. 6 Sets pro Zyklus im MELAtherm® 10 Evolution / 8 Sets pro Zyklus im MELAtherm® 20)
- MELAstore® Tray Ophthalmologie wird anschließend in MELAstore® Box 200 verpackt und sterilisiert.
- Schläuche und Adapter (wahlweise Standard oder Bausch + Lomb SureLock Art.-Nr. ME20920)
- Nur verwendbar in Kombination mit dem MELAtherm® 10 Basiskorb mit Injektorschiene und Kunststoff-Zentralfilter (Art.-Nr. ME80440) oder dem Cleanfinity Pro (Art.-Nr. ME84650) Zentralfilter des MELAtherm® 20
- Zusätzlicher Schutzdeckel (Art.-Nr. ME01187)

Art.-Nr. ME01189



MELAstore® Tray Ophthalmologie Light

- Wasch-Tray zur sicheren und schonenden Aufbereitung aller Hohlkörperinstrumente für eine Katarakt OP (max. 11 Sets pro Zyklus im MELAtherm® 10 Evolution / 16 Sets pro Zyklus im MELAtherm® 20)
- MELAstore® Tray Ophthalmologie wird anschließend in MELAstore® Box 100 verpackt und sterilisiert.
- Schläuche und Adapter (wahlweise Standard oder Bausch + Lomb SureLock Art.-Nr. ME20920)
- Nur verwendbar in Kombination mit dem MELAtherm® 10 Basiskorb mit Injektorschiene und Kunststoff-Zentralfilter (Art.-Nr. ME80440) oder dem Cleanfinity Pro (Art.-Nr. ME84650) Zentralfilter des MELAtherm® 20


Art.-Nr. ME01188



MELAstore® Tray 33

- Abmessungen (BxHxT): 8,4 x 3 x 17,9 cm
- Zur sicheren und effizienten Aufbereitung von Einzelinstrumenten und kleinen Instrumenten-Sets (z.B. dentalen 01er oder Prophylaxe Sets) in der MELAtherm® Serie

Art.-Nr. ME01176

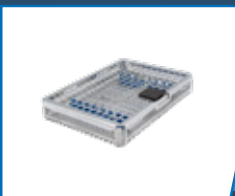

MELAstore® Tray 50

- Abmessungen (BxHxT): 12,8 x 3 x 17,9 cm
- Zur sicheren und effizienten Aufbereitung von Einzelinstrumenten sowie Instrumenten-Sets (z.B. für die Prophylaxe oder in der Podologie) in der MELAtherm® Serie

Art.-Nr. ME01177



MELAstore® Tray 100

- Abmessungen (BxHxT): 17,9 x 3 x 28 cm
- Zur sicheren und effizienten Aufbereitung von Einzelinstrumenten sowie Instrumenten-Sets (z.B. für Parodontitis-Behandlungen, Konservierende Behandlungen oder kleinere chirurgische Eingriffe) in der MELAtherm® Serie


Art.-Nr. ME01178



MELAstore® Tray 200


- Abmessungen (BxHxT): 17,9 x 4,3 x 28 cm
- Zur sicheren und effizienten Aufbereitung von Einzelinstrumenten sowie Instrumenten-Sets (z.B. für die Oralchirurgie) in der MELAtherm® Serie

Art.-Nr. ME01179

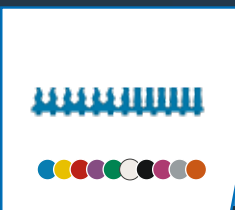

Silikonstege für MELAstore® Tray 33/ 50 / 100 / Ophthalmologie (2 St.)

- Mit den neuen Silikonstegen in zehn verschiedenen Farben wird die Organisation des Arbeitsablaufs deutlich erleichtert. Zusätzlich benötigte Silikonstege können nachbestellt werden. blau (Art.-Nr. ME82990), gelb (Art.-Nr. ME82931), rot (Art.-Nr. ME82932), violett (Art.-Nr. ME82933), grün (Art.-Nr. ME82934), weiß (Art.-Nr. ME82935), schwarz (Art.-Nr. ME82936), pink (Art.-Nr. ME82937), grau (Art.-Nr. ME82938), orange (Art.-Nr. ME82939)

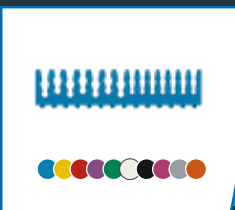


Silikonstege für MELAstore® Tray 200 (2 St.)

- Mit den neuen Silikonstegen in zehn verschiedenen Farben wird die Organisation des Arbeitsablaufs deutlich erleichtert. Zusätzlich benötigte Silikonstege können nachbestellt werden. blau (Art.-Nr. ME82991), gelb (Art.-Nr. ME82941), rot (Art.-Nr. ME82942), violett (Art.-Nr. ME82943), grün (Art.-Nr. ME82944), weiß (Art.-Nr. ME82948), schwarz (Art.-Nr. ME82949), pink (Art.-Nr. ME82947), grau (Art.-Nr. ME82948), orange (Art.-Nr. ME82949)

Flexkörbe

Viele Möglichkeiten mit dem Flex-System

Das von MELAG entwickelte, äußerst variable Flex-System bietet zahlreiche Möglichkeiten zur optimalen Beladung der Waschkammer. So können Sie beispielsweise auf den Flexkorb 6 die verschiedenen Flexkörbe 1, 2 und 3, Flexkorb Spekula oder das Einsatzgestell für Abdrucklöffel und Gelenkinstrumente in zwei Ebenen stapeln.

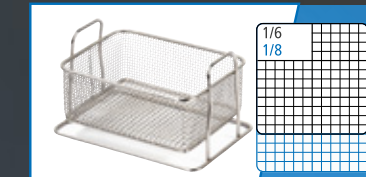

Flexkorb 1

- Für liegende Instrumente, z. B. Scheren, Pinzetten, Spiegel
- Stapelbar auf Flexkorb 1, 2, 3, 4, 6 oder 8
- Innenabmessungen (BxHxT): 14,5 x 6 x 11 cm


Art.-Nr. ME80010



Flexkorb 2

- Für liegende Instrumente, z. B. Scheren, Pinzetten, Spiegel, Wurzelheber
- Stapelbar auf Flexkorb 2, 3, 4, 6 oder 8
- Innenabmessungen (BxHxT): 14,5 x 6 x 24 cm


Art.-Nr. ME80020

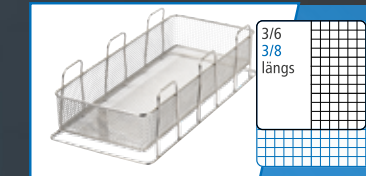

Flexkorb 3

- Für liegende Instrumente, z. B. Scheren, Pinzetten, Spiegel, Wurzelheber
- Stapelbar auf Flexkorb 3, 4, 6 oder 8
- Innenabmessungen (BxHxT): 14,5 x 6 x 37,5 cm


Art.-Nr. ME80030

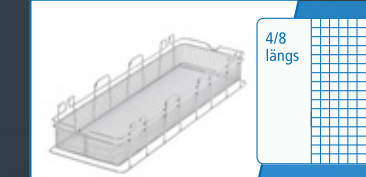

Flexkorb 4 (nur für MELAtherm® 20)

- Für liegende Instrumente, z. B. Scheren, Pinzetten, Spiegel, Wurzelheber
- Stapelbar auf Flexkorb 4 oder 8
- Innenabmessungen (BxHxT): 14,5 x 6 x 51 cm

Art.-Nr. ME20670

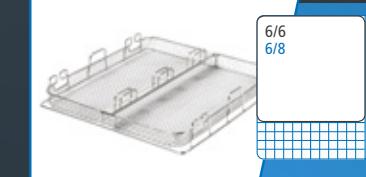

Flexkorb 6

- Für lange, liegende Instrumente (bis zu einer Länge von 40 cm), z. B. Scheren, Pinzetten, Zangen
- Als Basis unter den Flexkörben 1, 2, 3 und Flexkorb Spekula
- Innenabmessungen (BxHxT): 34 x 3 x 38 cm


Art.-Nr. ME80255



Flexkorb 8 (nur für MELAtherm® 20)

- Für lange, liegende Instrumente (bis zu einer Länge von 58 cm), z. B. Kanülen, Trokare
- Als Basis unter den Flexkörben 1, 2, 3, 4 und Flexkorb Spekula
- Innenabmessungen (BxHxT): 34 x 3 x 49,8 cm

Art.-Nr. ME80256

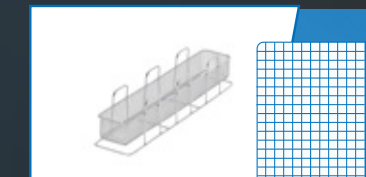


Ergänzungskorb Flex (nur für MELAtherm® 20)

- Für lange, liegende Instrumente und zur Aufnahme von Kleinteilebehälter Komfort und Standard
- Kann im Oberkorb sowie im Unterkorb des MELAtherm® 20 verwendet werden, sofern dort kein Injektorschiene-Modul eingesetzt ist.

- Innenabmessungen (BxHxT): 6,9 x 6 x 45,4 cm


Art.-Nr. ME80120

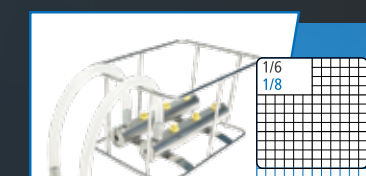

Injektorkorb Flex 1

- Zur Aufnahme von bis zu 6 Adaptern (MELAtherm® 10: nur Spitzenadapter, MELAtherm® 10 Evolution und MELAtherm® 20: alle Adapter)
- Für die Filterung ist entweder der Einsatz eines Zentralfiltersystems oder von zwei Einzelfiltergehäusen erforderlich.
- Im Lieferumfang sind die benötigten Schläuche und Schlauchanschlüsse enthalten.

Art.-Nr. ME80740

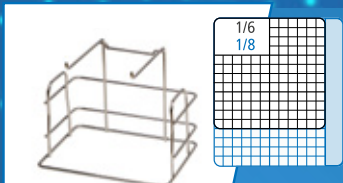

Einsatzgestell für Abdrucklöffel, Scheren und Klemmen

- Für bis zu 8 Abdrucklöffel aus dem Dentalbereich sowie für Scheren und Klemmen
- Die Scheren und Klemmen werden geöffnet an den Ringgriffen aufgehängt.
- Stapelbar auf Flexkorb 1, 2, 3, 4, 6 oder 8


Art.-Nr. ME80110



Flexkorb Spekula

- Für gynäkologische Spekula, z. B. bis zu 8 Kristeller- oder 16 Cusco- bzw. Semm-Spekula
- Stapelbar auf Flexkorb 6 oder 8


Art.-Nr. ME80410

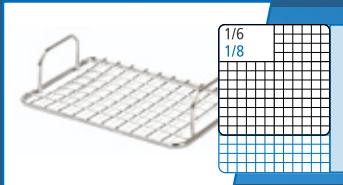

Aufsatz für Ohrtrichter Flex 1, Maschenweite 14 mm

- Für bis zu 50 Ohrtrichter
- Zum Aufsetzen auf die Flexkörbe 1, 2, 3 oder 4, auch als Deckel verwendbar
- Flexkörbe können mit diesen teilbestückt oder übergreifend verwendet werden (z. B. 3 Aufsätze auf Flexkorb 3).


Art.-Nr. ME80070

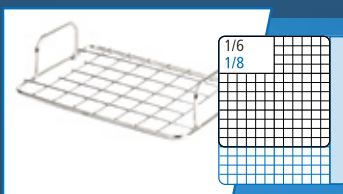

Aufsatz für Ohrtrichter Flex 1, Maschenweite 20 mm

- Für bis zu 24 Ohrtrichter
- Zum Aufsetzen auf die Flexkörbe 1, 2, 3 oder 4, auch als Deckel verwendbar
- Flexkörbe können mit diesen teilbestückt oder übergreifend verwendet werden (z. B. 2 Aufsätze auf Flexkorb 2).


Art.-Nr. ME80080

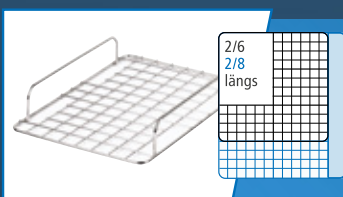

Aufsatz für Ohrtrichter Flex 2, Maschenweite 20 mm

- Für bis zu 60 Ohrtrichter
- Zum Aufsetzen auf die Flexkörbe 1, 2, 3 oder 4, auch als Deckel verwendbar
- Flexkörbe können mit diesen teilbestückt oder übergreifend verwendet werden (z. B. 1 Aufsatz auf 2x Flexkorb 1).


Art.-Nr. ME80090

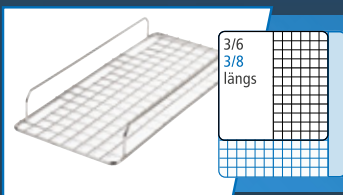

Aufsatz für Ohrtrichter Flex 3, Maschenweite 20 mm

- Für bis zu 96 Ohrtrichter
- Zum Aufsetzen auf die Flexkörbe 1, 2, 3 oder 4, auch als Deckel verwendbar
- Flexkörbe können mit diesen teilbestückt oder übergreifend verwendet werden (z. B. 1 Aufsatz auf Flexkorb 3).

Art.-Nr. ME80100

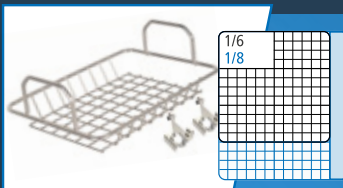

Aufsatz für Nasenspekula Flex 1 (inkl. 2 Halteklammern)

- Für selbstschließende Instrumente, z. B. Nasenspekula
- Verwendbar auf Flexkorb 1, 2, 3 und 4
- Zusätzliche Halteklammer, 2 Stk. (Art.-Nr.: ME80420)

Art.-Nr. ME80435



Instrumentenhalterung für Flexkörbe (12 Stück)

- Zum Einsetzen in das Drahtgewebe der Flexkörbe für eine sichere Fixierung der Instrumente

Art.-Nr. ME80390



Universal-Adapter (inkl. 3 Einsätzen und Keramik-Filterscheibe)

- Zur Aufbereitung von z. B. Übertragungsinstrumenten, Aufsätzen von Pulverstrahlgeräten
- Inkl. 3 Einsätzen: Grün (ø 16 mm), Blau (ø 20 mm) und Weiß (ø 22 mm)
- Aufschraubbar auf die Injektorschiene des Basiskorbs
- Die mitgelieferte Keramik-Filterscheibe wird nur benötigt, wenn kein Zentralfiltersystem verwendet wird.

Art.-Nr. ME73904



Instrumentenhalter für Universal-Adapter

- Zur zusätzlichen Fixierung von Instrumenten im Universal-Adapter
- Inkl. Haltering und 3 Silikonbänder

Art.-Nr. ME22968



Dreifachverteiler (inkl. Keramik-Filterscheibe)

- Für bis zu drei Injektordüsen, Luer / Luer-Lock Adapter oder Schlauchanschlüsse
- Die mitgelieferte Keramik-Filterscheibe wird nur benötigt, wenn kein Zentralfiltersystem verwendet wird.

Art.-Nr. ME73903



Dreifachverteiler (ohne Filterscheibe)

- Für bis zu drei Injektordüsen mit Klemmfeder, Luer / Luer-Lock Adapter oder Schlauchanschlüsse
- Zur Aufbereitung englumiger Hohlkörper wird dieser Dreifachverteiler mit der Injektorschiene mit Zentralfilter kombiniert

Art.-Nr. ME22611



Einzelfiltergehäuse (inkl. Keramik-Filterscheibe)

- In das Einzelfiltergehäuse können Hohlkörper-Adapter eingeschraubt werden, wenn die aufzubereitenden Instrumente mit gefiltertem Wasser gespült werden müssen.
- Wird kein Zentralfilter verwendet, kann der Injektorkorb Flex 1 (Art.-Nr. ME80740) mit zwei Einzelfiltergehäusen an die Injektorschiene angeschlossen werden.
- Die mitgelieferte Keramik-Filterscheibe wird nur benötigt, wenn kein Zentralfiltersystem verwendet wird.

Art.-Nr. ME73905



Distanzhülse

- Für die maximale Nutzung der Injektorschiene mit Universaladaptern, Dreifachverteilern, Zweifachverteilern und Einzelfiltergehäusen
- Werden mehr als 6 Universaladapter, Verteiler oder Einzelfiltergehäuse im MELAtherm® 10 bzw. mehr als 12 im MELAtherm® 20 verwendet, wird für jeden weiteren je eine Distanzhülse auf der Injektorschiene benötigt.

Art.-Nr. ME64375



Keramik-Filterscheibe (10 Stück)

- Verwendbar für Universal-Adapter, Dreifachverteiler und Einzelfiltergehäuse
- Jede Keramik-Filterscheibe ist für maximal 20 Zyklen einsetzbar.
- Die Keramik-Filterscheibe wird nur benötigt, wenn kein Zentralfiltersystem verwendet wird.

Art.-Nr. ME55120



Metall-Filterscheibe

- Verwendbar für Universal-Adapter, Dreifachverteiler und Einzelfiltergehäuse, wenn kein Zentralfiltersystem verwendet wird.
- Nach 20 Zyklen ist die Filterscheibe im Ultraschallbad aufzubereiten.
- Die Metall-Filterscheibe kann bis zu 20 mal im Ultraschallbad gereinigt werden.
- Metall-Filterscheibe ist nicht für Ophthalmologie zugelassen

Art.-Nr. ME80350



Spülhülse inkl. Verlängerung

- Für Hohlkörper-Instrumente mit Außendurchmesser von 2 – 11 mm und nicht genormtem Ansatz
- Instrumente bis zu einer Länge von 22 cm können mit der Spülhülse direkt auf der Injektorschiene aufbereitet werden.
- Inkl. Spülhülsen-Verlängerung und 5 Silikoneinsätzen

Art.-Nr. ME80260

Adapter für Ihre Hohlkörper-Instrumente

Adapter setzt die Verwendung eines Filtersystems voraus.

Filtersysteme für MELAtherm® 10: Entweder mit dem Basiskorb mit Injektorschiene und Zentralfilter (Art.-Nr. ME80440 bzw. ME84610) oder mit dem Basiskorb mit Injektorschiene (Art.-Nr. ME00197) und zusätzlichem Einzelfiltergehäuse (Art.-Nr. ME73905)

Filtersysteme für MELAtherm® 20: Es wird der reinigbare Zentralfilter Cleanfinity Pro (Art.-Nr. ME84650) oder alternativ das Einzelfiltergehäuse (Art.-Nr. ME73905) benötigt.

	Adapter für ISO-Kupplung (INTRA) Art.-Nr. ME80610
	Adapter für Sirona T1 Classic Art.-Nr. ME80620
	Adapter für Winkelstück-Köpfe KaVo / BienAir Art.-Nr. ME80630
	Adapter für Turbinen mit W&H-Kupplung (Roto Quick) Art.-Nr. ME80640
	Adapter für Turbinen mit Sirona-Kupplung Art.-Nr. ME80650
	Adapter für Turbinen mit KaVo-Kupplung (MULTiflex) Art.-Nr. ME80660
	Adapter für Turbinen NSK-Kupplung (Phatelus) Art.-Nr. ME80612
	Adapter für externe Spraykanäle • Zur Durchspülung externer Spraykanäle, z. B. von chirurgischen Handstücken • Zusätzlich ist ein Adapter für Hand- und Winkelstücke oder der Universaladapter erforderlich Art.-Nr. ME74135
	Injektordüse • Zur Aufbereitung von Hohlkörper-Instrumenten, z. B. chirurgische Absaugkanülen • Direkt aufschraubbar auf Injektorschiene, Dreifachverteiler oder Zweifachverteiler • Außendurchmesser: 4 mm • Zusätzliche Klemmfeder (Art.-Nr. ME00196) Art.-Nr. ME73860

Die sicherste Aufbereitung von dentalen ZEG-Spitzen

Der normkonformen Aufbereitung von Hohlkörper-Instrumenten wird eine immer wichtigere Bedeutung zugemessen. Mit dem Injektorkorb Flex 1 bietet MELAG die sicherste Lösung für die maschinelle Aufbereitung von ZEG-, Ultraschall- und Luftscaler-Spitzen. Der Korb ermöglicht die Aufnahme von 6 Spitzen mit Drehmomentschlüssel und benötigt hierfür nur zwei Anschlüsse auf der Injektorschiene. Bereiten Sie mit drei Injektorkörben Flex 1 bis zu 18 Spitzen pro Zyklus auf.

Verwendbar im MELAtherm® 10 mit dem Basiskorb mit Injektorschiene und Zentralfilter (Art.-Nr. ME84610 oder ME80440), Basiskorb mit Injektorschiene (Art.-Nr. ME00197) und zusätzlichem Einzelfiltergehäuse (Art.-Nr. ME73905) oder im MELAtherm® 20 mit dem Cleanfinity Pro (Art.-Nr. ME84650) und Injektorschienenmodul (Art.-Nr. ME80840)



	Adapter für Spitzen M3,0 x 0,5 mm, Außengewinde • z. B. für KaVo SONOsoft, Piezo LUX; EMS Piezon / Piezon LED; W&H Piezo Scaler; Tigon, Tigon+, Pyon 2 Chirurgie, Piezomed; Komet PiezoLine EM1, KA1, KA2; NSK Varios EMS; Mectron Multipiezo Art.-Nr. ME80750
	Adapter für Spitzen M3,0 x 0,35 mm, Außengewinde • z. B. für KaVo PiezoLED, PiezoSoft Art.-Nr. ME80752
	Adapter für Spitzen M3,0 x 0,6 mm, Außengewinde • z. B. für Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; Ultradent Newtron; Hu-Friedy Piezo S-Serie; NSK Varios Art.-Nr. ME80756
	Adapter für Spitzen M3,5 x 0,35 mm, Innengewinde • z. B. für Planmeca LM-ProPower Art.-Nr. ME80755
	Adapter für Spitzen M3,5 x 0,6 mm, Innengewinde • z. B. für Sirona SIROSON, SIROSONIC, PerioSonic; Komet PiezoLine SI1; Dürr Vector Scaler; Morita Softy / Softy LED Art.-Nr. ME80760
	Adapter für Spitzen M3,6 x PH1,5 P0,5 mm, Innengewinde • z. B. für KaVo SONICflex quick 2008 Art.-Nr. ME80751
	Adapter für Spitzen M3 x 0,5 mm, Innengewinde • z. B. für KaVo SONICflex 2000, 2003; Sirona SIROAIR L; W&H Luftscaler, Proxeo, Synea, Alegria; Komet SonicLine SF1LM; NSK Luftscaler Ti-Max S970, AS2000; EMS Piezon (LED) Handstück Art.-Nr. ME80790



Adapter für ZEG-Handstücke M3,0 x 0,35 mm, Innengewinde

- z. B. für KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler, PIEZOsoft Ultraschall Scaler

Art.-Nr. ME80753



Adapter für ZEG-Handstücke M3,0 x 0,6 mm, Innengewinde

- z. B. für Acteon (Satelec) Newtron, Suprasson; NSK Varios

Art.-Nr. ME80757



Adapter für ZEG-Handstücke M3,5 x 0,6 mm, Außengewinde

- z. B. für Sirona Siroson, Sirosonic, PerioSonic

Art.-Nr. ME80771



Adapter für EMS AIR-Flow Prophylaxis Master

- z. B. EMS EL-308 (Prophylaxis Master)

Art.-Nr. ME80614



Adapter für EMS AIR-Flow Handy 3.0

- z. B. EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS)

Art.-Nr. ME80613



Adapter für KaVo Multifunktionskanüle

- z. B. für KaVo 3-Funktionskanüle, KaVo Multifunktionskanüle

Art.-Nr. ME80803



Adapter für Sirona Sprayvit Düse

- z.B. für Sirona Sprayvit Düse

Art.-Nr. ME80802



Adapter für KaVo eSCALER Handstück

- z.B. für KaVo eSCALER Ultraschallscaler Handstück

Art.-Nr. ME12411



Adapter für NSK Prophy-Mate neo (Airflow)

- z. B. für NSK Prophy-Mate Neo Handstück

Art.-Nr. ME80616



Adapter für NSK Prophy HP (Varios Combi Pro [2])

- z. B. für NSK Prophy HP Handstück, NSK Perio HP Handstück

Art.-Nr. ME80617



Adapter für Dürr MyLunos Pulver Wasserstrahl Düse

- z.B. für Dürr MyLunos Pulver-Wasserstrahl-Düse

Art.-Nr. ME80804



Markierungsscheiben

- Durch die farbliche Markierung der Adapter kann verhindert werden, dass Instrumente auf falsche Adapter geschraubt und somit Gewinde beschädigt werden, Set besteht aus 6 grünen, 6 blauen und 6 gelben Markierungsscheiben.

Art.-Nr. ME80769



Verschlusschraube für Injektorschiene und Verteiler

- Zum Verschließen von nicht benötigten Öffnungen auf Injektorschiene, Dreifachverteiler oder Zweifachverteiler

Art.-Nr. ME80140



Adapter (männlich) für Luer

- Zur Aufbereitung von Instrumenten und Kanülen mit Luer-Anschluss (weiblich)
- Aufschraubbar auf Injektorschiene, Dreifachverteiler, Zweifachverteiler und / oder Einzelfiltergehäuse

Art.-Nr. ME73880



Adapter (männlich) für Luer-Lock

- Zur Aufbereitung von Instrumenten und Kanülen mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
- Aufschraubbar auf Injektorschiene, Dreifachverteiler, Zweifachverteiler und / oder Einzelfiltergehäuse

Art.-Nr. ME74130



Verschluss (weiblich) für Luer / Luer-Lock

- Zum Verschließen eines Adapter für Luer (Art.-Nr. ME73880) und Luer-Lock (Art.-Nr. ME74130)

Art.-Nr. ME80180



Adapter (weiblich) für Luer / Luer-Lock

- Zur Aufbereitung von Instrumenten und Kanülen mit Luer-Anschluss (männlich) bzw. Luer-Lock-Anschluss (männlich)
- Aufschraubbar auf Injektorschiene, Dreifachverteiler, Zweifachverteiler und / oder Einzelfiltergehäuse

Art.-Nr. ME67250



Verschluss (männlich) für Luer-Lock

- Zum Verschließen eines Adapter für Luer-Lock (Art.-Nr. ME67250)

Art.-Nr. ME80170



Schlauchanschluss mit Außengewinde

- Für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser, z. B. Silikonschlauch (Art.-Nr. ME80190)
- Aufschraubbar auf Injektorschiene, Dreifachverteiler, Zweifachverteiler und / oder Einzelfiltergehäuse

Art.-Nr. ME80150



Schlauchanschluss mit Innengewinde

- Für Schläuche mit 6 mm Innendurchmesser, z. B. Silikonschlauch (Art.-Nr. ME80190)
- Kombinierbar mit Adapter für Luer / Luer-Lock, Dreifachverteiler, Zweifachverteiler und Spülhülse

Art.-Nr. ME80160



Schlauchverlängerung mit Anschlüssen

- Zum Anschluss von Waschsystemen oder Verlegung der Adaptierung von Instrumenten in einen Flexkorb
- Schlauchlänge 0,5 m mit je einem Schlauchanschluss mit Innen- bzw. Außengewinde
- Aufschraubbar auf Injektorschiene, Dreifachverteiler, Zweifachverteiler oder Einzelfiltergehäuse

Art.-Nr. ME80195



Silikonschlauch, 10/6 mm

- Hochflexibler, knickfester Silikonschlauch zum Verbinden von Anschlüssen mit Instrumenten
- Es können auch Instrumente mit Schlauchanschluss eingeschoben werden. Schlauchlänge 2 m

Art.-Nr. ME80190

[illegible]

Gestalten Sie die MELatherm Serie mit einem individuellen Beladungsmuster passend zu Ihrem Instrumentenaufkommen und Ihren Arbeitsabläufen.



Weitere Komponenten und Zubehör für MELAtherm

So flexibel wie Ihr Bedarf.

Finden Sie das passende Zubehör für sich und Ihren MELAtherm. Mit unseren speziell entwickelten Lösungen heben Sie Ihre Instrumenten-Aufbereitung auf das nächste Level: Für mehr Sicherheit, maximale Effizienz und spürbaren Komfort.



MELAcontrol Wash-Check

Behalten Sie die Reinigungsleistung jederzeit im Blick: Der abgestimmte MELAcontrol Wash-Check ermöglicht die einfache, routinemäßige Überprüfung des Reinigungsergebnisses Ihrer Instrumente – im Basiskorb oder auf der Injektorschiene gemäß DIN EN ISO 15883-5.



Cleanfinity – Reinigbare Zentralfilter

Unsere reinigbaren Zentralfilter schützen nicht nur empfindliche Hohlkörper-Instrumente, sondern auch Ihr Budget und die Umwelt. Ob als Cleanfinity mit Reinigungsindikator im MELAtherm 10 oder als Cleanfinity Pro als selbstreinigender Zentralfilter im MELAtherm 20 – Cleanfinity ist die smarte Lösung für eine saubere Zukunft.



MELtherm Prozessmedien

Da stimmt die Chemie: Unsere MELtherm Prozessmedien – Reiniger, Neutralisator und Klarspüler – sind speziell für MELAtherm entwickelt. Das Ergebnis: kompromisslose Sauberkeit, optimale Trocknung und gleichzeitig ein minimaler Verbrauch. So verbinden Sie höchste Hygiene mit nachhaltiger Wirtschaftlichkeit.



MELAdem 53

Die Wasser-Aufbereitungs-Anlagen führen die Schluss-Spülung mit demineralisiertem Wasser zum Schutz und zur Pflege der Instrumente aus. Die leistungsfähige MELAdem 53 ermöglicht sogar den Anschluss weiterer Geräte im Aufbereitungsraum.



MELAstora

Steigern Sie die Effizienz und Qualität des Aufbereitungsprozesses: MELAstora Trays und MELAstora Boxen bieten durch Standardisierung eine bemerkenswerte Zeitersparnis und Reduktion des Praxisabfalls.



MELAG Regeneriersalz

Das hochreine Salz ist optimal auf die Enthärtungsanlage des MELAtherm abgestimmt. Die grobe Körnung sorgt für eine gleichmäßige Löslichkeit, schützt den Thermodesinfektor vor Kalkablagerungen und unterstützt eine dauerhaft effektive Reinigungsleistung.



Care Oil Spray

Mit dem vollsynthetischen Pflege-Öl für Übertragungs- und Gelenkinstrumente läuft alles wie geschmiert: Denn die gezielte Pflege nach der maschinellen Reinigung und Desinfektion schützt Ihre Instrumente, reduziert Verschleiß und beugt kostenintensive Reparaturen vor.



Technische Daten

Zahlen und Fakten auf einen Blick.

Die MELAG Thermodesinfektoren sind in den Anschluss-Varianten 400 Volt (Drehstrom, DTA) und 230 Volt (Wechselstrom, DTB) lieferbar. Wenn die Installationsvoraussetzungen den Anschluss an 400 Volt zulassen, ist die DTA-Variante wegen der deutlich kürzeren Betriebszeiten zu empfehlen.

Programme MELAtherm 20*		
	400 V	230 V
Universal	42 min	87 min
Universal+	56 min	97 min
Intensiv	59 min	105 min
Ophthalmol	59 min	110 min

Programme MELAtherm 10 Evolution*		
	400 V / DTA	230 V / DTB
Schnell	37 min	57 min
Universal	42 min	63 min
Intensiv	54 min	67 min
Ophthalmol	43 min	63 min

* Alle Programme plus passive Trocknung durch die automatische Türöffnung und Dampfkondensierung nach Programmende oder aktive Trocknung, die jederzeit abgebrochen werden kann.

	MELAtherm 20		MELAtherm 10 Evolution
	passiveDRY	activeDRY	activeDRY
Geräteabmessung (B × H × T)	59,8 × 81,8 (83,6**) × 73 cm Gerät passt unter eine 60 cm Arbeitsplatte		59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 cm Gerät passt unter eine 60 cm Arbeitsplatte
Waschkammer	160 Liter		84 Liter
Gewicht	74 kg (82 kg**)	78 kg (86 kg**)	80 kg (86 kg**) (106 kg mit Unterschrank)
Elektrischer Anschluss 400 V / DTA	3 N AC 318-415 V, 50 Hz, 3 × 16 A		3 N AC 400 V, 50 Hz, 3 × 16 A
Leistungsaufnahme 400 V / DTA	9,1 kW		10,2 kW
Elektrischer Anschluss 230 V / DTB	AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A		AC 220 –240 V, 50 Hz, 1 × 16 A
Leistungsaufnahme 230 V / DTB	2,9 kW		3,3 kW
Abmessung MELAdem® 53 / 53 C	Ø 24 × 57 cm (61,5 cm inkl. Anschlussbogen) / Ø 24 × 44,3 cm (48,8 cm)		

** Mit Abdeckplatte

Produkt	MELAtherm 20 passiveDRY 400 V	MELAtherm 20 activeDRY 400 V	MELAtherm 20 passiveDRY 230 V	MELAtherm 20 activeDRY 230 V	MELAtherm 10 Evolution activeDRY 400 V	MELAtherm 10 Evolution activeDRY 230 V
Art.-Nr.	ME20022A50	ME20022A50T	ME20022B50	ME20022B50T	ME20020	ME20021



Papier sparen, Umwelt schützen:

Um Papier zu reduzieren, stellen wir Ihnen die Benutzerdokumentation für unsere Produkte elektronisch in unserem Downloadcenter bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.melag.com

MELAG
competence in hygiene