

SECTIONAL MATRIX SYSTEM



Système de matrices sectionnelles

Le système de matrices sectionnelles Halo permet de créer rapidement des restaurations composites aux formes anatomiques.



Le système Halo vous permet d'obtenir des restaurations aux formes anatomiques afin de réduire le temps de mise en forme et la finition des restaurations. De plus; il crée des contacts interproximaux systématiquement serrés, aidant à garantir la longévité de la restauration.

La séparation maximale des dents est obtenue grâce à la force de l'anneau en Nitinol et au calage actif fourni par les coins interdentaires. Ce système de séparation vous permet de restaurer facilement une seule dent mais également des restaurations face à face.

La conception de l'extrémité de l'anneau Halo permet à la bande matrice de s'adapter complètement à la préparation de la limite gingivale à la crête marginale et l'aide à conserver sa forme même dans les larges préparations, vous aidant à obtenir des restaurations de formes anatomiques.



Le système de matrices sectionnelles Halo contient des anneaux en Nitinol, des bandes matrices en acier inoxydable et des coins interdentaires. Chaque élément est conçu pour fonctionner ensemble, pour la création de restaurations aux formes anatomiques cohérentes.



ANNEAUX EN NITINOL

- Le Nitinol super-élastique, maintient la force au fil des procédures et réduit la fatigue cyclique
- Les anneaux ont une durée de vie supérieure à 1000 utilisations
- Les extrémités en nylon renforcé à la fibre de verre ne cassent pas facilement, ne s'effondrent pas dans les restaurations et ne créent pas de sur-contours
- Le contour de l'anneau sécurise la bande matrice dans une position naturelle et anatomique, contribuant à éliminer les fuites et à réduire les finitions
- Design superposable permettant l'utilisation dans les cavités MOD et les autres restaurations de Classe II
- Offre une séparation idéale dans les cas de restaurations face à face



BANDES MATRICES

- Profil anatomique pour des contacts idéaux et parfaits
- Le rebord occlusal courbe au niveau de la crète marginale crée une embrasure occlusale idéale et réduit le temps de finition
- Logements pour la précelle pour une mise en place simplifiée
- La languette pliable permet une mise en place et un retrait faciles offrant une visibilité accrue
- Traitement de surface optionnel pour une identification rapide
- Les bandes matrices originales pour plus d'adaptabilité et le brunissage, alors que les bandes matrices rigides résistent à la déformation et sont idéales pour les espaces interproximaux serrés
- Les matrices originales et rigides sont en acier inoxydable ultra-fin de 0.038 mm



COINS INTERDENTAIRES

- La rigidité du coin crée un calage actif pour une meilleure séparation, tout en étant moins traumatisant pour les papilles
- La conception courbe rend les coins faciles à mettre en place et permet leur superposition si plusieurs coins sont nécessaires
- Les couleurs permettent l'identification rapide des tailles de coins interdentaires
- Centre incurve pour une adaptation anatomique de la matrice



PRESENTOIR CIRCULAIRE

- Permet de rester organisé avec un présentoir à la forme circulaire unique et simple d'utilisation
- Plus de renversement et de dispersion des bandes matrices et des coins interdentaires après une chute accidentelle, gain de temps et de frustration.
- Désinfection de surface simple et rapide













4831 HALO KIT - Bandes Originales

2 x anneaux universels

25 x Matrices originales 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm 1 x Précelle 25 x Coins de chaque taille Petit, Medium et

1 x Distributeur HALO

1 x Pince à anneaux

4832 HALO INTRO KIT - Bandes Originales

2 x anneaux universels

25 x Matrices originales 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm 25 x Coins de chaque taille Petit, Medium et Large 1 x Distributeur HALO

4833 HALO INTRO KIT - Bandes rigides anti adhésives

2 x anneaux universels

20 x Matrices rigides anti adhésives 3,5 mm,4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, e 7,5 mm 25 x Coins de chaque taille Petit, Medium et Large 1 x Distributeur HALO

4835 HALO MINI KIT - Bandes Originales

2 x anneaux universels

5 x Matrices originales 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm 5 x Coins de chaque taille Petit, Medium et Large

1 x Distributeur HALO

4834 HALO INTRO KIT - Bandes rigides

2 x anneaux universels

25 x Matrices rigides 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, and 7,5 mm 25 x Coins de chaque taille Petit, Medium et Large 1 x Distributeur HALO

Matrices Halo originales



Taille	50 unités	100 unités
3,5 mm	5448	5449
4,5 mm	5450	5451
5,5 mm	5452	5453
6,5 mm	5454	5455
7,5 mm	5456	5457

Coins interdentaires HALO

Taille	100 unités
Petit	5042
Medium	5043
Large	5044





3		
Taille	50 unités	100 unités
3,5 mm	5059	_
4,5 mm	5062	5063
5,5 mm	5064	5065
6,5 mm	5066	5067
7,5 mm	5068	_



Anneaux HALO

Taille	1 unité	2 unités
Universal	5008	5009

Matrices Halo rigides anti-adhésives



Taille	50 unités	100 unités	
3,5 mm	5049	_	
4,5 mm	5051	5052	
5,5 mm	5053	5054	
6,5 mm	5055	5056	
7,5 mm	5057	_	

5048 - Précelle HALO 1 unité



5047 - Pince à anneau HALO 1 unité



DISPOSITIF MÉDICAL pour soins dentaires, réservé aux professionnels de l'art dentaire. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Halo, destiné à une utilisation en cabinet médical uniquement, est un système de matrices séctionnelles utilisé pourla création de restaurations. Non remboursé. Classe 1, certifié TUV Nord, Ultradent Inc.

