

ViscoStat®, Astringedent®, Astringedent® X & ViscoStat Plus® koagulerende blodstillsmidsel

NO

Beskrivelser
ViscoStat® er et jernsaltskvæltende blodstillsmidsel med et ikke-reaktivt bindmiddel i et vannholdig bærmeridel. Det er skånsomt mot hørt og blevt og har en pH på om lag 10,0.

Astringedent blodstillsmidsel er en 15,5 % jernsaltskvæltende løsning i et vannholdig bærmeridel med en pH på om lag 10,0.

1.

ViscoStat® Plus er en 22,5 % jernkolofoldegel som er skånsomt mot alle typer og lett kan vaskes vekk.

Indikasjoner for bruk
Brukes til å stoppe forsiktig grader av blodløpninger i munnhulen, inkludert festa av tamponseter, gjennoppbygning og tannlegebehandling og kirurgiske innlegg i munnhulen, inkludert festa av tamponseter, gjennoppbygning og operasjoner og periodontal behandling. Astringedent eller ViscoStat kan også brukes for retrofillinger, tannhekk, gummifilering og sementer. Astringedent er tilheller der mer betydelig blodløpning og påkår og en ikke så mylt vett som ViscoStat og vanlig Astringedent, men den er mindre enn andre jernsaltskvæltende som MFRK. Fortynget Astringedent X er ikke jevnsett med ViscoStat eller Astringedent. ViscoStat Plus brukes ikke som testmedsel for pulpoterapi.

2.

Pakningstyper
ViscoStat®, Astringedent®, Astringedent® X og ViscoStat Plus® er tilgjengelig i 30 ml flasker^{2,3} for håndhelse.

3.

Flytter til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

4.

Fjerner luftet fra Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

5.

Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

6.

C. Trykk til Indi-Spense-stempel, samtidig som 1,2 ml spraytesstempel føres inn til ønsket oppfylling.

7.

D. Skill sprayde fra høyreende og sett tilbake hetten på Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

8.

E. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

9.

F. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

10.

G. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

11.

H. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

12.

I. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

13.

J. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

14.

K. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

15.

L. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

16.

M. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

17.

N. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

18.

O. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

19.

P. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

20.

Q. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

21.

R. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

22.

S. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

23.

T. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

24.

U. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

25.

V. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

26.

W. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

27.

X. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

28.

Y. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

29.

Z. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

30.

A. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

31.

B. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

32.

C. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

33.

D. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

34.

E. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

35.

F. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

36.

G. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

37.

H. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

38.

I. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

39.

J. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

40.

K. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

41.

L. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

42.

M. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

43.

N. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

44.

O. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

45.

P. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

46.

Q. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

47.

R. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

48.

S. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

49.

T. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

50.

U. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

51.

V. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

52.

W. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

53.

X. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

54.

Y. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

55.

Z. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

56.

A. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

57.

B. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

58.

C. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

59.

D. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

60.

E. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

61.

F. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

62.

G. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

63.

H. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

64.

I. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

65.

J. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

66.

K. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

67.

L. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

68.

M. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

69.

N. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

70.

O. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

71.

P. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

72.

Q. Fest til 1,2 ml sprayde til Indi-Spense-sprøyte^{2,4}

73.

R. Fest

