

NEW

2026年6月発売開始



UltraSeal XTTM hydroTM
Fluorescing Hydrophilic Pit and Fissure Sealant

enamelastTM
FLUORIDE VARNISH

PREVENT SOLUTION

小窩裂溝封鎖材 ウルトラシールXTハイドロ
知覚過敏抑制材 エナメラスト

UltraSeal XT™ hydro™

Fluorescing Hydrophilic Pit and Fissure Sealant



ウルトラシール XT ハイドロ 小窩裂溝封鎖材

NEW



- 硬化前は親水性、硬化後は疎水性になることで、塗布時の口腔環境にも幅広く対応
- 2種類のシェード（オパークホワイト・ナチュラル）
- ブラックライトを使用することで発光し、シーラント材の所在が確認可能


ウルトラシールXTハイドロは、フッ化物含有の光重合型シーラント材（X線不透過）です。53%フィラーを含み、重合収縮が少なく、耐摩耗性にも優れています。²インスパイラルブラシチップと併用することで、チキソトロピー特性を活かし、チップから押し出される際に粘性が下がり、小窩裂溝の深部まで浸透しやすくなります。また、親水性のため口腔内に残存する水分も、目視できる程度の水分が除去されていれば適切に機能するため小窩裂溝内に残りがちな湿気にも高い許容性があります。

シーラント材塗布例

Courtesy of Dr. Jaleena Fischer-Jessop.



塗布前

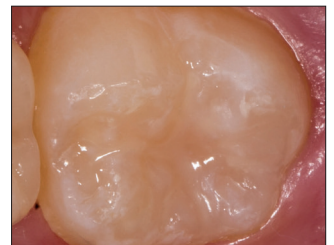

塗布後

マージン部分リテンションとマイクロリーケージ



マイクロリーケージは見受けられない



マージンのシーリング

製品の詳細はこちら ▶




使用方法動画 ▶



1. realityesthetics.com. 2. Data on file.

使用方法

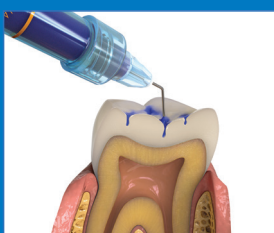

1. エッチングは切削されたエナメル質の場合15秒、切削されていないエナメル質の場合30秒行い、洗い流す。



2. 乾燥させる。




3. インスパイラルブラシチップをシリリングに装着し、ウルトラシールXTハイドロを塗布する。




4. 光重合を行う。VALOエックスを使用する場合はエキストラパワーモードを使用し3秒間光重合する。

Check!

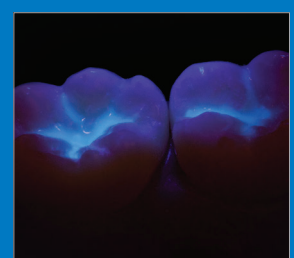


ブラックライトを用いて視認できるため、施術時、後日の来院時にもシーラントの塗布状況や残存状況を容易に確認できます。

製品使用前は必ず添付文書を熟読してください。

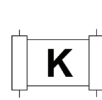

フッ化物バーニッシュ エナメラスト

知覚過敏抑制材

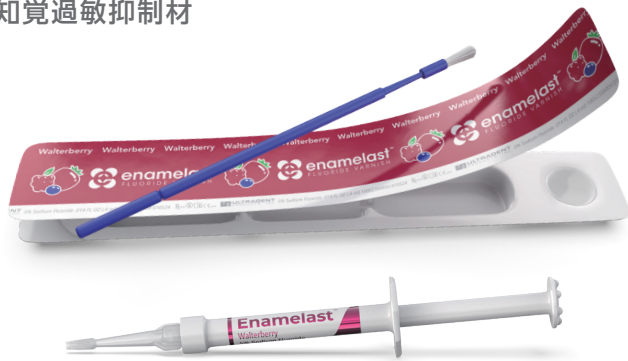

- フッ化ナトリウム5%
- 程よい粘性があり、付属のブラシ/チップを使用して簡単に塗布
- 選べるデリバリー方法
- ウォルターベリーフレーバー

エナメラスト塗布前と塗布後




エナメラスト塗布前



エナメラスト塗布後

象牙細管をシーリング

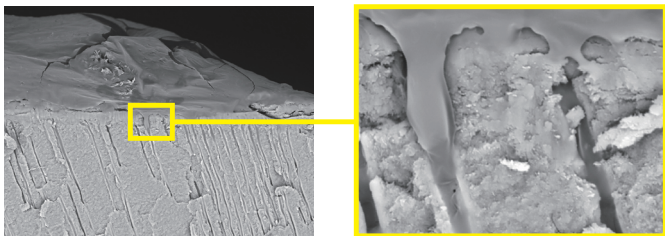

開口している象牙細管内にエナメラストが浸透することで細管をシーリングし、時間とともに細管内に結晶物を形成することで継続的な知覚過敏抑制も期待できます。

エナメラストの使用方法を動画で詳しく
見るができます。



ユニドースタイプ



口腔内
全体に



塗布する前に歯面全体を磨くか又はラバーカップで研磨して、必要に応じて、ガーゼで歯面を拭き取ります。口腔内を軽く乾燥させておきます。



パッケージ開封後、付属のブラシで軽く薬材をかき混ぜます。



付属のブラシを使用して、エナメラストを薄く塗布します。
*付属のブラシは屈曲可能です。




塗布後は、ゆっくりと口を閉じてもらい、数分間は塗布部位を舐めたりしないようにします。

シリンジタイプ



局所的に

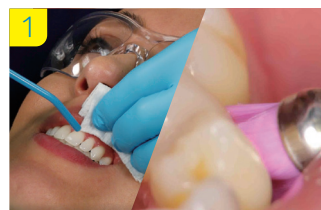

塗布する前に歯面全体を磨くか又はラバーカップで研磨して、必要に応じて、ガーゼで歯面を拭き取ります。口腔内を軽く乾燥させておきます。



シリンジからルアーロックキャップを取り外し、ソフトイーズチップ(付属品)を緩みのないようにシリンジに取り付けます。



患部に薄くむらなく塗布します。




塗布部位は、数分間舌で舐めたりしないようにします。

Product information



知覚過敏抑制材

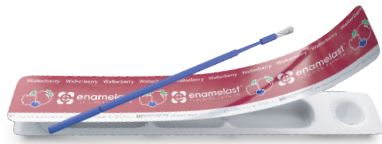

4518-JP エナメラスト ウォルターベリー ユニドースタイプ 50個

50個 x 0.4 mL ユニドース
50枚 x 患者説明カード



4521-JP エナメラスト ウォルターベリーキット

2本 x 1.2 mL エナメラストウォルターベリーシリンジ
4個 x ソフトイーズチップ



4712 ソフトイーズチップ

50個 x ソフトイーズチップ

販売名:エナメラスト / 一般的名称:歯科用知覚過敏抑制材料 / 管理医療機器 / 医療機器認証番号:302AKBZX00040000 / 常温保存
販売名:ソフトイーズチップ / 一般的名称:歯科用注入器具 / 一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X10086000073

UltraSeal XTTM hydroTM

Fluorescing Hydrophilic Pit and Fissure Sealant

小窩裂溝封鎖材



シェード	製品番号
オペークホワイト	3532
ナチュラル	3533

ウルトラシールXTハイドロキット

1 x 1.2 ml (2.01 g) ウルトラシールXTハイドロ
1 x 1.2 ml (1.584 g) ウルトラエッチJ
20 x ブルーマイクロチップ
20 x インスパイラルブラシチップ

販売名:ウルトラシールXTハイドロ / 一般的名称:高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 / 管理医療機器 / 医療機器認証番号:307AKBZX00086000 / 常温保存

シーラント材の重合は



5973-JP VALO Xキット

ハンドピース × 1台
アクセサリレンズ × 5個
※現時点でのアクセサリレンズ単品販売はございません
VALO X 専用 リチウムイオン二次電池 × 2個
充電器本体 × 1個
ACアダプター × 1個
本体電源コネクター × 1個
ブラケット × 1個
ライトシールド × 1個
バリアスリーブサンプルパック × 1個

販売名: VALO エックス / 一般的名称: 歯科重合用光照射器 / 一般医療機器 / 特定保守管理医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X10086000076

ULTRADENT JAPAN 株式会社

0120-060-751 | www.ultradent.jp

本社 〒151-0061 東京都渋谷区初台1-34-14 初台TNビル3F TEL(03)5365-1760 FAX(03)5365-1759
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル4F TEL(06)6151-3251 FAX(06)6151-3252
第一種医療機器製造販売業 許可番号:13B1X10086 ©2026 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

2026.05

