



ZAHNAUFHELLUNG



PROPHYLAXE UND HYGIENE



ZAHNAUFHELLUNG PROPHYLAXE UND HYGIENE



ZAHNAUFHELLUNG

ZAHNAUFHELLUNG MIT OPALESCENCE™ ÜBERSICHT

PRODUKTBEZEICHNUNG	INHALT	ANWENDUNGSGEBIETE
--------------------	--------	-------------------

Kosmetische Zahnaufhellung



Opalescence™ PF 10 %	Kaliumnitrat, Fluorid und Xylitol	KOSMETISCH, FÜR ZUHAUSE Für Patienten mit bestehender Zahnpflichtigkeit; kann tagsüber oder nachts getragen werden
Opalescence™ PF 16 %	Kaliumnitrat, Fluorid und Xylitol	KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE Schnellere Zahnaufhellung; kann tagsüber getragen werden
Opalescence Go™ 6 %	Kaliumnitrat, Fluorid und Xylitol	KOSMETISCH, FÜR ZU HAUSE Jederzeit gebrauchsfertig, eine Alternative zu frei verkäuflichen Produkten

Medizinische Zahnaufhellung*



Opalescence™ Quick PF 45 %	Kaliumnitrat, Fluorid und Xylitol	MEDIZINISCH, VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT Unter Aufsicht in der Praxis durchgeführte Aufhellung von dunklen, intern verfärbten Zähnen
Opalescence™ Endo	—	MEDIZINISCH, VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT Interne Aufhellung endodontisch behandelter, devitaler Zähne
Opalescence™ Boost™ 40 %	Kaliumnitrat und Fluorid	MEDIZINISCH, VOM ZAHNARZT ÜBERWACHT Schnelle Chairside-Behandlung

Andere Behandlungen



Opalustre™ Mikroabrasionspaste	—	VOM ZAHNARZT DURCHFÜHRT Chairside-Behandlung zur Entfernung oberflächliche Schmelzfehler
UltraEZ™ Desensibilisierungsgel	Kaliumnitrat und Fluorid	FÜR ZUHAUSE Behandlung von Überempfindlichkeitsreaktionen

Hinweis: Um anhand der angegebenen Carbamidperoxid-Konzentration die entsprechende Wasserstoffperoxid-Konzentration zu ermitteln, den Carbamidperoxid-Wert durch drei teilen. Eine Carbamidperoxid-Konzentration von 45 % entspricht beispielsweise einer Wasserstoffperoxid-Konzentration von etwa 15 %. Dies sollte beachtet werden, um die Intensität eines Zahnaufhellungspräparats korrekt einordnen zu können.

GESCHMACKS- RICHTUNGEN	TRAGEZEIT	AKTIVER BESTANDTEIL	Wasserstoffperoxid vs. Carbamidperoxid-Konzentrationen
---------------------------	-----------	---------------------	---

10 % Mint 10 % Melone 10 % Neutral	8–10 Stunden/Tag	10 % Carbamidperoxid	~ 3 % 10 % Carbamidperoxid
16 % Mint 16 % Melone 16 % Neutral	4–6 Stunden/Tag	16 % Carbamidperoxid	~ 5,8 % Wasserstoffperoxid 16 % Carbamidperoxid
6 % Mint 6 % Melone	60–90 Minuten/Tag	6 % Wasserstoffperoxid	6 % Wasserstoffperoxid

45 % Mint	15–30 Minuten/Tag	45 % Carbamidperoxid	~ 15 % Wasserstoffperoxid 45 % Carbamidperoxid
—	1–5 Tage pro Behandlung	35 % Wasserstoffperoxid	35 % Wasserstoffperoxid
—	Zwei bis drei 20-minütige Anwendungen Pro Termin NICHT mehr als dreimal applizieren	40 % Wasserstoffperoxid	40 % Wasserstoff- peroxid

—	Praxistermin	6,6 % Salzsäure Siliziumkarbid
—	15–60 Minuten/Tag	3 % Kaliumnitrat und 0,25 % neutrales NaF

*In einigen Ländern der Europäischen Union sind keine Medizinprodukte zur Zahnaufhellung erhältlich. Fragen Sie bitte bei Ihrem Dentalhändler nach.

DIE GESCHICHTE DER OPALESCE™ ZAHNAUFHELLUNG



DER MARKTFÜHRER IM BEREICH ZAHNAUFHELLUNG – SEIT MEHR ALS 35 JAHREN

Es begann mit einem einzigen Lächeln:

„Papa, ich möchte unbedingt weißere Zähne haben!“

Den Impuls für die Entwicklung der später als Opalescence™ bekannten Zahnaufhellungsprodukte gab Jaleena, die jüngste Tochter von Dr. Fischer. Als 14-jähriger Teenager äußerte sie den Wunsch nach weißeren Zähnen und einem strahlenderen Lächeln. Sie schnitt fleißig Werbeanzeigen aus zahnmedizinischen Fachzeitschriften aus und übergab diese, versehen mit handschriftlichen Bemerkungen, an ihren Vater.

Daraufhin arbeitete Dr. Fischer unermüdlich an der optimalen Entwicklung seiner Zahnaufhellungsprodukte. Sein Ziel war, eine klebrige und visköse Konsistenz herzustellen, um das Herausfließen des Gels aus der Schiene auf das Weichgewebe zu verhindern. Die kontinuierliche Freisetzung von Peroxid sollte Pate für einwandfreie Ergebnisse stehen. Darüber hinaus sollten die Schienen weich, dünn und anatomisch

geformt sein, um eine optimale Gelmenge mit den Zähnen in Kontakt zu bringen - über die gesamte Behandlungszeit hinweg.

1990 war es endlich soweit. Dr. Fischer überreichte Jaleena eine Schiene mit dem neuen Opalescence™ Zahnaufhellungsgel (10% Carbamidperoxid) und bat sie, diese über Nacht zu tragen. Am nächsten Morgen entnahmen Jaleena und ihr Vater gemeinsam die Schiene aus dem Mund. Die beiden waren begeistert, denn Jaleenas Zahnfarbe hatte sich in nur einer Nacht von einer A3 in eine A1 verwandelt.

Seither sind mehr als 35 Jahre vergangen und die Familie der Opalescence™ Zahnaufhellungsprodukte ist zu einem umfassenden Sortiment angewachsen. Opalescence gilt heute als Marktführer im Bereich der Zahnaufhellung und hat bereits Millionen Menschen zu einem strahlenden Lächeln, einem gesteigerten Selbstvertrauen und einer verbesserten Lebensqualität verholfen. Auch Ihre Patienten werden begeistert sein!

KOSMETISCHE ZAHNAUFHELLUNG FÜR ZU HAUSE

MIT OPALESCENCE™ PF

KOSMETISCHE ZAHNAUFHELLUNG MIT INDIVIDUELLEN SCHIENEN

10 % und 16 % Carbamidperoxid
mit Kaliumnitrat und Fluorid



Bestes kosmetisches
Zahnaufhellungssystem
für zu Hause

Opalescence™ PF Zahnaufhellungsgel eignet sich für die professionelle Zahnaufhellung zu Hause. Das Gel ist in den Geschmacksrichtungen Mint, Melone und Regular erhältlich und wird mit Hilfe von individuellen Schienen angewendet. Diese passen sich dem einzigartigen Lächeln jedes Patienten optimal an. Opalescence™ PF Zahnaufhellungsgele enthalten PF (Kaliumnitrat und Fluorid). Die Formulierung auf Wasserbasis beugt Dehydrierung und Farbrückfällen vor.

Opalescence™ PF steht in zwei Konzentrationen, mit 10 % oder 16 % Carbamidperoxid, zur Verfügung. So bietet Opalescence™ PF, abhängig von Behandlungsziel, Tragedauer (über Nacht oder 4–6 Stunden) bzw. Empfindlichkeit der Zähne, jederzeit eine passende Lösung. Nach der ersten Anwendung in der Zahnarztpraxis können die Aufhellungsschienen ganz bequem zu Hause getragen werden.

Anwendung*



Einen fortlaufenden Gelstrang (1/3 - 1/2 Spritze) in halber Höhe ab Schneidekante auf die Vestibulärfläche der Schiene legen.



Die Schiene über die Zähne legen und vorsichtig andrücken, damit das Gel richtig verteilt wird. Bei zu festem Druck tritt das Gel aus der Schiene aus.



Überschüssiges Gel mit einer weichen Zahnbürste entfernen.
Tragezeiten: 8–10 Stunden (10 %) bzw. 4–6 Stunden (16 %).



Nach der empfohlenen Tragezeit: Zähne putzen und die Schiene mit einer weichen Zahnbürste und Wasser reinigen.

Klinische Anwendung



Vor der Zahnaufhellung.



Nach der Anwendung von Opalescence PF 16 %. Behandlungsdauer: 8 Tage à 3 Stunden.



Vor der Zahnaufhellung.



Oberkieferzähne nach 5 Nächten (etwa 40 Stunden Behandlungszeit).

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

KOSMETISCHE ZAHNAUFHELLUNG FÜR ZU HAUSE

MIT OPALESCENCE GO™

KOSMETISCHE ZAHNAUFHELLUNG MIT VORGEFÜLLTEN ULTRAFIT TRAYS

6 % Wasserstoffperoxid
mit Kaliumnitrat und Fluorid



Mit **Opalescence Go™** wird die Zahnaufhellung noch flexibler und angenehmer. Die vorgefüllten, gebrauchsfertigen UltraFit™ Trays werden nach nur 10 Minuten Tragezeit weich und passen sich dem Zahnbogen optimal an. Dies gewährleistet einen angenehmen, effektiven Sitz – wie mit individuellen Schienen. Die UltraFit™ Trays reichen von Molar zu Molar. Daher kommt das Gel auch mit den Seitenzähnen optimal in Kontakt. Das Opalescence Go™ Zahnaufhellungsgel mit 6 % Wasserstoffperoxid (60–90 Minuten Tragezeit)

ist in den erfrischenden Geschmacksrichtungen Mint und Melone erhältlich. Opalescence Go™ enthält PF (Kaliumnitrat und Fluorid). Die Formulierung auf Wasserbasis beugt Dehydrierung und Farbrückfällen vor. Nach der ersten Anwendung in der Zahnarztpraxis können die Aufhellungsschienen ganz bequem zu Hause getragen werden.



UltraFit Tray vor der Anwendung.



UltraFit Tray nach 10 Minuten Tragezeit im Mund.

Anwendung*



Produkt aus der Verpackung nehmen (U = OK-Tray, L = UK-Tray).



Das OK-Tray auf den Zähnen positionieren.



Fest zubeißen und die Schiene 2 Sekunden ansaugen.



Das farbige äußere Tray entfernen und das weiße innere Tray auf den Zähnen belassen. Den Vorgang für das UK-Tray wiederholen.



Nach der angegebenen Tragezeit: Trays entnehmen und Zähne putzen.

Klinische Anwendung



Vor der Zahnaufhellung.



Nach der Anwendung von Opalescence Go. Behandlungsdauer: 6 Tage à 90 Minuten.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG IN DER PRAXIS MIT OPALESCENCE™ ENDO

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG VON DEVITALEN ZÄHNEN NACH DER „WALKING-BLEACH“-TECHNIK 35 % Wasserstoffperoxid



Opalescence™ Endo Zahnaufhellungsgel eignet sich zur Aufhellung endodontisch behandelter, durch Erkrankung, Verletzung oder medizinische Behandlung verfärbte Zähne, mit Hilfe der „Walking-Bleach“-Technik. Opalescence™ Endo wird in die Pulpakammer appliziert. Anschließend erfolgt ein

Verschluss mit provisorischem Zement (ein bis fünf Tage).

In einigen Ländern der Europäischen Union sind keine Medizinprodukte für die Zahnaufhellung erhältlich.
Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

Anwendung*

PROVISORISCHE RESTAURATION: „Walking-Bleach“-Technik

HINWEIS: Achten Sie darauf, das Zahnaufhellungsgel nicht an die Ränder zu drücken, da dies die provisorische Versiegelung beeinträchtigen könnte.

J-Temp™

LICHTHÄRTENDES PROVISORISCHES
RESTAURATIONS-MATERIAL



1. Pulpakammer gemäß Gebrauchsanweisung beurteilen, präparieren und versiegeln.



2. Pulpakammer mit Zahnaufhellungsgel füllen, dabei 3 – 5 mm Platz für das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp lassen (keine Barriere zwischen Zahnaufhellungsgel und J-Temp erforderlich).



3. Das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp schrittweise in Schichten von 2 – 3 mm applizieren.



4. Zwischen den Schichten lichthärten.



5. Das provisorische Restaurationsmaterial J-Temp kann leicht entfernt und vor jeder weiteren Zahnaufhellung erneut appliziert werden.

Klinische Anwendung



Vor der Zahnaufhellung.



Nach der Zahnaufhellung.



Vor der Zahnaufhellung.



Nach der Zahnaufhellung.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG IN DER PRAXIS

MIT OPALESCENCE™ BOOST™

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG AM BEHANDLUNGSSTUHL

40 % Wasserstoffperoxid
mit Kaliumnitrat und Fluorid



Opalescence™ Boost™ Zahnaufhellungsgel wird für die medizinische Zahnaufhellung in der Praxis verwendet. Es bietet eine alternative, konservative Methode zur Behandlung dunkler, interner Verfärbungen als Folge von Erkrankungen, Verletzungen oder medizinischer Behandlung (z. B. durch angeborene, systemische, metabolische, pharmakologische, traumatische oder iatrogene Faktoren, wie Verfärbungen bei Dentalfuriose, erhöhtes Bilirubin, Tetrazyklin und Minozyklin bei Erwachsenen, Porphyrie, Trauma und fetale

Erythroblastose). Opalescence™ Boost™ sorgt für eine sehr gezielte und effektive Behandlung von Verfärbungen.

In einigen Ländern der Europäischen Union sind keine Medizinprodukte für die Zahnaufhellung erhältlich.
Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.


WICHTIGER HINWEIS:

Nach dem Anmischen ist Opalescence Boost Zahnaufhellungsgel gekühlt 10 Tage lang verwendungsfähig.

WARNUNG:

Anwender, Praxisteams und Patienten müssen während des Mischens und Applizierens von Opalescence Boost in der Praxis eine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.


Anwendung*

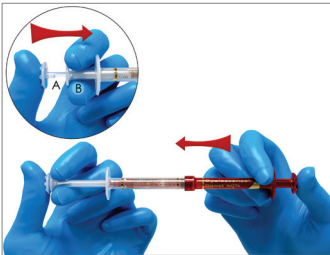

Überprüfen, ob die Spritzen fest miteinander verschraubt sind. Den kleinen durchsichtigen Kolben (A) in die mittlere kleine durchsichtige Spritze (B) drücken, um die innere Membran zu durchbrechen und Aufhellungswirkstoff und Aktivator zu kombinieren. Den Kolben der roten Spritze in die größere durchsichtige Spritze drücken.



Den Inhalt der durchsichtigen Spritze zurück in die rote Spritze drücken. Um die Inhalte gründlich und schnell zu mischen, die Kolben kontinuierlich mit den Daumen hin und her drücken und mindestens 50 Mal (25 Mal pro Seite) schnell mischen.

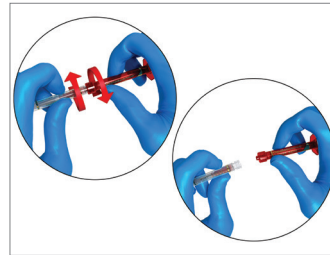

Das gesamte gemischte Gel in die ROTE Spritze drücken, und die beiden Spritzen trennen.



Den Black Mini™ Tip auf die rote Spritze schrauben. Materialfluss vor der intra-oralen Applikation auf einem Tupfer oder einem Mischblock prüfen. Bei Widerstand den Tip austauschen und den Fluss erneut prüfen.

Klinische Anwendung



Vor der Zahnaufhellung.



Nach der Zahnaufhellung.



Vor der Zahnaufhellung.



Nach 4 Behandlungen à 20 Minuten.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG IN DER PRAXIS

MIT OPALESCENCE™ BOOST™

Vorher und nachher



1. Vor der Zahnaufhellung mit Opalescence Boost. 20-jähriger Mann mit Verfärbung auf Zahn 21 (opaker, bräunlicher Fleck in der Mitte der Fazialfläche). Behandlungsbeginn: Nach abgeschlossener kieferorthopädischer Behandlung.



2. Das Gel pro Anwendung 20 Minuten lang auf den Zähnen belassen.



3. Nach 2 Opalescence Boost Behandlungen à 20 Minuten.

OPALDAM™ UND OPALDAM™ GREEN

Lichthärtende Abdeckungs-Kunststoffe



OpalDam™ ist ein lichthärtender, passiv adhäsiver (versiegelnder) Kunststoffbarriere auf Methacrylatbasis. Sie dient zur Isolation von Weichgewebe, welches an aufzuhellende Zähne angrenzt. Bei der Aufhellung einzelner Zähne kann OpalDam™ zum Schutz benachbarter Zähne verwendet werden. Die Kunststoffbarriere

ist lichtreflektierend. Damit werden Hitzeentwicklung und Gewebeermpfindlichkeit während der Aushärtung minimiert. Die OpalDam™ Green Kunststoffbarriere gewährleistet jederzeit eine sichere, kontrastreiche Abdeckung.

Anwendung*



1. OpalDam Kunststoffbarriere bis zu etwa einer Höhe von 5 – 10 mm auftragen. Zur Abdichtung sollte der Kunststoff etwa 2-3 mm auf den trockenen Schmelz überlappen und sich einen Zahn, über den letzten aufzuhellenden Zahn hinaus, erstrecken. 20 Sekunden in einer gleichmäßigen Bewegung lichthärten.

2. Ausgehärteten Kunststoff in einem oder mehreren großen Stücken entfernen. Approximalräume auf Kunststoffreste überprüfen. Einfache Entfernung aus Zahnzwischenräumen und Unterschnitten.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG IN DER PRAXIS MIT OPALESCENCE™ QUICK

MEDIZINISCHE ZAHNAUFHELLUNG MIT INDIVIDUELLEN SCHIENEN

45 % Carbamidperoxid
mit Kaliumnitrat und Fluorid



Opalescence™ Quick Zahnaufhellungsgel ist für die medizinische Zahnaufhellung in der Praxis bestimmt. Es wird unter zahnärztlicher Aufsicht in der kontrollierten Umgebung des Empfangs-/Wartebereichs und mit Hilfe von individuell angepassten, anatomisch geformten Schienen, angewendet. Die Behandlungszeit beträgt 15–30 Minuten bzw. je nach Ermessen des Zahnarztes länger. Opalescence™ Quick bietet eine alternative, konservative Methode zur Behandlung dunkler, interner Verfärbungen als Folge von Erkrankungen, Verletzungen

oder medizinischer Behandlung (z. B. durch angeborene, systemische, metabolische, pharmakologische, traumatische oder iatrogene Faktoren, wie Verfärbungen bei Dentalfluorose, erhöhtes Bilirubin, Tetracyclin und Minozyclin bei Erwachsenen, Porphyrie, Trauma und fetale Erythroblastose).

In einigen Ländern der Europäischen Union sind keine Medizinprodukte für die Zahnaufhellung erhältlich.
Bitte fragen Sie Ihren Dentalhändler.

Anwendung*



Einen fortlaufenden Gelstrang (1/3 - 1/2 Spritze) in halber Höhe ab Schneidekante auf die Vestibulärfläche der Schiene legen



Die Schiene über die Zähne legen und vorsichtig andrücken, damit das Gel richtig verteilt wird. Bei zu festem Druck tritt das Gel aus der Schiene aus.



Überschüssiges Gel mit einer weichen Zahnbürste entfernen.



Die Schiene 15–30 Minuten im Wartezimmer tragen.

Klinische Anwendung



Vorher: Die Zähne mit Dentinogenesis imperfecta haben ein graues Aussehen.



Nach 4 Sitzungen mit Opalescence Quick Zahnaufhellung sind die Zähne deutlich heller.



Vorher: Schwere Tetracyclin-Fälle erfordern eine längere Behandlung.



Nach einem halben Jahr und etwa 18 Sitzungen.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

SPEZIELLE ZAHNAUFHELLUNG IN DER PRAXIS

MIT OPALUSTRE™

SPEZIELLE ZAHNAUFHELLUNG MIT CHEMISCHER UND MECHANISCHER ABRASIONSPASTE

6,6 % Salzsäure-Abrasionspaste




Opalustre™ Paste mit 6,6 % Salzsäure enthält Silizium-carbidpartikel zur chemischen Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbilds. Die Mikroabrasion sorgt für eine minimal-invasive, dauerhafte Entfernung von oberflächlichen Schmelzfehlern, leichter Fluorose oder Demineralisation. In einer Behandlung können herausragende Ergebnisse erzielt werden. Opalustre™ Paste verfügt über eine optimale

Viskosität für eine präzise Abrasion. Durch die aktive Behandlung behält der Zahnarzt die direkte Kontrolle. Opalustre™ Paste wird mit OpalCups™ Kelchen verwendet, um Spritzer zu reduzieren und die Paste effizient in die betroffenen Bereiche einzuarbeiten. Nach der Anwendung von Opalustre™ wird eine Fluoridbehandlung empfohlen.

Anwendung*



Vorher.

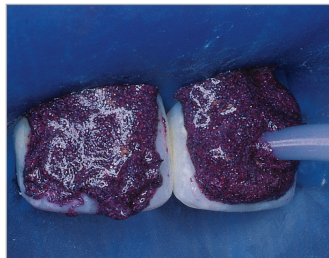

Nach dem Legen des Kofferdams wird die Opalustre Paste mit der Spritze appliziert.



Opalustre Paste wird mit OpalCups Bürstenkelchen und mittlerem bis starkem Druck eingearbeitet. Paste absaugen, spülen, beurteilen und bei Bedarf wiederholen. Abschließend mit OpalCups Finierkelchen polieren.



Nach der Mikroabrasion des Schmelzes und 21 Tagen Zahnaufhellung mit Opalescence.

Klinische Anwendung



Leichte bis mäßige Dekalzifikationen durch eine kieferorthopädische Behandlung lassen sich mittels weniger Anwendungen Opalustre Paste beseitigen oder deutlich reduzieren. Applikation mit OpalCups Bürstenkelch, 10:1 Untersetzungswinkelstück und festem Druck.



Diese Schmelz-Dekalzifikation wurde mit Opalustre Paste unter Verwendung eines OpalCups Bürstenkelches und eines 10:1 Untersetzungswinkelstücks mit festem Druck behandelt.



*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

NACHSORGE

MIT ULTRAEZ™ DESENSIBILISIERUNGSGEL

DESENSIBILISIERUNGSGEL

3 % Kaliumnitrat mit Fluorid
(0,25 % neutrales NaF)



UltraEZ™ ist ein Desensibilisierungsgel mit 3 % Kaliumnitrat und Fluorid (0,25 % neutrales NaF). Es gewährleistet eine nachhaltige Wirkstoffabgabe und bleibt durch seine klebrige, visköse Konsistenz sicher in Schienen und auf Zähnen. Dank seiner sofortigen desensibilisierenden Wirkung eignet sich UltraEZ™ zur schnellen Behandlung

von Empfindlichkeiten durch Zahnaufhellung, freiliegende Zahnhälse und chemische bzw. thermische Einflüsse. UltraEZ™ ist in Spritzenform oder in innovativen, vorgefüllten UltraFit™ Trays erhältlich. Die UltraEZ™ Behandlung wird vom Zahnarzt in der Praxis durchgeführt. Alternativ eignet es sich für die Anwendung zu Hause.

Anwendung mit vorgefüllten Trays*



Das OK-Tray auf den Zähnen positionieren.



Fest zubeißen und Schiene 2 Sekunden ansaugen.



Farbiges, äußeres Tray entfernen. Weißes, inneres Tray auf den Zähnen lassen. Vorgang mit dem UK-Tray wiederholen.



Nach der angegebenen Tragezeit weiße, innere Trays herausnehmen und Zähne putzen.

Anwendung mit Spritzen*



Einen fortlaufenden Gelstrang (1/3 - 1/2 Spritze) in halber Höhe ab Schneidekante auf die Vestibulärfläche der Schiene legen.



Die Schiene über die Zähne legen und vorsichtig andrücken, damit das Gel richtig verteilt wird. Bei zu festem Druck tritt das Gel aus der Schiene aus.



15 Minuten bis 1 Stunde pro Tag tragen.



Nach der empfohlenen Tragezeit Zähne putzen und Schiene mit einer weichen Zahnbürste und Wasser reinigen.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com.

NACHSORGE

MIT OPALESCENCE™ ZAHNCREME

ZAHNCREME

Original und für empfindliche Zähne



Opalescence™ ist weltweit führend auf dem Gebiet der professionellen Zahnaufhellung.⁶ Zu dieser Produktfamilie gehört die Opalescence™ Zahncreme⁷, die von einem Zahnarzt entwickelt wurde. Sie entfernt aktiv oberflächliche Verfärbungen² und ist dank ihrer einzigartigen Mischung aus drei Kieselsäuren sanft genug, um täglich⁵ verwendet zu werden.

- Entfernt oberflächliche Verfärbungen, um Zähne bei täglicher Anwendung in nur 2 Wochen um 2 Farbtöne heller zu machen²
- Enthält hydratisierte Kieselsäure, die nachweislich Verfärbungen beseitigt¹
- Sanft zum Zahnfleisch¹
- Sicher für die langfristige tägliche Anwendung
- Enthält Natriumfluorid zum Kariesschutz und zur Stärkung des Zahnschmelzes³
- Außergewöhnliche Fluoridaufnahme⁴
- 78 RDA⁵
- Triclosan- und TiO_2 -freie Formel
- Vegan – ohne Verwendung tierischer Inhaltsstoffe
- Drei Arten exotischer Minze werden zu einem reinen, frischem und kühlen Geschmack vermischt
- Gesüßt mit Xylitol, was das Risiko von Karies reduzieren kann
- Unsere Formel für empfindliche Zähne hat alle Vorteile des Originals, mit dem zusätzlichen Vorteil der maximalen Kraft von 5 % Kaliumnitrat

VORHER UND NACHHER



Ergebnisse bereits innerhalb
von nur einer Woche¹

1. Çakmakçioğlu O, Yılmaz P, Topbaşı BF. Clinical evaluation of whitening effect of whitening toothpastes: A pilot study. OHDMBMC. 2009;8(4):613. 2. Dursun MN, Ergin E, Tekce AU, Gurgan S. Which whitening toothpaste with different contents is more effective on colour and bond strength of enamel?. J Esthet Restor Dent. 2023;35(2):397-405.doi:10.1111/jerd.12968 3. Sivapriya E, Sridevi K, Periasamy R, Lakshminarayanan L, Pradeepkumar AR. Remineralization ability of sodium fluoride on the microhardness of enamel, dentin, and dentinoenamel junction: An in vitro study. J Conserv Dent. 2017;20(2):100-104. doi:10.4103/JCDJCD_353_16. 4. Daten liegen vor. 5. Daten liegen vor. 6. Daten liegen vor. 7. Diese Zahncreme enthält kein Peroxid.

ERGÄNZENDE *PRODUKTE*

FÜR DIE ZAHNAUFHELLUNG

Ultradent™ LC Block-Out Resin
Sof-Tray™ Folien
Ultra-Trim Federschere
Opalescence™ Aufbewahrungsboxen
KleerView™ Wangen- und Lippenpreizer
Umbrella™ Zungen, Lippen, und Wangenhalter



Ultradent™ LC Block-Out Resin

Lichthärtender Ausblock-Kunststoff



- Gezielte Applikation dank optimaler Viskosität
- Blaue Farbe für gute Sichtbarkeit während der Applikation
- Vielseitig nutzbarer Kunststoff

Opalescence™ Aufbewahrungsboxen

Zur Aufbewahrung von Schienen



- Optimaler Schutz für Schienen
- Flaches Design, passen in jede Tasche
- Innenmaße: 7,5 x 7 x 1,5 cm

Sof-Tray™ Folien

Folien für Tiefziehschienen



- 0,9 mm Sof-Tray für die meisten Aufhellungsschienen
- 1,5 mm Sof-Tray für Patienten mit Bruxismus
- 2,0 mm Sof-Tray bei schwerem Bruxismus

Ultra-Trim Federschere

Zuschneiden von Schienen



- Präzises Zuschneiden der Ränder um die Interdentalpapillen
- Federmechanismus zur Entlastung der Finger
- Gezahnte Schneiden: Ideal für das Schienenmaterial
- Haltbarer Edelstahl

KleerView™

Wangen- und Lippenpreizer



- Perfekt für die Zahnaufhellung in der Praxis, die Verarbeitung von Bonding und Kompositen sowie die klinische Fotografie

Umbrella™

Zungen, Lippen, und Wangenhalter



- Perfekt für die Zahnaufhellung in der Praxis, die Verarbeitung von Bonding und Kompositen sowie die klinische Fotografie



PROPHYLAXE UND HYGIENE



ULTRASEAL XT™ HYDRO


HYDROPHILER FISSURENVERSIEGLER




Der hydrophile Fissurenversiegler **UltraSeal XT™ hydro** ist ein lichthärtender, röntgensichtbarer, fluoridhaltiger Fissurenversiegler. Es ist als Komposit mit 53 % Füllanteil stabiler und abrasionsbeständiger und hat eine geringere Polymerisationsschrumpfung als Mitbewerberprodukte.² Bei Verwendung mit dem Inspirall™ Brush Tip verdünnt sich der hydrophile UltraSeal XT Fissurenversiegler aufgrund seiner thixotropen Eigenschaft beim Ausbringen aus dem Tip und

kann so tief in Grübchen und Fissuren eindringen. Das Komposit wird standfest, wenn es nicht mehr fließt und das Einbringen abgeschlossen ist,³ wodurch ein Weglaufen vor der Lichthärtung vermieden wird. Die fortschrittliche, hydrophile Zusammensetzung wirkt, wenn alle sichtbare Feuchtigkeit entfernt wurde. UltraSeal XT hydro Fissurenversiegler ist toleranter gegenüber Feuchtigkeit in Grübchen und Fissuren.

Vier einfache Schritte*

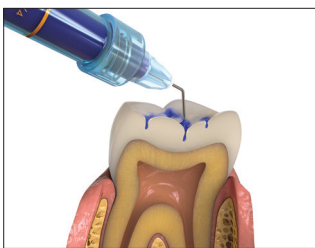


30 Sekunden lang auf ungeschliffenem Schmelz, 15 Sekunden auf geschliffenem Schmelz ätzen. Abspülen.

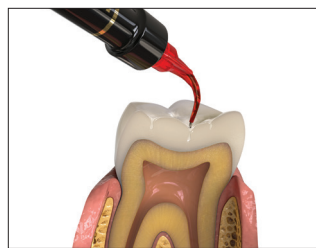

Sichtbare Feuchtigkeit entfernen.



Den Fissurenversiegler UltraSeal XT hydro applizieren.

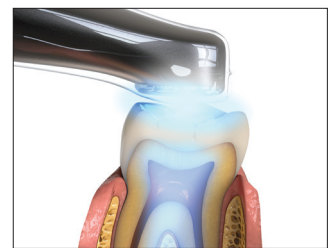

3 Sekunden mit der VALO™ LEDPolymerisationsleuchte im Xtra-Power-Modus oder 10 Sekunden im Standard-Modus lichthärten.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor. 3. Daten liegen vor.

ULTRASEAL XT™ PLUS

HYDROPHOBER FISSURENVERSIEGLER


DER MARKTFÜHRER UNTER DEN FISSURENVERSIEGLERN – SEIT 1998!



Der hydrophobe Fissurenversiegler **UltraSeal XT™ plus** ist ein lichthärtender, röntgensichtbarer Fissurenversiegler mit Fluorid. Die durchschnittliche Partikelgröße beträgt 1,4 μ und der Versiegler verfügt über einen Fülleranteil von 58 %.² UltraSeal XT plus Fissurenversiegler weist eine geringere Polymerisationsschrumpfung als Mitbewerberprodukte auf.³ Bei Verwendung mit dem Inspirat™ Brush Tip verdünnt sich der UltraSeal XT plus Fissurenversiegler aufgrund seiner thixotropen Eigenschaft beim Ausbringen aus dem

Tip und kann so tief in Grübchen und Fissuren eindringen. Das Komposit wird standfest, wenn es nicht mehr fließt und das Einbringen abgeschlossen ist,⁴ wodurch ein Weglaufen vor der Lichthärtung vermieden wird. Die Verwendung von PrimaDry™ Trocknungsmittel mit dem Fissurenversiegler UltraSeal XT plus ermöglicht das Eindringen in Grübchen und Fissuren durch die restlose Entfernung von Feuchtigkeit, die sonst zu Misserfolgen bei hydrophoben Versiegler führen kann.

Fünf einfache Schritte*

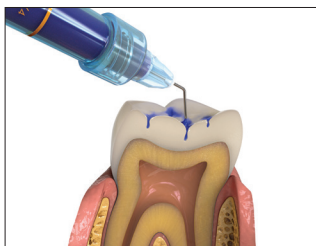


30 Sekunden auf unbeschleunem Schmelz, 15 Sekunden auf beschleunem Schmelz ätzen. Abspülen.




Sichtbare Feuchtigkeit entfernen. PrimaDry unterstützt die Trocknung.



PrimaDry Trocknungsmittel 5 Sekunden mit dem Black Micro FX Tip applizieren, dann lufttrocknen.

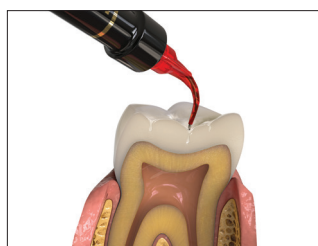

UltraSeal XT plus Fissurenversiegler applizieren.

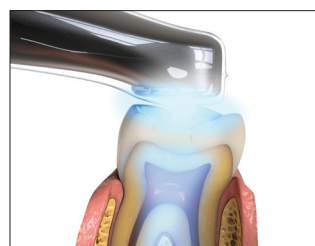

3 Sekunden mit der VALO Polymerisationsleuchte im Xtra-Power-Modus oder 10 Sekunden im Standard-Modus lichte härten.

*Die vollständigen Anweisungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. 1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor. 3. Daten liegen vor. 4. Daten liegen vor.

PRIMADRY™

TROCKNUNGSMITTEL



Das Trocknungsmittel PrimaDry™ eignet sich optimal für die Trocknung von Grübchen und Fissuren vor dem Einbringen hydrophober Fissurenversiegler. Es enthält 99 % organische Lösungsmittel und 1 % Primer. PrimaDry™ entfernt nach dem Abspritzen des Ätzmittels mit Wasser und nach der Lufttrocknung schnell alle Feuchtigkeit aus Grübchen und Fissuren. Dank des hauchdünnen Primerfilms kann

UltraSeal XT™ plus Fissurenversiegler optimal in jede Fissur einfließen. Nicht auf Dentin oder mit UltraSeal XT™ hydro Fissurenversiegler verwenden.

- Zur Verwendung mit UltraSeal XT™ plus Fissurenversiegler
- Reduziert Mikroleakage bei hydrophoben Fissurenversiegler

ULTRADENT™ UNIVERSAL DENTIN SEALANT

LACK ZUR DESENSIBILISIERUNG



Ultradent™ Universal Dentin Sealant ist ein biokompatibles, nicht polymerisierendes Harz von hohem Molekulargewicht in einem leichtflüchtigen organischen Lösungsmittel. Decken Sie empfindliche Wurzeln mit Ultradent Universal Dentin Sealant ab, um die Dentinkanälchen zu verschließen und Beschwerden¹ nach Scaling und Root Planing zu reduzieren.

- Schnelle Applikation — einbürsten und trocknen
- Hervorragendes Hilfsmittel für Dentalhygieniker
- Ideal nach Zahnsteinentfernung und Wurzelglättung
- Vorübergehende Blockierung der Dentintubuli

1. Milia E, Castelli G, Bortone A, et al. Short-term response of three resin-based materials as desensitizing agents under oral environmental exposure. Acta Odontol Scand. 2013;71(3-4):599-609. doi:10.3109/00016357.2012.700 063.

ENAMELAST™ FLUORIDLACK



Enamelast™ Fluoridlack ist ein mit Xylitol gesüßter 5 %iger Natriumfluoridlack mit Harzen als Träger. Seine einzigartige Formulierung sorgt für eine bessere Haftung und ermöglicht eine hervorragende Fluoridabgabe und -aufnahme.² Erhältlich als Spritze in der Geschmacksrichtung **Walterberry™** und als Unit-Dose in den Geschmacksrichtungen **Walterberry**, **Orange Cream**, **Cool Mint**, **Bubble Gum**, **Caramel** sowie **Neutral**.

- Patentierte, adhäsionsfördernde Formulierung für bessere Haftung
- Hervorragende Fluoridabgabe und -aufnahme²
- Glatte, feine Konsistenz
- Fast unsichtbar
- Nuss- und glutenfrei

Vorher und nachher



Vor Enamelast Fluoridlack.



Unmittelbar nach der Applikation von Enamelast Fluoridlack.



Flavor-Free



Cool Mint



Caramel



Orange Cream



Bubble Gum



Walterberry

1. realityesthetics.com. 2. Daten liegen vor.

SOFTEZ™ TIP

Der **SoftEZ™ Tip** eignet sich für die Anwendung mit Enamelast Fluoridlack. Die Kunststoff-Fasern sorgen für eine gut sichtbare, kontrollierte Applikation und einen glatten, ebenmäßigen Auftrag.



