



BLEKEN



PREVENTIE EN HYGIËNE



TANDENBLEKEN PREVENTIE EN HYGIËNE



OPALESCETM - BLEEKSYSTEMEN

OVERZICHT

PRODUCTNAAM	INHOUD	GEBRUIKSINDICATIES
-------------	--------	--------------------

Cosmetische bleekbehandelingen

   	Opalescence TM PF 10%	Kaliumnitraat, fluoride en xylitol	COSMETISCH, THUISBEHANDELING Patiënten met overgevoeligheidsklachten; kan overdag of 's nachts worden gedragen
	Opalescence TM PF 16%	Kaliumnitraat, fluoride en xylitol	COSMETISCH, THUISBEHANDELING Sneller bleken; aanbevolen om overdag te dragen
	Opalescence Go TM 6%	Kaliumnitraat, fluoride en xylitol	COSMETISCH, THUISBEHANDELING Kant-en-klaar, een alternatief voor producten uit de winkel
	Opalescence TM Office 6 %	Kaliumnitraat en fluoride	COSMETISCH, DOOR DE TANDARTS TE GEVEN Snelle behandeling aan de stoel

Medische bleekbehandelingen*

	Opalescence TM Endo	—	MEDISCH, DOOR DE ANDARTS TE GEVEN Inwendig bleken van niet-vitale, endodontisch behandelde gebitselementen
--	--------------------------------	---	--

Andere behandelingen

	Opalustre TM - microabrasiepasta	—	DOOR DE TANDARTS TE GEVEN Behandeling aan de stoel voor het verwijderen van oppervlakkige glazuurimperfecties
	UltraEZ TM - desensitisatiegel	Kaliumnitraat en fluoride	THUISBEHANDELING Behandelen van overgevoeligheid

Opmerking: om de WP-equivalent van een genoemde CP-concentratie te bepalen, moet de waarde door drie worden gedeeld. Zo komt bijvoorbeeld 45% CP overeen met ~15% WP. Dit is belangrijk voor het correct bepalen van de intensiteit van de bleekmiddelen.

SMAKEN	DRAAGDUUR	ACTIEVE STOF	waterstofperoxide- vs. carbamideperoxide-concentraties
--------	-----------	--------------	---

10% mint 10% meloen 10% normaal	8–10 uur per dag	10% carbamideperoxide	~3% WP 10% CP
16% mint 16% meloen 16% normaal	4–6 uur per dag	16% carbamideperoxide	~5,8% WP 16% CP
6% mint 6% meloen	60–90 minuten per dag	6% waterstofperoxide	6% WP
—	5 toepassingen van 20 minuten NIET MEER dan 6 keer per bezoek aanbrengen	6% waterstofperoxide	6% WP

—	1–5 dagen per behandeling	35% waterstofperoxide	35% WP
---	------------------------------	-----------------------	--------------------------------

—	In de tandartspraktijk	6,6% zoutzuur met siliciumcarbide
—	15–60 minuten per dag	3% kaliumnitraat en 0,25% neutraal natriumfluoride

*In sommige landen van de Europese Unie zijn bepaalde medische hulpmiddelen voor bleekbehandelingen niet verkrijgbaar. Vraag uw leverancier om welke producten dit gaat.

HET VERHAAL ACHTER OPALESCENCE™-BLEEKSYSTEMEN



AL MEER DAN 35 JAAR TOONAANGEVEND OP HET GEBIED VAN BLEEKBEHANDELINGEN

Van één glimlach naar die van miljoenen

“Pappa, ik wil wittere tanden. Pappa, ik wil wittere tanden.”

Jaleena hield vol. Ze knipte advertenties over bleekbehandelingen uit tijdschriften over tandheelkunde en liet briefjes achter op haar vaders nachtkastje. De 14-jarige dochter van dr. Fischer, Jaleena, was vast van plan ervoor te zorgen dat haar vader zou blijven werken aan de ontwikkeling van wat later bekend zou worden als de Opalescence™-bleekbehandeling.

“Nog even geduld, lieverd, ik ben al met iets bezig”, antwoordde dr. Fischer dan steeds.

Op de afdeling onderzoek en ontwikkeling van Ultradent Products werkte dr. Fischer dag in dag uit aan een manier om zijn bleekbehandelingsproduct precies zo te krijgen als hij het hebben wilde. Hij wist dat het een kleverige, viskeuze consistentie moest hebben, zodat de gel op zijn plaats zou blijven en om te voorkomen dat het vanuit de lepel zou weglekken naar de weke delen. En het product moest zorgen voor een continue afgifte van peroxide, voor superieure bleekresultaten. Bovendien moest het product in een zachte, dun geschulpte lepel met reservoirs zitten, zodat

tijdens de hele behandeling een maximale hoeveelheid gel in contact zou staan met het gebit.

Op een avond in 1990, toen dr. Fischer eindelijk tevreden was met de bleekgel die hij en zijn team hadden gemaakt, nam hij de gel mee naar huis, naar Jaleena. Hij vroeg haar om de lepel met de nieuwe Opalescence™-bleekgel voor het naar bed gaan in te doen en hem de hele nacht te dragen. “Als je morgenochtend wakker wordt”, zei hij, “haal de lepel dan niet uit je mond. Kom eerst naar mij toe, dan halen we hem er samen uit.” De volgende ochtend namen Jaleena en haar vader de lepel uit haar mond. Al na één nacht was de kleur van haar gebit veranderd van A3 naar A1.

Die voor Jaleena en haar vader zo gedenkwaardige ochtend is nu al meer dan 35 jaar geleden. Inmiddels is Opalescence™ van één kleverige, viskeuze gel met 10% carbamideperoxide uitgegroeid tot een compleet assortiment voor bleekbehandelingen. Opalescence™-bleeksystemen zijn nu wereldwijd toonaangevend op het gebied van bleekbehandelingen en hebben miljoenen mensen geholpen om hun gebit lichter en hun glimlach stralender te maken, voor meer zelfvertrouwen en een betere levenskwaliteit. En daarvan kunnen ook uw patiënten profiteren!

COSMETISCH THUIS BLEKEN

MET OPALESCENCE™ PF

COSMETISCH BLEKEN MET INDIVIDUELE LEPELS

10% en 16% carbamideperoxide
met kaliumnitraat en fluoride



Met **Opalescence™ PF**-bleekgel kunnen uw patiënten professioneel bleken, maar dan gewoon thuis. Opalescence™ PF-bleekgel is verkrijgbaar in de smaken mint, meloen en normaal en wordt aangebracht met op maat gemaakte lepels, waardoor de behandeling nog beter op het gebit en de glimlach van uw patiënten is toegesneden. Opalescence™ PF-bleekgels bevatten PF (kaliumnitraat en fluoride). Het watergehalte van twintig procent voorkomt dehydratatie en

rebound-effect. Het is verkrijgbaar in twee concentraties (10% en 16% carbamideperoxide). Help uw patiënten om de beste methode te kiezen, afhankelijk van hun gevoeligheid, hoe snel zij resultaten willen zien en hoe lang ze de lepels willen dragen (4-6 uur of de hele nacht). Na de eerste behandeling in de tandartspraktijk kunnen de bleeklepels gemakkelijk thuis worden gedragen.

Methode*



Breng aan de faciale kant van de lepel, ongeveer op halve hoogte van de incisale rand, een doorgaande rups van gel aan (1/3 à 1/2 van een spuit).



Breng de lepel op de tanden aan. Druk zachtjes op de lepel tot de gel goed op zijn plaats zit. Te hard drukken zorgt ervoor dat de gel uit de lepel wordt geperst.



Verwijder overtollige gel met een zachte tandenborstel. Draagtijd: 10% 's nachts of 16% gedurende 4 à 6 uur.



Poets de tanden aan het einde van de behandeling. Gebruik een zachte tandenborstel en water om de lepel schoon te maken.

Klinische toepassingen



Voor het bleken.



Na een behandeling van 8 dagen met Opalescence PF 16%-bleekgel, iedere dag 3 uur.



Voor het bleken.



Bovenkaak na een behandeling van 5 nachten, in totaal ongeveer 40 uur.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com.

COSMETISCH BLEKEN IN DE TANDARTSPRAKTIJK

MET OPALESCENCE™ OFFICE™

COSMETISCHE BLEEKBEHANDELING AAN DE STOEL

6% waterstofperoxide met kaliumnitraat en fluoride



Opalescence™ Office™ is een systeem voor cosmetische bleekbehandelingen aan de stoel, voor mensen die voor het eerst een bleekbehandeling krijgen. Het begin van iedere bleekbehandeling vindt volledig plaats door of onder toezicht van een tandarts, in overeenstemming met de richtlijnen voor bleekbehandelingen uit de Europese Cosmeticarichtlijn. Bleekbehandelingen met Opalescence™ Office™ zijn van

begin tot eind exclusief aan tandartsen voorbehouden. De behandeling kan per bezoek maximaal vijf keer worden herhaald. Breng de gel niet meer dan zes keer per bezoek aan. Geef uw patiënten een realistische verwachting, aangezien er mogelijk meerdere behandelingen in de tandartspraktijk nodig zijn.

Methode*



Zorg dat de spuit en de kleine doorzichtige steel goed met elkaar verbonden zijn. Meng als volgt: Duw de rode plunjer in. Duw de kleine doorzichtige steel in de grote doorzichtige steel. Duw de doorzichtige plunjer in de rode spuit. Zet uw duimen op de beide plunjers en duw de inhoud snel van de ene naar de andere spuit, 50 keer (25 keer per richting).



Duw de hele inhoud in de rode spuit. Maak de twee spuitjes los en breng een Micro 20 ga FX-tip aan. Na het mengen blijft Opalescence Office-gel gekoeld nog goed gedurende 10 dagen. Gooi het na 10 dagen op de juiste wijze weg.



Breng de wangretractors aan. Spoel het gebit en droog het.



Maak een barrière met de kunststof OpalDam™ Green.



Hard de kunststofbarrière uit met licht.



Breng Opalescence Office-gel aan. Laat de gel 10 à 20 minuten inwerken.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies.

COSMETISCH BLEKEN IN DE TANDARTSPRAKTIJK

MET OPALESCENCE™ OFFICE™

Methode*



Zuig de gel van de gebitselementen. Gebruik geen water. Herhaal de stappen voor het aanbrengen en verwijderen maximaal vijf keer. (Niet vaker dan 6 keer per bezoek aanbrengen.)



Spoel het gebit schoon nadat u voor de laatste keer de gel heeft verwijderd.



Verwijder de kunststofbarrière.



Beoordeel de kleurverandering.

OPALDAM™ EN OPALDAM™ GREEN

Lichtuithardende kunststofbarrières



OpalDam™ is een lichtuithardende, passief adhesieve (verzegelende) kunststofbarrière op methacrylaatbasis die wordt gebruikt voor het isoleren van weefsel naast gebitselementen die worden gebleekt. Indien één gebitselement wordt gebleekt, kan OpalDam™ gebruikt worden ter bescherming van de aangrenzende elementen.

De kunststofbarrière OpalDam™ reflecteert licht om warmteontwikkeling en gevoeligheid van het weefsel tijdens de uitharding te minimaliseren. De kunststofbarrière OpalDam™ Green zorgt elke keer voor een veilige, onmiskenbare barrière.

Methode*



1. Breng OpalDam-kunststofbarrière aan met een hoogte van ca. 5–10 mm. Verzegel de interproximale ruimtes. Verzegel de interdentale ruimten. Zorg dat de kunststof het droge glazuur met ongeveer 2-3 mm overlapt voor een goede verzegeling. Laat de kunststof doorlopen tot een element verder dan het laatste gebleekte element. Hard het materiaal gedurende 20 seconden uit met licht, met een scannende beweging.

2. Verwijder uitgeharde kunststof snel en gemakkelijk in één stuk of slechts enkele vrij grote stukken. Controleer of er interdentaal uitgeharde kunststof is achtergebleven. Gemaakt om gemakkelijk uit openingen en ondersnijdingen te verwijderen.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com.

COSMETISCH THUIS BLEKEN

MET OPALESCENCE GO™

COSMETISCH BLEKEN MET VOORGEVULDE LEPELS

6% waterstofperoxide
met kaliumnitraat en fluoride



Opalescence Go™-bleekgel kan meteen uit de verpakking worden gebruikt. De verbeterde lepel sluit nog mooier aan en zit nog prettiger. Na slechts 10 minuten in de mond wordt de UltraFit™-lepel zachter en past zich aan de tandboog aan, voor een comfortabele en effectieve pasvorm die voelt alsof hij op maat is gemaakt. Door de bedekking van molaar tot molaar komt de gel in aanraking met meer posterioorelementen. Opalescence Go™-bleekgel bevat 6% H₂O₂ (draagtijd 60 à 90 minuten) en is verkrijgbaar in de heerlijke smaken mint en

meloen. Opalescence Go™-bleekgels bevatten PF (kaliumnitraat en fluoride). Het watergehalte van twintig procent voorkomt dehydratatie en rebound-effect. Na de eerste behandeling in de tandartspraktijk kunnen de bleeklepels gemakkelijk thuis worden gedragen.



Methode*



Haal het product uit de verpakking.
"U" – bovenkaak
"L" – onderkaak



Plaats de lepel voor de bovenkaak op de gebitselementen.



Bijt stevig dicht en zuig 2 seconden aan de lepel.



Verwijder de gekleurde buitenste lepel en laat de witte binnenste lepel op het gebit zitten. Herhaal deze stap voor de lepel voor de onderkaak.



Draag de lepels gedurende de tijd die is aangegeven, verwijder daarna de lepels en poets uw tanden.

Voor en na



Voor het bleken.



Na een behandeling van 6 dagen met Opalescence Go-bleekgel, gedurende telkens 90 minuten.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com.

MEDISCH BLEKEN IN DE TANDARTSPRAKTIJK

MET OPALESCENCE™ ENDO

MEDISCH BLEKEN VAN NIET-VITALE ELEMENTEN MET 'WALKING BLEACH'-TECHNIEK

35% waterstofperoxide



Opalescence™ Endo-bleekgel heeft een speciale formule voor het bleken van endodontisch behandelde en als gevolg van ziekten, letsel of medische behandelingen intern verkleurde gebitselementen, met behulp van de 'walking bleach'-techniek. Nadat Opalescence™ Endo-bleekgel is ingebracht in de pulpakamer, moet die vervolgens met een tijdelijk cement wordt afgesloten. Het materiaal blijft daarna

drie à vijf dagen in het gebitselement.

In sommige landen van de Europese Unie zijn bepaalde medische hulpmiddelen voor bleekbehandelingen niet verkrijgbaar. Vraag uw dental depot om welke producten dit gaat.

Methode*

TIJDELIJKE RESTAURATIE: "Walking Bleach"-techniek

OPMERKING: voorkom dat de bleekgel naar de randen wordt geduwd, omdat de tijdelijke verzegeling daaronder mogelijk te lijden heeft.

J-Temp™

LICHTUITHARDEND TIJDELIJK
RESTAURATIEMATERIAAL



1. Beoordeel, prepareer en verzegel de pulpakamer volgens de gebruiksaanwijzing.



2. Breng de bleekgel in de pulpakamer aan en laat daarbij 3–5 mm ruimte over voor het tijdelijke restauratiemateriaal J-Temp (tussen de bleekgel en J-Temp hoeft geen barrière te worden aangebracht).



3. Breng J-Temp stapsgewijs aan in lagen van 2–3 mm.



4. Hard de lagen tussendoor uit met licht.



5. J-Temp kan gemakkelijk worden verwijderd en vervangen bij iedere volgende afspraak.

Voor en na



Voor het bleken.



Na het bleken.



Voor het bleken.



Na het bleken.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com.

SPECIALE BLEEKBEHANDELINGEN

MET OPALUSTRE™-PASTA

CHEMISCHE EN MECHANISCHE ABRASIEVE PASTA

6,6% zoutzuur



Opalustre™-pasta heeft een lage concentratie van 6,6% zoutzuur en bevat microdeeltjes siliciumcarbide, voor het chemisch verwijderen van verkleuringen en lichte mechanische abrasie. Deze microabrasie is een minimaal invasieve behandeling voor het permanent verwijderen van oppervlakkige witte en bruine verkleuringen en verschijnselen als lichte fluorose of demineralisatie. Zorgt al binnen één behandeling voor resultaten die een verandering


in iemands leven tweeweg kunnen brengen.

Opalustre™-pasta heeft een optimale viscositeit voor nauwkeurige abrasie en controle over de pasta. Dankzij de actieve behandeling houdt de tandarts altijd de touwtjes in handen bij het verwijderen van de verkleuringen. Gebruik de Opalustre™-pasta met OpalCups™-cupjes om zo min mogelijk spatten te veroorzaken en om de pasta efficiënt op het verkleurde gebied te kunnen aanbrengen.

Methode*



Voor.

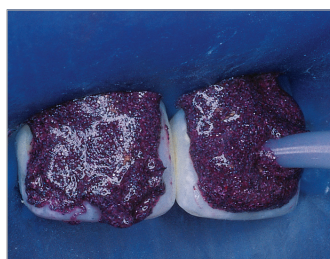

Plaats een cofferdam en breng vervolgens met de spuit Opalustre-pasta aan op het verkleurde glazuur.



Gebruik het OpalCups-borstelcupje om de Opalustre-pasta op het tandoppervlak te duwen. Gebruik hierbij matige tot sterke druk. Zuig de pasta van de gebitselementen af en spoel het gebied, beoordeel het resultaat en herhaal het polijsten eventueel. Rond de behandeling af door te polijsten met het OpalCups-afwerkcupje.



Na micro-abrasie van het glazuur en 21 dagen gebruiken van de Opalescence-bleekgel.

Voor en na



Verwijder of verminder in enkele behandelingen met Opalustre-pasta lichte tot matige decalcificatie als gevolg van orthodontische behandelingen. Breng het materiaal aan met stijve borstelcupjes en een handstuk met een overbrenging van 10:1. Gebruik daarbij stevige druk.

Decalcificatie van het glazuur is gecorrigeerd na een behandeling met Opalustre™-pasta met behulp van het OpalCups-borstelcupje en een handstuk met sterke druk, bij een overbrenging van 10:1.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com.

AANVULLENDE PRODUCTEN

VOOR BLEEKBEHANDELINGEN

Ultradent™ LC Block-Out Resin
Sof-Tray™ Classic Sheets
Ultra-Trim Scalloping Scissors
Opalescence™ Pocket Tray Cases
OpalDam™ -/OpalDam™ Green-kunststofbarrières
Umbrella™ Tong-, lip- en wangretractor



Ultradent™ LC Block-Out Resin

Lichtuithardende uitblokkunststof



- Optimale viscositeit voor gemakkelijk appliceren
- Blauwe kleur voor zichtbaarheid tijdens het appliceren
- Uitstekende gebruikskunststof voor verschillende toepassingen

Opalescence™ Pocket Tray Cases

Bewaren van lepels



- Beschermt lepels als ze niet in gebruik zijn
- Plat ontwerp, geschikt voor jas- of broekzak
- Binnenafmetingen: 7,5 x 7 x 1,5 cm

Sof-Tray™ Classic Sheets

Plaatmateriaal voor het dieptrekken van lepels



- 0,9 mm Sof-Tray voor de meeste bleeklepels
- 1,5 mm Sof-Tray voor bruxispatiënten die een bleekbehandeling ondergaan
- 2,0 mm Sof-Tray voor patiënten met ernstig bruxisme

OpalDam™ en OpalDam™ Green

Lichtuithardende kunststofbarrières



- Rechtstreekse applicatie
- Dekt de orale weefsels effectief af met een ondoordringbare verzegeling, zo worden bleekbehandelingen in de tandartspraktijk gemakkelijker dan ooit tevoren
- Reflecteert licht, om warmteontwikkeling en gevoeligheid van het weefsel tijdens de uitharding te minimaliseren
- Gemakkelijk te verwijderen

Ultra-Trim Scalloping Scissors

Voor het bijknippen van lepels



- Gebruik de schaar voor het precies bijknippen van de rand rond de interdentale papilla
- Voorzien van een veer om vermoeide vingers tot een minimum te beperken
- Pakt het lepelmateriaal gemakkelijk vast
- Gemaakt van robuust roestvrij staal

Umbrella™

Tong-, lip- en wangretractor

- Zeer geschikt voor het bleken van het gebit in de tandartspraktijk



NABEHANDELING

MET ULTRAEZ™-DESENSITISATIEGEL

DESENSIBILISERINGSBEHANDELINGEN

3% kaliumnitraat met fluoride
(0,25% neutraal NaF)



UltraEZ™ is een desensitisatiegel met 3% kaliumnitraat en fluoride (0,25% neutraal NaF) met voortdurende afgifte. De kleverige, viskeuze gel blijft in de lepels en op de gebitselementen achter en geeft onmiddellijk een desensibiliserend effect. De formule zorgt voor snelle vermindering van gevoeligheid als gevolg van poetsabrasie, thermische en chemische

veranderingen, bleekbehandelingen en blootliggende wortels. De gel zit in de revolutionaire UltraFit™-lepel. Het product kan worden aangebracht door tandheelkundige professionals of wordt meegegeven aan patiënten met dentine-overgevoeligheid voor behandeling thuis.

Methode met voorgevulde trays*



Plaats de lepel voor de bovenkaak op de gebitselementen.



Bijt stevig dicht en zuig 2 seconden aan de lepel.



Verwijder de gekleurde buitenste lepel en laat de witte binnenste lepel op het gebit zitten. Herhaal deze stap voor de lepel voor de onderkaak.



Draag de lepels gedurende de tijd die is aangegeven, verwijder daarna de binnenste witte lepels en poets uw tanden.

Methode met spuiten*



Breng aan de faciale kant van de lepel, ongeveer op halve hoogte van de incisale rand, een doorgaande rups van gel aan (1/3 à 1/2 van een spuit).



Breng de lepel op de tanden aan. Druk zachtjes op de lepel tot de gel goed op zijn plaats zit. Te hard drukken zorgt ervoor dat de gel uit de lepel wordt geperst.



Draag gedurende 15 minuten à 1 uur per dag.



Poets de tanden aan het einde van de behandeling. Gebruik een zachte tandenborstel en water om de lepel schoon te maken.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com.

NABEHANDELING

MET OPALESCENCE™ WHITENING-TANDPASTA

TANDPASTA

Originele formule

Formule voor gevoelige tanden



Opalescence™ is wereldleider op het gebied van professionele bleekbehandelingen.⁶ Onderdeel van deze productfamilie is Opalescence™ Whitening Toothpaste⁷, die ontwikkeld is door een tandarts. Hij verwijdert oppervlakkige verkleuringen² actief en is daarbij mild genoeg om iedere dag te gebruiken⁵, dankzij het unieke siliciummengsel.

- Maakt gebitselementen tot wel 2 tinten lichter in slechts 2 weken²
- Bevat gehydrateerd siliciumdioxide, waarvan is aangetoond dat het vlekken verwijdert¹
- Mild voor het tandvlees¹
- Veilig voor langdurig dagelijks gebruik
- Bevat natriumfluoride ter voorkoming van caviteiten en ter versterking van het glazuur³
- Uitstekende fluorideopname⁴
- 78 RDA⁵
- Formule zonder triclosan en TiO_2
- Vegan – geen gebruik van dierlijke producten
- Drie exotische muntsmaken vormen samen een frisse, zuivere en koele smaak
- Gezoet met xylitol, waardoor mogelijk het risico van tandbederf vermindert
- Onze formule Sensitivity Relief biedt alle voordelen voor het bleken van het gebit van de Original-formule, met als bijkomend voordeel kaliumnitraat in de maximale sterkte van 5%

VOOR EN NA



Al zichtbaar binnen één week¹

1. Çakmakcioğlu O, Yılmaz P, Topbaşı BF. Clinical evaluation of whitening effect of whitening toothpastes: A pilot study. OHDMBMC. 2009;8(4):613. 2. Dursun MN, Ergin E, Tekce AU, Gurgan S. Which whitening toothpaste with different contents is more effective on colour and bond strength of enamel? J Esthet Restor Dent. 2023;35(2):397-405.doi:10.1111/jerd.12968 3. Sivapriya E, Sridevi K, Periasamy R, Lakshminarayanan L, Pradeepkumar AR. Remineralization ability of sodium fluoride on the microhardness of enamel, dentin, and dentinoenamel junction: An in vitro study. J Conserv Dent. 2017;20(2):100-104. doi:10.4103/JCD.JCD_353_16. 4. Gegevens bij ons in het archief. 5. Gegevens bij ons in het archief. 6. Gegevens bij ons in het archief. 7. This toothpaste does not contain peroxide.

MARKETINGMATERIAAL

Maak uw patiënten enthousiast met marketingmateriaal dat speciaal voor uw praktijk ontworpen is.
Gratis voor uw praktijk.

Opalescence™ Wachtkamervideo

Wilt u graag een film over tandenbleken met Opalescence in uw wachtkamer laten zien? Geen probleem! Wij helpen u daarbij. Scan de QR-code voor de YouTube-versie. U kunt de video ook bij ons opvragen via infoNL@ultradent.com.



Opalescence™ Patiëntenfolders:

Tips en tricks tijdens de bleekbehandeling 10 st.

Gebruik deze brochures om uw patiënten snel en gemakkelijk uit te leggen hoe zij zelf thuis kunnen bleken. Er staat handige informatie in over het bleken zelf en de nazorg.



UPP 228-NL



UPP 230-NL

Opalescence™ Patiëntenfolders: Informatie over tandenbleken 10 st.

Wachtkamerbrochures over Opalescence-bleeksystemen zijn mooi vormgegeven vouwfolders die uw patiënten kort en duidelijk uitleggen hoe tandenbleken in zijn werk gaat. Zo maakt u hen enthousiast voor een stralendere lach.



UPP 213-NL



UPP 215-NL

Opalescence™ Posters

420 x 594 mm 1 st.

Hang mooie posters op in uw wachtkamer en in de praktijk om uw patiënten te interesseren voor Opalescence-bleekbehandelingen.



UPP 240-NL

Opalescence™ Dispenser Displays 1 st.

Opalescence-dispensers zijn ideaal om een gesprek mee te beginnen. Zet ze in de hal, op de receptiebalie of in de behandelkamer en gebruik ze voor onze vouwfolders UPP 213 en UPP 215.



UPP 244-NL

Opalescence™ Brochure 1 st.

Algemene informatie over tandenbleken en de behandeling van verkleuringen met Opalescence voor cosmetisch en medisch bleken. Deze brochure helpt om het hele tandheelkundig team te informeren, maar is ook nuttig tijdens gesprekken met patiënten.



UPP 260-NL



PREVENTIE EN HYGIËNE



ULTRASEAL XT™ HYDRO


HYDROFIELE SEALANT VOOR PITS EN FISSUREN




UltraSeal XT™ hydro, een hydrofiele pit- en fissuursealant, is een lichtuithardende, radiopake composietsealant die fluoride bevat. Het materiaal is sterker en beter bestand tegen slijtage, omdat de kunststof voor 53% gevuld is en minder polymerisatiekrimp vertoont.² Bij gebruik met de Inspiral™ Brush-tip zorgt het thixotrope karakter van UltraSeal XT hydro-sealant ervoor dat het dunner wordt tijdens doseren vanuit de tip. Hierdoor kan het volledig doordringen in de

pits en fissuren. Als de kunststof stopt met vloeien wordt hij niet meer verdund onder invloed van schuifkrachten en is het materiaal aangebracht.³ Het kan daardoor niet wegvloeien voor het kan worden uitgehard met licht. De geavanceerde, hydrofiele samenstelling werkt als al het zichtbare vocht is verwijderd. Bij de UltraSeal XT hydro-sealant is vocht diep in pits en fissuren minder problematisch.

Vier eenvoudige stappen*

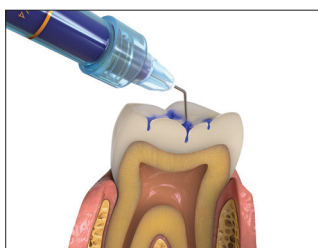


1. Ets gedurende 30 seconden op onbewerkt glazuur en gedurende 15 seconden op bewerkt glazuur. Spoel.

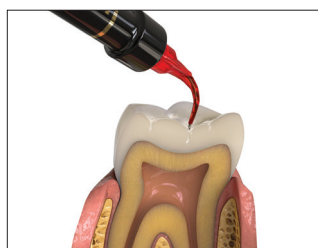

2. Verwijder zichtbaar vocht.



3. Breng de UltraSeal XT hydro-sealant aan.

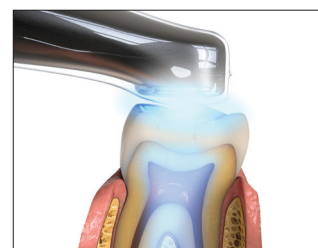

4. Hard het materiaal gedurende 3 seconden uit met de VALO™-ledpolymerisatielamp in de stand 'Xtra Power' of gedurende 10 seconden in de normale stand.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com. 2. Gegevens bij ons in het archief. 3. Gegevens bij ons in het archief.

ULTRASEAL XT™ PLUS

HYDROFOBE PIT- EN FISSUURSEALANT


**MARKTLEIDER OP HET GEBIED
VAN SEALANTS SINDS 1998!**



De hydrofobe pit- en fissuursealant **UltraSeal XT™ plus** is een lichtuithardende, radiopake composietsealant die fluoride bevat. De gemiddelde deeltjesgrootte is 1,4 micron en de sealant heeft een vulstofgehalte van 58%.² UltraSeal XT plus-sealant vertoont minder polymerisatiekrimp dan concurrerende producten.³ Bij gebruik met de Inspiral™ Brush-tip zorgt het thixotrope karakter van UltraSeal XT plus-sealant ervoor dat het materiaal dunner wordt tijdens doseren vanuit de tip. Hierdoor kan het diep doordringen in de pits en

fissuren. Als de kunststof stopt met vloeien wordt hij niet meer verdund onder invloed van schuifkrachten en is het materiaal aangebracht.⁴ Het kan daardoor niet wegvloeien voor het kan worden uitgehard met licht. Door het droogmiddel PrimaDry™ en het sealingmateriaal UltraSeal XT plus samen te gebruiken, kan UltraSeal XT plus volledig in pits en fissuren doordringen, doordat eventueel vocht wordt weggenomen dat bij hydrofobe sealants problemen kan veroorzaken.

Vijf eenvoudige stappen*

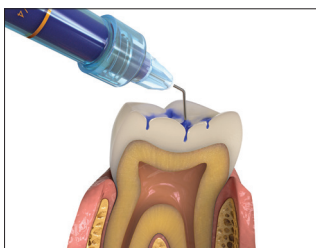

1. Ets gedurende 30 seconden op onbewerkt glazuur en gedurende 15 seconden op bewerkt glazuur. Spoel.




2. Verwijder zichtbaar vocht. Het droogmiddel PrimaDry™ zal het gebied verder droogmaken.



3. Breng het middel PrimaDry gedurende 5 seconden aan met de Black Micro™ FX™-tip, blaas daarna droog met lucht.



4. Appliceer UltraSeal XT plus-sealant.

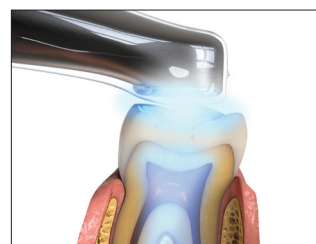

5. Hard het materiaal gedurende 3 seconden uit met de VALO-polymerisatielamp in de stand 'Xtra Power' of gedurende 10 seconden in de normale stand.

*Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructies. 1. realityesthetics.com. 2. Gegevens bij ons in het archief. 3. Gegevens bij ons in het archief. 4. Gegevens bij ons in het archief.

PRIMADRY™ -DROOGMIDDEL



Het droogmiddel **PrimaDry™** is optimaal voor het drogen van pits en fissuren en voorafgaand aan het aanbrengen van hydrofobe sealants. Het bevat 99% organische oplosmiddelen en 1% primer. Het droogmiddel PrimaDry™ laat het vochtgehalte van pits en fissuren snel verdampen, nadat het etsmiddel er is afgespoeld met een waterspray en de fissuren zijn drooggeblazen. De ultradunne primerlaag

zorgt ervoor dat de sealant UltraSeal XT™ plus perfect in elke fissuur vloeit. Gebruik het materiaal niet op dentine of met UltraSeal XT™ hydro-sealant.

- Te gebruiken met de pit- en fissuursealant UltraSeal XT plus.
- Vermindert microlekkage bij hydrofobe sealants

ULTRADENT™ UNIVERSAL DENTIN SEALANT

VOOR VOORBIJGAANDE GEVOELIGHEID VAN TANDWORTELS



Ultradent™ Universal Dentin Sealant is een biocompatibele, nietpolymeriseerbare kunststof met een hoge molecuulmassa in een vluchtig organisch oplosmiddel. Dek gevoelige tandwortels af met Ultradent Universal Dentin Sealant voor het verzegelen van de dentinetubuli en ter vermindering van ongemak¹ na beslijpen van wortels en ingrijpende tandsteenverwijdering.

- Snelle applicatie – aanbrengen en drogen
- Uitstekend 'gereedschap' voor mondhygiënist
- Ideaal na het verwijderen van tandsteen en beslijpen van de wortels
- Tijdelijke blokkering van de dentinetubuli

1. Milia E, Castelli G, Bortone A, et al. Short-term response of three resin-based materials as desensitizing agents under oral environmental exposure. Acta Odontol Scand. 2013;71(3-4):599-609. doi:10.3109/00016357.2012.700 063.

ENAMELAST™ -FLUORIDELAK



Enamelast™ is een met xylitol gezoete fluoridelak met 5% natriumfluoride, in een dragermateriaal van kunststof. De unieke formule is gemaakt met een gepatenteerde hechtingsbevorderende formule, voor betere retentie en met fluoride-afgifte en opname.² Verkrijgbaar in spuiten in de smaken **Walterberry™** en als unit-doses in de smaken **Walterberry**, **Orange Cream**, **Cool Mint**, **Bubble Gum** en **Caramel** en een variant zonder smaak, **Flavor-Free**.

- Gepatenteerde, hechtingsbevorderende formule, voor betere retentie
- Superieure afgifte en opname van fluoride²
- Gladde, niet-korrelige structuur
- Vrijwel onzichtbaar
- Vrij van sporen van noten, glutenvrij

Voor en na



Voor applicatie van Enamelast-fluoridelak.



Direct na applicatie van Enamelast-fluoridelak.



Flavor-Free



Cool Mint



Caramel



Orange Cream



Bubble Gum



Walterberry

1. realityesthetics.com. 2. Gegevens bij ons in het archief.

SOFTEZ™ TIP

De **SoftEZ™-tip** is ontworpen voor gebruik met Enamelast-fluoridelak. De vezels van deze tip zorgen voor een zichtbare, goed gecontroleerde en eenvoudige applicatie.



